

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Аквамед»



В.Ерофеев

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

**«Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых:
«Аквалор экстра форте мини с Алоэ вера и Ромашкой римской», 50 мл;
«Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской», 125 мл, 150 мл»,
производства «Aarex Laboratories AB», Швеция**

1. Описание.
2. Состав.
3. Формы выпуска.
4. Свойства.
5. Показания к применению.
6. Противопоказания.
7. Побочные действия.
8. Способ применения.
9. Условия хранения.
10. Срок годности.
11. Производитель.
12. Условия отпуска из аптек.

1. Наименование ИМН и описание: Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых: «Аквалор экстра форте мини с Алоэ вера и Ромашкой римской», 50 мл; «Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской», 125 мл, 150 мл», производства Augena Laboratories AB, Швеция - прозрачная бесцветная жидкость без запаха представляет собой стерильный гипертонический раствор натуральной морской воды с экстрактами Алоэ вера и Ромашки римской, расфасованный под давлением в металлические баллончики с внутренним антисептическим покрытием различной вместимости. (Nitrogen < 1 %).

2. Состав: Натуральная неразбавленная стерильная гипертоническая (содержание NaCl 21 г/л) морская вода. Содержит все активные вещества и микроэлементы морской воды: K, Mg, Na, Cl, Se, I, Ca, Zn, Cu, Fe и др.

Экстракт Алоэ вера - 0,025% р-р

Экстракт Ромашки римской - 0,025% р-р

Не содержит консервантов.

3. Формы выпуска: «Аквалор экстра форте мини с Алоэ вера и Ромашкой римской», 50 мл; «Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской», 125 мл, 150 мл

Раствор находится под давлением в металлическом баллоне с внутренним антисептическим покрытием. Благодаря специальному одностороннему клапану сохраняет стерильность в течение всего периода использования и предупреждает обратный ток, что предотвращает попадание окружающего воздуха в баллон.

4. Свойства:

- Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки, активно очищая их от бактерий, вирусов, аллергенов, корок, слизи, частиц пыли
- Уменьшает отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, способствует восстановлению носового дыхания
- Оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, снимает раздражение
- Повышает местный иммунитет
- Ускоряет процессы регенерации слизистой оболочки полости носа и носоглотки, снижает риск развития осложнений после операций в полости носа и околоносовых пазух
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия, способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа и носоглотки
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа (сосудосуживающие, антибиотики, противоаллергические и др.), уменьшает их потребление и побочные эффекты.

5. Показания к применению:

*Профилактика и комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):

- острые и хронические риниты (насморк)
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит)
- острые и хронические аденоиды
- аллергические и вазомоторные риниты
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки)

* Комплексное лечение ОРВИ и гриппа

* Ежедневная гигиена полости носа и носоглотки

* Профилактика простудных заболеваний в период эпидемий

* Состояние после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух

6. Противопоказания:

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.

У детей может использоваться с 6-ти месяцев.

7. Способ применения:

Для детей до 2-х лет	Для детей старше 2-х лет и взрослых
Промывание носа у ребенка раннего возраста проводится в положении лежа. Повернуть голову ребенка набок. Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость. Посадить ребенка и помочь ему высморкаться. При необходимости повторить процедуру. Провести процедуру с другим носовым ходом.	Наклонить голову набок. Вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху. В течение нескольких секунд промывать носовую полость. Высморгаться. При необходимости повторить процедуру. Провести процедуру с другим носовым ходом.

Взрослым и детям проводят по 3-4 впрыскивания не менее 2-3 раз в сутки (при необходимости можно чаще).

Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

8. Побочные действия: не выявлены. Лекарственное взаимодействие не отмечалось.

9. Условия хранения: при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

10. Срок годности: 3 года. Использовать до даты, указанной на упаковке.

Сохраняет стерильность в течение всего периода использования.

11. Производитель: «Аурена Лабораторис Эй Би», Швеция, «Aurena Laboratories AB», Fjällrviksvägen 22, 653 50 Karlstad, Sweden.

Изготовлено по заказу: ЗАО «Фармамед», Россия, 109088, ул. 2-я Машиностроения, д. 12, тел. 744-06-18, факс 438-12-07


12. Условия отпуска из аптеки: без рецепта.

Генеральный директор
ЗАО «Фармамед»



Е.В. Ерофеев

«26» апреля 2010

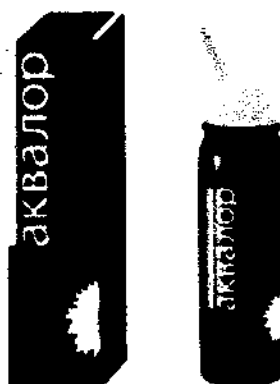

Генеральный директор
ЗАО «Фарм



Е.В. Ерофеев