

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сателлит»

Владелец
«Общество»
2010г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ изделий медицинского назначения

Средства по уходу за контактными линзами SAUFLON 7, TRIZYME,
ALL IN ONE LIGHT, SYNERGI, COMFORTVUE,
производства: "SAUFLON PHARMACEUTICALS LIMITED"
(САУФЛОН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД), Великобритания

2010

1. НАЗНАЧЕНИЕ

SAUFLON 7, TRIZYME, ALL IN ONE LIGHT, SYNERGI, COMFORTVUE – средства по уходу за всеми типами мягких и жестких газопроницаемых контактных линз.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAUFLON 7, TRIZYME, ALL IN ONE LIGHT, SYNERGI, COMFORTVUE – средства по уходу за контактными линзами применяются для очистки, ополаскивания, дезинфекции, хранения, увлажнения, освежения всех видов контактных линз.

Изделия медицинского назначения SAUFLON 7, ALL IN ONE LIGHT, SYNERGI, COMFORTVUE являются многофункциональными средствами по уходу за всеми типами мягких и жестких газопроницаемых контактных линз. Предназначены для очистки, ополаскивания, дезинфекции, хранения, увлажнения, освежения контактных линз.

Инновационная формула раствора SYNERGI особенно подходит для ухода за силикон-гидрогелевыми контактными линзами.

Средство по уходу за контактными линзами TRIZYME применяется для более тщательной и глубокой очистки всех видов контактных линз.

Применение средства SAUFLON 7 рекомендуется для усиления эффекта увлажнения при ношении всех типов мягких и жестких газопроницаемых контактных линз.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие полностью готово к применению и не требуют дополнительной подготовки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом любых действий по уходу за контактными линзами необходимо тщательно вымыть и вытереть руки.

Очистка. Поместить линзу на ладонь руки и добавить достаточное количество раствора ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SAUFLON 7 или SYNERGI. Осторожно потереть обе стороны линзы в ладони руки в течение 15-20 секунд.

Ополаскивание. После очистки ополоснуть линзы в свежем растворе ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SAUFLON 7, SYNERGI.

Удаления протеина (белков), липидов(жиров и восков), муцина и кальция:

- Наполнить цилиндрический контейнер для контактных линз свежим раствором ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SYNERGI, или SAUFLON 7 до верхней отметки.
- Поместить в контейнер одну таблетку TRIZYME, чтобы она начала растворяться.
- Провести обычную очистку линз раствором ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SYNERGI, или SAUFLON 7.
- Поместить линзы в контейнер, плотно закрыв крышку.
- Оставить линзы в контейнере на ночь или минимум на 4 часа в растворе ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SYNERGI, или SAUFLON 7.
- Вынуть линзы из контейнера и провести обычную очистку и ополаскивание линз раствором ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SYNERGI, или SAUFLON 7. Эта повторная очистка и ополаскивание необходимы для того, чтобы удалить продукты энзимной обработки с поверхности линз.

Дезинфекция. Наполнить контейнер для контактных линз свежим раствором ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE или SYNERGI и поместить промытые линзы соответственно в правый и левый отсек контейнера. Оставить линзы в контейнере минимум на 4 часа или на ночь.

Срочная дезинфекция. При промывании линз растворами ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE или SYNERGI одновременно происходит и дезинфекция. Особенно удобно для пациентов, носящих линзы в пролонгированном режиме.

Увлажнение. При ополаскивании линз, растворы ALL IN ONE LIGHT, COMFORTVUE, SYNERGI, или SAUFLON 7 увлажняют линзы, образуя пленку между поверхностью линзы и роговицей, обеспечивая смягчающий эффект для глаз.

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Не смешивать средства с другими жидкостями.

Проконсультируйтесь с вашим врачом – офтальмологом перед использованием любого средства по уходу за контактными линзами. В случае постоянного раздражения глаз прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим врачом – офтальмологом.

Не допускать попадания TRIZYME непосредственно в глаза.

Не промывайте контактные линзы или контейнер водой из-под крана.

Хранение. Рекомендуется снова продезинфицировать линзы после длительного хранения (7 дней или больше). После использования тщательно промыть контейнер для контактных линз кипяченой водой и оставить просушить на открытом воздухе.

Используйте содержимое флакона в течение 3-х месяцев после открытия. Храните все средства по уходу за контактными линзами в недоступных для детей местах. Не допускайте соприкосновения горлышка флакона с другими поверхностями. Всегда закрывайте флакон крышкой после использования.

Храните при температуре от 4С до 30С в защищенных от света местах.

Не замораживать.

Срок годности – указан на упаковке.

Утилизация.

Подлежит утилизации через бытовую сеть.

Использованные упаковки не бросать в канализацию.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Принятая на производстве система контроля качества - ISO - гарантирует тщательный поступенчатый контроль - от сырья до готовой продукции, что обеспечивает высокий уровень потребительских характеристик выпускаемых изделий.