





ПАСПОРТ № 2838-18
ЛДГ-УФ-Ново (вариант 2)
Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме кинетическим УФ-методом

Россия, 630559, Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 492
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Примечание: "тел. (383) 227-60-90
факс (383) 332-56-84"

Наименование показателя: ЛДГ-УФ-Ново (вариант 2)
Хранить при температуре 2-8°C, допускается хранение до 25°C не более 10 суток.
Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

ТУ 9398-321-23548172-2012

Серия: 010916
Годен до: 2018-03

Инструкция по применению Набора реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме кинетическим УФ-методом

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Реагенты ЛДГ-УФ-Ново предназначены для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке и плазме кинетическим УФ-методом. Используются в клинико-диагностических лабораториях и научных учреждениях.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Реагенты ЛДГ-УФ-Ново предназначены для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке и плазме кинетическим УФ-методом. Используются в клинико-диагностических лабораториях и научных учреждениях.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ВАРИАНТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Концентрация аскорбиновой кислоты до 100 мг/л, билирубина - до 20 мг/л, триглицеридов - до 1000 мг/л, глюкозы - до 500 мг/л не влияют на точность анализа.
3.2. Линейность. Линейная область определения активности лактатдегидрогеназы - в диапазоне от 0 до 1055 Ед/л. Отклонение от линейности - не более 5%.
3.3. Чувствительность определения - не более 15 Ед/л.
3.4. Коэффициент вариации результатов определения - не более 19%.
3.5. Нормальные значения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови от 193 до 450 Ед/л.
3.6. Рекомендуется в каждой лаборатории при ис-



Россия, 630869, Новосибирская обл., г.п. Колызово
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
ПАСПОРТ № 2905-16
ЛДГ-УФ-Ново (вариант 3)
набор реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме
крови кинетическим УФ-методом

Хранить при температуре 2-8°C, допускается хранение до 25°C не более 10 суток
транспортирование при температуре от 2 до 25°C не более 10 суток

Состав

Реагент 1
Реагент 2

Номер серии 031016
Дата изготовления 2016-10
Дата выдачи паспорта 01.11.2016
Срок годности 12 мес.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Набора реагентов для определения активности
лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
ЛДГ-УФ-Ново

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов ЛДГ-УФ-Ново предназначен для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке и плазме крови человека кинетическим УФ-методом в лабораториях и научно-исследовательских учреждениях.

Конечные концентрации компонентов в реакционной смеси:
- Д-НАДФ - 0,24 ммоль/л
- пиридат натрия - 1,6 ммоль/л
- натрий аскорбат - 0,02 ммоль/л
- трис-буфер pH 7,4 - 0,07 ммоль/л

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МАТРИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Концентрация аскорбиновой кислоты до 100 мкг/л, билирубина - до 20 мкг/л, триглицеридов - до 1000 мкг/л, глюкозы - до 500 мкг/л не влияют на точность анализа.
3.2. Линейность. Линейная область определения активности лактатдегидрогеназы - в диапазоне от 90 до 1055 Ед/л. Отклонение от линейности - не более 5%.
3.3. Чувствительность определяется - не более 75 Ед/л.
3.4. Коэффициент вариации результатов определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови от 195 до 450 Ед/л - не более 5%.
3.5. Нормальные величины активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови в каждой лаборатории при ис-



Россия, 630659, Новосибирск, а/я 492
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

ПАСПОРТ № 2782-16
ЛДГ-УФ-Ново (вариант 4)
для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом

Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
ТУ 9398-321-23548172-2012

Хранить при температуре 2-8°C, допускается хранение до 25°C не более 10 суток.
Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Реагент 1
Реагент 2
Техническое хаф
Техническая плотно
Технической темп
Технической плотн

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Набора реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом

ЛДГ-УФ-Ново

Конечные концентрации компонентов в рабочем растворе реагентов:
- D-NADH - 0,24 ммоль/л;
- пиридат натрия - 1,6 ммоль/л;
- натрий асп - 0,05%;
- три-буфер, pH 7,4 - 0,07 ммоль/л.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Концентрация аскорбиновой кислоты до 100 мг/л, билирубина - до 20 мг/л, триглицеридов - до 1000 мг/л, глюкозы - до 500 мг/л не влияют на точность анализа.

3.2. Линейность. Линейная область определения активности лактатдегидрогеназы - не более 5% отклонения от клинестимости - не более 15%.



Чувствительность определения - не более 15 единиц.

Коэффициент вариации результатов определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови от 195 до 450 Ед/л.

Лаборатория при ис-



«Звезда» 2017 г.

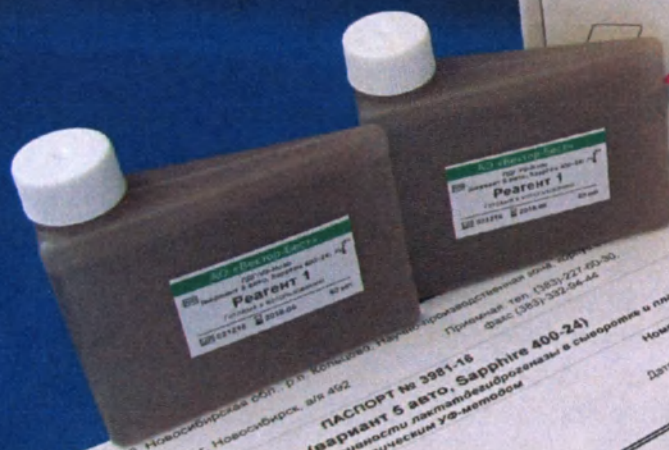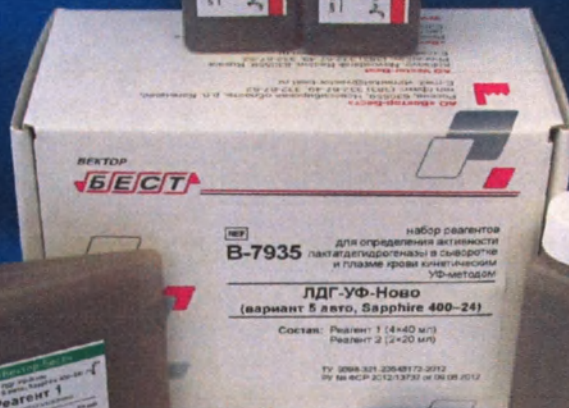

Россия, 630659, Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 492
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 44

ПАСПОРТ № 3981-16
ЛДГ-УФ-Ново (вариант 5 авто, Sapphire 400-24)
Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом

ТУ 9398-321-23548172-2012
Хранить при температуре 2-8°С, допускается хранение до 25°С не более 10 суток
Транспортировать при температуре от 5 до 25°С

Реагент 1
Реагент 2

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом

1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Реагенты ЛДГ-УФ-Ново предназначены для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови, используемой в клинических лабораториях и научно-исследовательских учреждениях (вариант 5 авто) форм.

2. ПРИМЕНЕНИЕ.
Реагенты ЛДГ-УФ-Ново предназначены для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови, используемой в клинических лабораториях и научно-исследовательских учреждениях (вариант 5 авто) форм.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Концентрация исходной сыворотки плазмы до 10 мг/дл белоксыва - до 20 мг/дл, гемоглобин - до 100 мг/дл, глюкоза - до 500 мг/дл, не влияет на точность метода.

3.2. Линейность. Линейная область определения активности лактатдегидрогеназы - в диапазоне от 90 до 1055 Ед/л. Отклонение от линейности - не более 1%.

3.3. Чувствительность определения - не более 15 Ед/л.

3.4. Коэффициент вариации результатов определения - не более 5%.

3.5. Нормальные значения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови от 105 до 450 Ед/л. Рекомендуется в каждой лаборатории при не-

