



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Ай-кол

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: АЙ-КОЛ

ОПИСАНИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол являются синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол не имеют антигенных свойств, являются апиrogenными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол производятся окрашенными и неокрашенными. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки AISI 420, 455, 470, различных типов и размеров. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол соответствуют требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) и Европейской Фармакопеи

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол применяются в хирургической практике там, где предписано использование рассасывающегося шовного материала. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол предназначены для аппроксимации и/или соединения мягких тканей, включая использование в акушерстве, гинекологии, ЖКТ, в глазной хирургии, ортопедии, урологии, стоматологии, пластической хирургии

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в ткани, с последующей постепенной герметизацией шовного материала соединительной тканью. Абсорбирование Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол происходит в процессе гидролиза: на начальной стадии теряется эффективность прочности на разрыв с последующей потерей массы. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол сохраняют 70% от первоначальной прочности на разрыв через 2 недели после имплантации, 40% через три недели. Полное рассасывание происходит через 60-75 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол не следует применять, когда требуется длительное удержание тканей с натяжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Не осторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити Ай-кол стерилизуются газообразной окисью этилена.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25°C. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке изделия. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя - 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Ай-кол

 производитель



см. сопроводительную документацию (инструкцию)



Не подлежит повторному использованию



не стерилизовать повторно



стерилизация при помощи окиси этилена



Знак соответствия



номер партии



Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке

СЕ0434 Маркировка СЕ и номер уполномоченного органа в ЕС. Продукция соответствует основным требованиям Директивы об изделиях медицинского назначения 93/42/ЕЕС.



Артикул. Номер продукта по каталогу



апирогенно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д. 64, офис №11
тел./факс (347) 2726379, 2724823
e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru
www.novish.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Ай-кол фаст**

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

ОПИСАНИЕ

Хирургические нити с иглами и без игл Ай-кол фаст являются синтетическим быстро рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон гликолевой кислоты с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст производятся окрашенными и неокрашенными. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки, AISI 420, 455, 470 различных типов и размеров. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст соответствуют требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) и Европейской Фармакопеи

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст предназначены для аппроксимации и/или соединения мягких тканей только там, где требуется краткосрочная поддержка краев раны и где желательно быстрое рассасывание шовного материала. Из-за быстрого рассасывания нити Ай-кол фаст используется для наложения кожных швов, особенно в педиатрии, а также при проведении эпизиотомии, иссечении крайней плоти и при операциях на слизистой ротовой полости. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст также используется в глазной хирургии при наложении конъюнктивальных швов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в ткани, с последующей постепенной герметизацией шовного материала соединительной тканью. Абсорбирование Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол фаст происходит в процессе гидролиза: на начальной стадии теряется эффективность прочности на разрыв с последующей потерей массы. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст сохраняют приблизительно 50 % первоначальной прочности на растяжение через 5-7 дней после имплантации. Вся первоначальная прочность на растяжение

утрачивается приблизительно через 12 дней после имплантации. Полное рассасывание нитей Ай-кол фаст в организме обычно завершается через 40-45 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст не следует применять, когда требуется длительное удержание тканей с натяжением. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст не предназначены для сердечно-сосудистых и нервных тканей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол фаст следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Не осторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол фаст должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Ай-кол фаст включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Ай-кол фаст стерилизованы радиационным методом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25°C. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке изделия. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя- 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Ай-кол фаст

 производитель



см. сопроводительную документацию (инструкцию)



Не подлежит повторному использованию



не стерилизовать повторно

STERILE R

стерилизация радиационная



Знак соответствия

LOT

номер партии



Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке

CE0434 Маркировка CE и номер уполномоченного органа в ЕС. Продукция соответствует основным требованиям Директивы об изделиях медицинского назначения 93/42/ЕЕС.

REF

Артикул. Номер продукта по каталогу



апирогенно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,

ул. Бакалинская, д. 64, офис №11

тел./факс (347) 2726379, 2724823

e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru

www.novish.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Монокол**

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: МОНОКОЛ

ОПИСАНИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол - хирургические стерильные, синтетические, рассасывающиеся, монофиламентные, полученные в результате полимеризации мономера п-диоксанона. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол окрашены D&C фиолетовый, номер цветового кода 2 (C.a.60725). Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол - это хирургическое инвазивное медицинское изделие длительного применения, которое рассасывается полностью или в значительной мере.

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки AISI 420, 455, 470, различных типов и размеров. Нити Монокол соответствуют требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) и Европейской Фармакопеи

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол показаны к применению при общем соединении мягких тканей, включая использование для соединения специфических тканей сердца в детской сердечно-сосудистой хирургии, а также использование в микрохирургии и глазной хирургии. Данный шовный материал особенно полезен там, где желательно обеспечить более длительную фиксацию раны (сроком до 6 недель) в сочетании с использованием рассасывающегося шовного материала, в детской хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии, офтальмологии, абдоминальной хирургии, ортопедии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол вызывает минимальную первоначальную воспалительную реакцию в ткани, в последующем постепенно заменяется вновь образовавшейся фиброзной соединительной тканью. Абсорбирование Нитей хирургических

рассасывающихся с иглами и без игл: Монокол происходит в процессе гидролиза: на начальной стадии теряется эффективность прочности на разрыв с последующей потерей массы. Испытания показали, что у Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Монокол сохраняется прочность на разрыв 75-80% через 2 недели, 50-70% через 4 недели, 35-50% через 42 дня, в течение 90 дней после имплантации рассасывание минимально. Полное рассасывание происходит через 180-210 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол нельзя применять там, где требуется длительное (более 6 недель) соединение тканей под действием нагрузки или в сочетании с использованием протезных изделий, например, сердечных клапанов или синтетических трансплантатов. Так как эти шовные материалы являются рассасывающимися, они не должны применяться там, где требуется длительное сопоставление тканей под давлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Монокол следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Не осторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Монокол должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Монокол включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Монокол стерилизуются газообразной окисью этилена.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25 °С. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке продукта. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя- 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

5

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Монокол

 производитель

 см. сопроводительную документацию (инструкцию)

 Не подлежит повторному использованию

 не стерилизовать повторно

 стерилизация при помощи окиси этилена

 Знак соответствия

 номер партии

 Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке
CE0434 Маркировка CE и номер уполномоченного органа в ЕС. Продукция соответствует основным требованиям Директивы об изделиях медицинского назначения 93/42/ЕЕС.

 Артикул. Номер продукта по каталогу

 апиrogenно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д. 64, офис №11
тел./факс (347) 2726379, 2724823
e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru
www.novish.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Поликол

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

Инструкция по применению

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ

ОПИСАНИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ являются синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида (полилактин 910) Эмпирическая формула сополимера – $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Гликомер 37) и стеарата кальция. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ производятся окрашенными и неокрашенными. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки AISI 420, 455, 470, различных типов и размеров. Полное описание представлено в каталоге. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ соответствуют требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) и Европейской Фармакопеи

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ применяются в хирургической практике там, где предписано использование рассасывающегося шовного материала. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ предназначены для аппроксимации и/или соединения мягких тканей, включая использование в акушерстве, гинекологии, ЖКТ, в глазной хирургии, ортопедии, урологии, стоматологии, пластической хирургии

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в ткани, с последующей постепенной герметизацией шовного материала соединительной тканью. Абсорбирование Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ происходит в процессе гидролиза: на начальной стадии теряется эффективность прочности на разрыв с последующей потерей массы. Нити ПОЛИКОЛ сохраняет 70% от первоначальной прочности на разрыв через 2 недели после имплантации, 25% через 28 дней. Полное рассасывание происходит через 60-75 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ не следует применять, когда требуется длительное удержание тканей с натяжением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Неосторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические

рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: ПОЛИКОЛ стерилизуются газообразной окисью этилена.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25°C. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке изделия. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя- 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Поликол

 производитель

 см. сопроводительную документацию (инструкцию)

 Не подлежит повторному использованию

 Не стерилизовать повторно

 стерилизация при помощи окиси этилена

 Знак соответствия

 номер партии

 Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке
CE0434 Маркировка CE и номер уполномоченного органа в ЕС. Продукция соответствует основным требованиям Директивы об изделиях медицинского назначения 93/42/ЕЕС.

 Артикул. Номер продукта по каталогу

 апиrogenно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д. 64, офис №11
тел./факс (347) 2726379, 2724823
e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru
www.novish.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Стерикрил

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: СТЕРИКРИЛ

ОПИСАНИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл

Стерикрил – это стерильный, синтетический, абсорбируемый, монофиламентный шовный материал, соответствующий требованиям стандартов Европейской Фармакопеи (EP), состоит из сополимера гликолида и капролактона, не антигенен и апирогенен.

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил производятся окрашенными и неокрашенными. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки AISI 420, 455, 470, различных типов и размеров. Полное описание представлено в каталоге. Нити Стерикрил соответствуют требованиям стандартов Фармакопеи США (U.S.P.) и Европейской Фармакопеи

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил применяются в хирургической практике там, где предписано использование рассасывающегося шовного материала.

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил предназначены для общего использования при аппроксимации и/или лигировании мягких тканей в местах, где требуется применение рассасывающегося шовного материала, в акушерстве, гинекологии, жкт, урологии, стоматологии, пластической и реконструктивной хирургии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил вызывают минимальную первоначальную воспалительную реакцию в ткани, с последующей постепенной герметизацией шовного материала соединительной тканью. Абсорбирование Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Стерикрил происходит в процессе гидролиза: на начальной стадии теряется эффективность прочности на разрыв с последующей потерей массы. Испытания показали, что Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил окрашенные сохраняют приблизительно 55% от первоначальной прочности на разрыв через 7 дней после имплантации, 25% - через 14 дней, полностью теряется через 28 дней. Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил не окрашенные сохраняют приблизительно 50% от первоначальной прочности на разрыв через 7 дней после имплантации, 20% - через 14 дней, полностью теряется через 21 день. Полное рассасывание происходит через 90-120 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил не следует применять, когда требуется длительное удержание тканей с натяжением. Неокрашенные Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил нельзя применять для ушивания брюшной полости и тканей фасций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Стерикрил следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Неосторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Стерикрил должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл Стерикрил, включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл Стерикрил могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити Стерикрил стерилизуются газообразной окисью этилена.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25° С. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке изделия. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя- 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Стерикрил

 производитель

 см. сопроводительную документацию (инструкцию)

 Не подлежит повторному использованию

 не стерилизовать повторно

 стерилизация при помощи окиси этилена

 Знак соответствия

 номер партии

 Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке

СЕ0434 Маркировка СЕ и номер уполномоченного органа в ЕС. Продукция соответствует основным требованиям Директивы об изделиях медицинского назначения 93/42/ЕЕС.

 Артикул. Номер продукта по каталогу

 апиrogenно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д. 64, офис №11
тел./факс (347) 2726379, 2724823
e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru
www.novish.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Стерикат хром

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: СТЕРИКАТ ХРОМ

ОПИСАНИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром, изготовленные из подслизистой оболочки кишечника овец, обработанные трехвалентными солями хрома и окисью пирогаллола, способны сохранять биологическую прочность до 20 дней. Цвет – темно-коричневый.

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром могут иметь различную толщину и длину нити, поставляться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки AISI 420, 455, 470, различных типов и размеров.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром применяется в хирургической практике там, где предписано использование рассасывающегося шовного материала. Чаще Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром применяются для апроксимации мягких тканей и наложения лигатур, в акушерстве, гинекологии, офтальмологии, урологии и ортопедии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Под воздействием ферментов в тканях, шовный Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром абсорбируясь, теряют сопротивление и прочность на растяжение. Эффект потери прочности на растяжение Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат хром отмечается через 14-20 дней. Полное рассасывание нитей Стерикат хром в организме завершается через 90 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром не следует применять, когда требуется длительное удержание тканей с натяжением, не рекомендуется для использования в некоторых областях сердечно-сосудистой и нейрохирургии, а также в тканях с повышенной концентрацией протеолитических ферментов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не допускайте высыхания кондиционирующего раствора, покрывающего Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром, т.к. шовный материал становится тонким. При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат хром следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Неосторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат хром должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат хром включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат хром стерилизуются газообразной окисью этилена.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25°C. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке изделия. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя- 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Стерикат хром

 производитель

 см. сопроводительную документацию (инструкцию)

 Не подлежит повторному использованию

 Не стерилизовать повторно

 стерилизация при помощи окиси этилена

 Знак соответствия

 номер партии

 Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке

 Артикул. Номер продукта по каталогу

 апиrogenно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д. 64, офис №11
тел./факс (347) 2726379, 2724823
e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru
www.novish.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл:
Стерикат простой

Производства:

«Петерс сёрджикал Индия Прайвит лимитед», Индия,
169, Sector-4, IMT, Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, India

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: СТЕРИКАТ ПРОСТОЙ

ОПИСАНИЕ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой изготовленный из подслизистой оболочки кишечника овец, сохраняет биологическую прочность до 10 дней. Цвет – светло-желтый.

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой могут иметь различную толщину и длину нити, поставяться отдельно или вместе с иглами из высокопрочной аустенитной стали марки AISI 420, 455, 470, различных типов и размеров.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, используют согласно хирургическим требованиям.

ПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой применяется в хирургической практике там, где предписано использование рассасывающегося шовного материала. Чаще Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой применяются для апроксимации мягких тканей и наложении лигатур, в акушерстве, гинекологии, офтальмологии, урологии и ортопедии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы: состояние больного, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства и размер раны.

ДЕЙСТВИЕ

Под воздействием ферментов в тканях, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой абсорбируясь, теряет сопротивление и прочность на растяжение. Эффект потери прочности на растяжение Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат простой отмечается через 10 дней. Полное рассасывание Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат простой в организме завершается через 70 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой не следует применять, когда требуется длительное удержание тканей с натяжением,

не рекомендуется для использования в некоторых областях сердечно-сосудистой и нейрохирургии, а также в тканях с повышенной концентрацией протеолитических ферментов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не допускайте высыхание кондиционирующего раствора, покрывающего Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой, т.к. шовный материал становится тонким. При использовании Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат простой следует избегать повреждений материала. При работе с хирургическим шовным материалом будьте внимательны в применении хирургических инструментов, таких как зажимы и иглодержатели. Не осторожное обращение с хирургическими инструментами может нарушить структуру шовного материала, следует также избегать чрезмерного натяжения узлов и перекручивания нити. Пользователям Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат простой должны быть знакомы хирургические методы работы с рассасывающимися шовными материалами.

Шовные материалы, которые остаются на коже более 7 дней, могут вызвать локальное раздражение. Они должны быть удалены согласно инструкции.

В тканях с недостаточным кровоснабжением рассасывающиеся шовные материалы следует использовать с осторожностью, так как может произойти отторжение шовного материала и замедление рассасывания. Подкожные швы должны быть наложены как можно глубже для уменьшения эритемы и индурации, которые обычно связаны с процессом рассасывания.

Не стерилизовать и не использовать повторно. Повторное использование изделия (или его частей) может создать риск разрушения изделия, что может привести к неправильному функционированию изделия и перекрестному заражению, что в свою очередь может привести к инфекции или передаче болезнетворных организмов через кровь пациентам и врачам.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Побочные реакции, связанные с использованием Нитей хирургических рассасывающихся с иглами и без игл: Стерикат простой включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания подкожных швов. Как и любое другое инородное тело, Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой могут обострять существующую инфекцию.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Нити хирургические рассасывающиеся с иглами и без игл: Стерикат простой стерилизуются газообразной окисью этилена.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований к условиям транспортировки и хранению не установлено. Хранить при температуре не выше 25°C. Не использовать после окончания срока годности.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия указан на упаковке изделия. При соблюдении условий хранения в упаковке изготовителя- 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии соблюдения требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования, нити представляют потенциальную биологическую опасность, так как после своего применения они могут представлять потенциальную биологическую опасность из-за загрязнения кровью и другими биологическими материалами.

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также в соответствии с законодательством утилизирующей страны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Каждая нить упаковывается в индивидуальную стерильную упаковку из фольги (первичная упаковка). Нити в индивидуальных первичных упаковках помещаются в картонную коробку (вторичная упаковка) в следующих вариантах фасовки: 12, 24 и 36 шт. После оборачивания в термоусадочную пленку, картонные коробки укладываются в третичную упаковку - картонную транспортную тару.

Графические отметки и символы, указанные на упаковке Ай-кол

 производитель



см. сопроводительную документацию (инструкцию)



Не подлежит повторному использованию



Не стерилизовать повторно



стерилизация при помощи окиси этилена



Знак соответствия



номер партии



Не использовать при нарушении барьера стерильности или при поврежденной упаковке



Артикул. Номер продукта по каталогу



апиrogenно

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО "Новис", 450022, РФ, РБ, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д. 64, офис №11
тел./факс (347) 2726379, 2724823
e-mail info@novish.ru, novish2006@mail.ru
www.novish.ru