

Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»
В.М. Сидоркин

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

медицинского изделия

Стол операционный ОК-10, варианты исполнения: ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г, ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П с принадлежностями
производства: Частное предприятие «Медпроминвест», Республика Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные технические данные	4
2	Состав изделия, устройство и работа	4
3	Комплектность	10
4	Подготовка изделия к использованию	10
5	Меры безопасности	10
6	Использование изделия	11
7	Техническое обслуживание	11
8	Консервация	12
9	Сведения об упаковке	12
10	Транспортирование и хранение	12
11	Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя (поставщика), ремонт	12
12	Сведения о рекламациях	13
13	Сведения об утилизации	13
14	Свидетельство об упаковке	13
15	Свидетельство о приемке	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ: Гарантийный талон	15

187

Стол операционный ОК-10, варианты исполнения: ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г, ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П с принадлежностями (далее — столы) предназначен для размещения и обеспечения оптимального положения пациента при проведении хирургических операций, обследований и перевязок в медицинских учреждениях.

Стол соответствует требованиям ТУ РБ 800001171.001-2001 и ГОСТ 26161-89.

Стол должен эксплуатироваться при температуре от +10°C до +35°C, при верхнем значении относительной влажности 80% при температуре +25°C.

Стол выполняется в различном конструктивном исполнении в зависимости от области применения согласно таблице 1.

Таблица 1

Обозначение стола	Отличие конструкции		Назначение стола
	панели стола	основания стола	
ОК-10-1	С боковым наклоном, с цельной ножной секцией	С тремя роликовыми опорами диаметром не менее 45 мм	Хирургические операции
ОК-10-2	С боковым наклоном, с раздельной ножной секцией, с вырезом на центральной секции		
ОК-10-3	Без бокового наклона, с цельной ножной секцией		Хирургические операции и перевязки
ОК-10-3Г	Без бокового наклона, с раздельной ножной секцией, с вырезом на центральной секции		Гинекологические, урологические и проктологические операции
ОК-10-4Г	Без бокового наклона, без ножной секции, с вырезом на центральной секции		Гинекологические и урологические обследования
ОК-10-1П	С боковым наклоном, с цельной ножной секцией	На четырех колесах диаметром не менее 150 мм	Хирургические операции, перевозки пациентов в пределах операционного блока
ОК-10-2П	С боковым наклоном, с раздельной ножной секцией, с вырезом на центральной секции		
ОК-10-3П	Без бокового наклона, с цельной ножной секцией		Хирургические операции и перевязки, перевозки пациентов в пределах операционного блока

Стол ОК-10 драгоценных металлов и их сплавов не содержит.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные параметры и размеры столов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Обозначение стола							
	ОК-10-1	ОК-10-2	ОК-10-3	ОК-10-3Г	ОК-10-4Г	ОК-10-1П	ОК-10-2П	ОК-10-3П
	Значение параметра							
Фактическая максимальная нагрузка на панель стола, кг	160	160	160	160	160	160	160	160
Высота стола (без матраса), мм:								
в крайнем нижнем положении, не более	750	750	750	750	750	630	630	630
в крайнем верхнем положении, не менее	1050	1050	1060	1060	1060	1040	1040	1040
Длина панели стола, мм	1900	1900	1900	1900	1200	1900	1900	1900
Ширина панели стола, мм	500	500	500	500	500	500	500	500
Ширина стола по рейкам, мм	550	550	550	550	550	550	550	550
Длина сечения рейки для крепления съемных приспособлений, мм	25	25	25	25	25	25	25	25
Ширина сечения рейки для крепления съемных приспособлений, мм	10	10	10	10	10	10	10	10
Подъем панели за один ход педали, мм, не менее	8	8	8	8	8	8	8	8
Масса стола (без съемных приспособлений), кг, не более	160	160	160	160	150	160	160	160
Продольный наклон панели стола, не менее:								
по Тренделенбургу	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°
по анти-Тренделенбургу	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Боковой наклон панели стола, не менее:								
вправо	20°	20°	—	—	—	20°	20°	—
влево	20°	20°	—	—	—	20°	20°	—
Наклон спинной секции, не менее:								
вверх	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°
вниз	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°
Наклон ножной секции вниз, не менее	90°	90°	90°	90°	—	90°	90°	90°

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1 Столы состоят из основания 1 (рисунки 1 — 8) и панели 2.

2.2 Основание столов состоит из шасси 3 и стойки 4. В стойке 4 основания столов смонтированы: механизм подъема и опускания панели стола, содержащий гидродомкрат. В шасси столов ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г — механизм установки стола на роликовые опоры. Столы ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П перекачиваются на колесах диаметром 150 мм (все колеса имеют тормозные устройства), установленных на поворотных кронштейнах и имеющих подшипники качения на горизонтальной оси. Защитные кожуха основания изготовлены из нержавеющей стали.

Подъем панели столов на требуемую высоту производится гидродомкратом, приводимым в действие многократным нажатием ногой на педаль подъема 5. При этом шток гидродомкрата перемещается вверх и поднимает панель стола. В исходное положение педаль подъема возвращается пружиной, расположенной в гидродомкрате.

Опускание панели столов производится с помощью той же самой педали, поднимая ее ногой вверх. При этом открывается спускной канал гидронасоса и панель стола опускается вниз.

Установка столов ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г на роликовые опоры производится нажатием ногой на педаль 6 до упора. При этом стол становится на три роликовые опоры (диаметром 45 мм). Поднятием педали 6 вверх носком ноги стол опускается на опоры.

2.3 Панель столов ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П состоит из четырех секций: головной 7, спинной 8, центральной 9 и ножной 10. Ножная секция столов ОК-10-2, ОК-10-3Г, ОК-10-2П состоит из двух частей. Панель стола ОК-10-4Г состоит из трех сек-

ций: головной 7, спинной 8, центральной 9. Спинная и центральная секции столов связаны между собой шарнирно.


Регулировка наклона панели столов по Тенделенбургу и наклона спинной секции осуществляется вращением рукоятки 11, расположенной справа. Для установки наклона панели по Тренделенбургу рукоятка должна быть в задвинутом до упора в трубе положении. Для установки наклона спинной секции переместите рукоятку в продольном направлении до упора на себя.

Регулировка бокового наклона панели столов ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-1П, ОК-10-2П осуществляется вращением рукоятки 12, расположенной слева.

Головная и ножная секции стола съемные. Ножную и головную секции можно менять местами, что делает панель стола более универсальной и расширяет возможности использования усилителя рентгеновского изображения. Головная секция может присоединяться к спинной или центральной секции посредством двух штырей, которые вставляются в отверстия секции и закрепляются на ней фиксаторами 13. Головная секция — с двойным шарниром, который позволяет придавать секции наклон и поднимать ее на необходимую высоту. Фиксирование её в выбранном положении производится ручками 14.


Ножная секция присоединяется к спинной или центральной секции при помощи направляющих, которые вставляются в пазы секции и закрепляются на ней фиксаторами 13. Ножную секцию можно установить с различным наклоном относительно спинной или центральной секции стола. Ножные секции столов ОК-10-2, ОК-10-3Г, ОК-10-2П можно развести в стороны. Фиксация в нужном положении клеммными и конусными зажимами производится ручками 15.

На панели столов расположены матрасы, которые крепятся своими штырями в отверстиях на секциях панели столов.

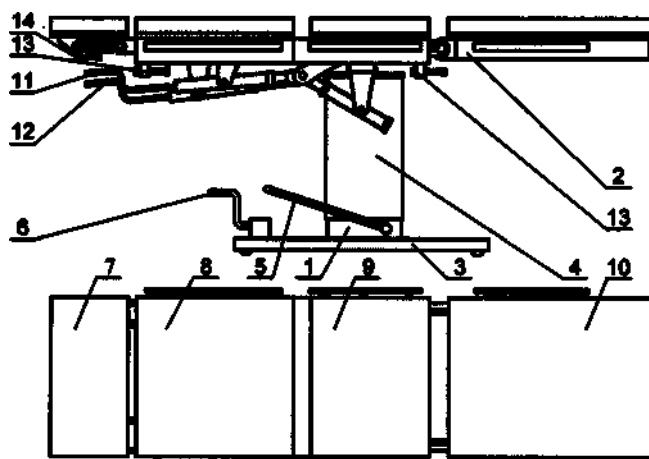


- 1 — основание; 2 — панель; 3 — шасси; 4 — стойка; 5 — педаль подъема панели;
6 — педаль установки стола на роликовые опоры; 7 — головная секция;
8 — спинная секция; 9 — центральная секция; 10 — ножная секция;
11 — рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
12 — рукоятка привода бокового наклона панели;
13 — фиксатор головной и ножной секции; 14 — ручка двойного шарнира.

Рисунок 1 — Стол операционный ОК-10-1.

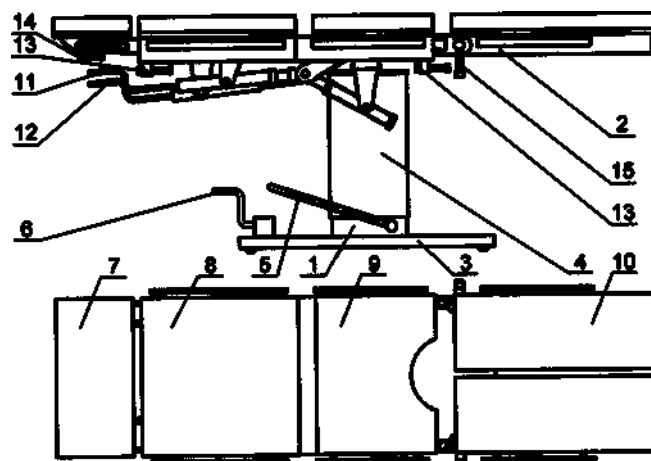


- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 6 – педаль установки стола на роликовые опоры; 7 – головная секция;
 8 – спинная секция; 9 – центральная секция; 10 – ножная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 12 – рукоятка привода бокового наклона панели;
 13 – фиксатор головной и ножной секции; 14 – ручка двойного шарнира;
 15 – ручка клеммного и конусного зажима.

Рисунок 2 — Стол операционный ОК-10-2.

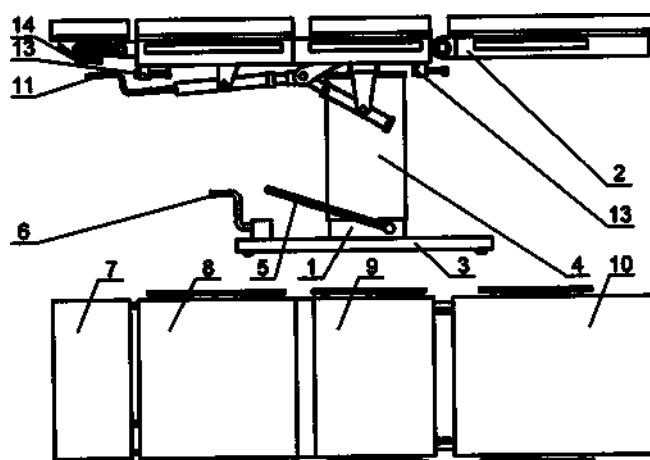


- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 6 – педаль установки стола на роликовые опоры; 7 – головная секция;
 8 – спинная секция; 9 – центральная секция; 10 – ножная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 13 – фиксатор головной и ножной секции; 14 – ручка двойного шарнира.

Рисунок 3 — Стол операционный ОК-10-3.

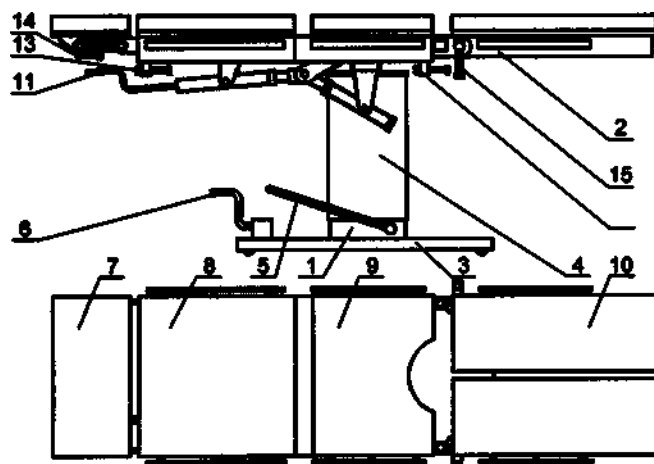


- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 6 – педаль установки стола на роликовые опоры; 7 – головная секция;
 8 – спинная секция; 9 – центральная секция; 10 – ножная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 13 – фиксатор головной и ножной секции; 14 – ручка двойного шарнира;
 15 – ручка клеммного и конусного зажима.

Рисунок 4 — Стол операционный ОК-10-3Г.

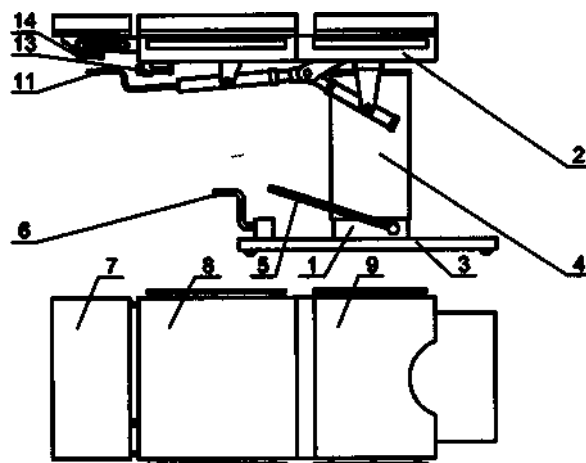


- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 6 – педаль установки стола на роликовые опоры; 7 – головная секция;
 8 – спинная секция; 9 – центральная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 13 – фиксатор головной секции; 14 – ручка двойного шарнира.

Рисунок 5 — Стол операционный ОК-10-4Г.

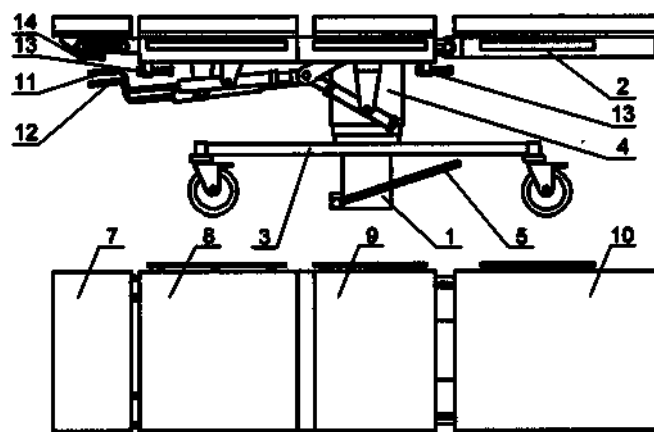


- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 7 – головная секция; 8 – спинная секция; 9 – центральная секция; 10 – ножная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 12 – рукоятка привода бокового наклона панели;
 13 – фиксатор головной и ножной секции; 14 – ручка двойного шарнира.

Рисунок 6 — Стол операционный ОК-10-1П.

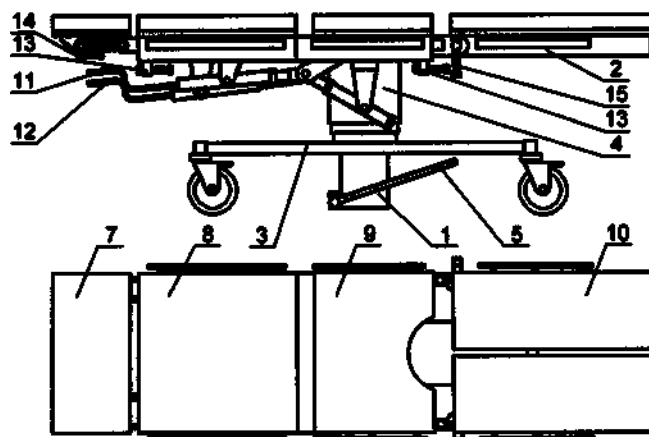

- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 7 – головная секция; 8 – спинная секция; 9 – центральная секция; 10 – ножная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 12 – рукоятка привода бокового наклона панели;
 13 – фиксатор головной и ножной секции; 14 – ручка двойного шарнира;
 15 – ручка клеммного и конусного зажима.

Рисунок 7 — Стол операционный ОК-10-2П.

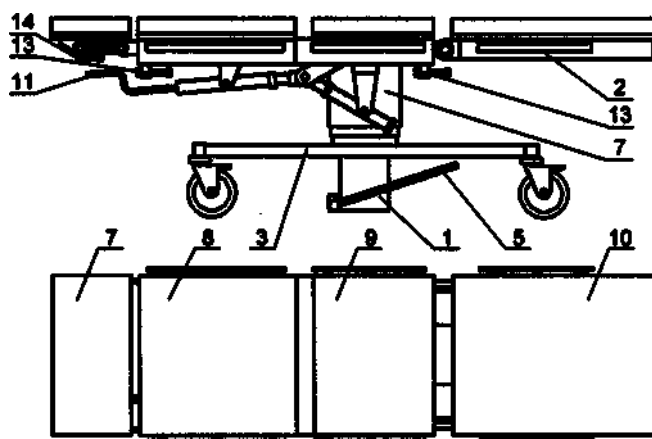

- 1 – основание; 2 – панель; 3 – шасси; 4 – стойка; 5 – педаль подъема панели;
 7 – головная секция; 8 – спинная секция; 9 – центральная секция; 10 – ножная секция;
 11 – рукоятка привода продольного наклона панели и наклона спинной секции;
 13 – фиксатор головной и ножной секции; 14 – ручка двойного шарнира.

Рисунок 8 — Стол операционный ОК-10-3П.

2.4 Столы комплектуются съемными приспособлениями, которые служат для следующих целей:

- Наркозная дуга – для навешивания простыни, отделяющей стерильную зону операции. Крепится в поворотном зажиме на рейке стола в необходимом месте.
- Рукодержатель – для фиксации руки ремнем к панели стола. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте.
- Столик для инъекций – для фиксации руки при инъекциях в руку. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте.
- Ремень для фиксации туловища – для фиксации пациента на панели стола. Крепится своими зажимами на рейках стола в необходимом месте.
- Штатив – для подвешивания флаконов. Крепится своим зажимом на рейке стола в необходимом месте. Поставляется с двумя держателями флаконов.
- Держатель флакона – для удержания флаконов.
- Ногодержатель – для фиксации ног при гинекологических, урологических и проктологических операциях. Крепится в поворотном зажиме на рейке стола в необходимом месте.
- Боковой упор – для ограничения перемещения пациента при наклоне панели стола. Крепится в зажиме на рейке стола в необходимом месте. Боковой упор может устанавливаться в различных позициях: опоры туловища, опоры плеч.
- Кассетодержатель – для размещения кассеты с рентгеновской пленкой. Устанавливается со стороны головной секции в специальные направляющие панели стола.
- Ручка для пациента – для держания руками при гинекологических осмотрах. Крепится в зажиме на рейке стола в необходимом месте.
- Почечный валик – для подъема корпуса тела при операции на почке или желчном пузыре. С ручным приводом со стороны головной секции. Рентгенопрозрачный. Устанавливается на рейки стола в необходимом месте.
- Лоток – из нержавеющей стали. Устанавливается с помощью держателя лотка при проведении гинекологических и проктологических операций.
- Зажим поворотный – для крепления с возможностью поворота приспособлений со стержнем диаметром 16 мм.
- Зажим – для крепления приспособлений со стержнем диаметром 16 мм.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Комплект поставки	Рекомендуемое кол-во, шт.							
			ОК-10-1	ОК-10-2	ОК-10-3	ОК-10-3Г	ОК-10-4Г	ОК-10-1П	ОК-10-2П	ОК-10-3П
1	Стол операционный ОК-10-	1								
	Съемные приспособления									
2	Наркозная дуга (с поворотным зажимом)		1	1	1	1		1	1	1
3	Рукодержатель		2	2		2		2	2	
4	Столик для инъекций		2	2	1	2		2	2	1
5	Ремень для фиксации туловища		1	1				1	1	
6	Штатив (с двумя держателями флаконов)		1	1	1	1		1	1	1
7	Ногодержатель (с поворотным зажимом)					2	2			
8	Боковой упор (с зажимом)		2	2				2	2	
9	Кассетодержатель		1	1				1	1	
10	Ручка для пациента (с зажимом)					2	2			
11	Лоток					1	1			
	Эксплуатационная документация									
	Руководство по эксплуатации	1								

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Полученный стол распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по руководству по эксплуатации.

4.2 Протрите наружные поверхности стола чистой ветошью.

4.3 Если стол был подвергнут консервации, произведите расконсервацию: промойте наружные поверхности стола, принадлежностей и съемных приспособлений горячей водой или моющими растворами с пассиваторами (с последующей сушкой).

4.4 При необходимости, отрегулируйте высоту двух опор, которые находятся в основании со стороны педали 6 установки стола на роликовые опоры (со стороны головной секции). Для этого ключом S=19 следует отвернуть контргайку, отрегулировать высоту опоры, после чего завернуть контргайку.

4.5 Подсоедините стол к контуру заземления с помощью заземляющего зажима, расположенного на основании стола.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Перед использованием стола проверьте надежность подсоединения заземляющего зажима стола к контуру заземления.

5.2 Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор (см. 4.4).

5.3 **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием столов ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П для проведения операции проверьте надежность фиксации колес тормозными устройствами. Передние колеса должны быть повернуты перпендикулярно панели стола в разные стороны, задние — параллельно панели стола.

Столы ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г во время проведения на них операций должны быть установлены на опоры (педаль 6 в верхнем положении).

5.4 **ВНИМАНИЕ!** Не допускается перевозить пациента на столах ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П с панелью, находящейся в крайнем нижнем положении из-за малого дорожного просвета между полом и вертикальной подвижной направляющей.

5.5 Перед использованием головной и ножной секций панели стола проверьте надежность их крепления.

5.6 Перед использованием съемных приспособлений проверьте надежность их крепления к столу.

5.7 При снятии съемных приспособлений не допускайте их падения в зажимах.

5.8 При обнаружении неисправности не приступайте к работе до ее устранения во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Подъем и опускание панели стола

6.1.1 Нажмите ногой на педаль 5 подъема панели (рисунки 1 — 8) до упора. Стол поднимается приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль столько раз, сколько необходимо для поднятия стола на требуемую высоту.

6.1.2 Для опускания панели стола поднимите педаль 5 вверх. Стол опускается. Педаль необходимо удерживать в поднятом положении до тех пор, пока панель стола не опустится на требуемую высоту.

6.2 Установка столов ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г на роликовые опоры

6.2.1 Нажмите ногой на педаль 6 до упора. Стол поднимется вверх, становясь на три роликовые опоры.

6.3 Наклоны панели стола по Тренделенбургу

6.3.1 Вращением рукоятки 11 (правая), находящейся в задвинутом в трубе до упора положении, по часовой или против часовой стрелки установите необходимый наклон по Тренделенбургу или анти-Тренделенбургу.

6.4 Наклон спинной секции

6.4.1 Вращением рукоятки 11, находящейся в выдвинутом до упора на себя положении, по часовой или против часовой стрелки установите необходимый наклон спинной секции.

6.5 Боковой наклон панели столов ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-1П, ОК-10-2П

6.5.1 Вращением рукоятки 12 (левая) по часовой или против часовой стрелки установите необходимый боковой наклон панели стола.

6.6 Наклон головной секции

6.6.1 Поверните ручки 14 фиксирования головной секции. Придайте секции необходимый наклон и поднимите ее на необходимую высоту. Зафиксируйте ее в выбранном положении ручками.

6.7 Положение головной секции в продольном направлении

6.7.1 Отверните на два оборота фиксаторы 13. Установите головную секцию на нужном расстоянии относительно спинной или центральной секции. Закрепите головную секцию в выбранном положении фиксаторами.

6.8 Установка положений ножных секций столов ОК-10-1, ОК-10-3, ОК-10-1П, ОК-10-3П

6.8.1 Отверните оба фиксатора 13 так, чтобы ослабить клеммные зажимы. Придерживая рукой ножную секцию, придайте ей необходимый наклон и зафиксируйте фиксаторами.

6.8.2 Отверните фиксаторы 13 и снимите в горизонтальном направлении ножную секцию.

6.9 Установка положений ножных секций столов ОК-10-2, ОК-10-3Г, ОК-10-2П

6.9.1 Отверните ручки 15 против часовой стрелки до ослабления усилия на рукоятке, чтобы ослабить клеммные зажимы, разведите ножные секции на необходимый угол, заверните ручки зажимов.

6.9.2 Поддерживая ножную секцию, отверните ручку 15 против часовой стрелки до ослабления усилия, при новом возрастании усилия, продолжайте вращать ручку до исчезновения сопротивления вращению рукоятки, при этом ослабляется конусный зажим. Установите ножные секции с нужным наклоном и зафиксируйте зажимом.

6.9.3 Отверните на два оборота фиксаторы 13 и снимите ножные секции в горизонтальном направлении.

6.10 Комбинируя наклоны секций, можно придать панели стола нужную конфигурацию.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Не реже одного раза в три месяца производите осмотр стола и при необходимости производите подтяжку крепежа.

7.2 Чистку и дезинфицирование стола производите дезраствором влажной салфеткой так, чтобы моющая жидкость не попадала в шарнирные соединения. После чистки стол необходимо вытереть насухо.

7.3 Не реже одного раза в год производите смазку всех трущихся поверхностей механизмов (винты подъема спинной секции и наклонов панели) солидолом «С» по ГОСТ 4366-76.

7.4 Не допускается замена винтов крепления плоскости для лежания на панели стола. В случае необходимости замены винтов следует обращаться в Частное предприятие «Медпроминвест».

8 КОНСЕРВАЦИЯ

8.1 Металлические поверхности стола обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2: срок защиты без переконсервации 5 лет при сроке транспортирования 3 месяца.

8.2 Стол операционный ОК-10-__ зав. № __ подвергнут в __ консервации согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации и технических условиях ТУ РБ 800001171.001-2001.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия и подпись
	Консервация	5	

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

9.1 Стол с комплектом поставки упакован в обрешетку типа II по ГОСТ 12082-82, обитую древесноволокнистой плитой по ГОСТ 4598-86. Обрешетка обита изнутри пергамином кровельным по СТБ 1093-97. Стол в обрешетке установлен на поддон и обернут полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354-82. Стол закреплен в обрешетке прижимными планками с прокладками из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Стол транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, при верхнем значении относительной влажности 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ с конденсацией влаги.

10.2 Стол должен храниться в закрытом помещении при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при верхнем значении относительной влажности 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

11 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА), РЕМОНТ

11.1 Ресурс стола до первого среднего ремонта — средняя наработка на отказ не менее 600 циклов (за цикл принимают: четырехкратный подъем и опускание панели стола, однократный наклон относительно продольной и поперечной осей наклона панели и возвращение в исходное положение панели) в течение среднего срока службы стола до списания не менее 10 лет.

Указанные ресурс и срок службы действительны при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации стола — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления стола к потребителю; гарантийный срок хранения стола — 24 месяца со дня изготовления при хранении и эксплуатации стола в соответствии с требованиями настоящего руководства.

11.3 Если в период гарантийного срока стол вышел из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец стола.

11.4 Гарантийный ремонт стола осуществляется Частным предприятием «Медпроминвест» (или ремонтными предприятиями, имеющими договор с изготовителем на гарантийное обслуживание стола) за счет изготовителя.

11.5 Послегарантийный ремонт стола осуществляется Частным предприятием «Медпроминвест» (или ремонтными предприятиями, имеющими договор с изготовителем на ремонт стола) за счет потребителя по отдельному договору на ремонт.

11.6 Изготовитель не несет ответственности за неисправность стола и не гарантирует его работу в случаях:

- 1) несоблюдения правил эксплуатации;
- 2) механические повреждения вследствие небрежной эксплуатации, хранения и транспортирования.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

Частное предприятие «МЕДПРОМИНВЕСТ»

Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 22-3

Тел.: (+375 17) 251-11-15, 291-08-28; факс: (+375 17) 251-55-33

12.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая изготовителем к столу;
- акт о консервации (если стол находится на консервации, выполненной потребителем).

12.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

12.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

12.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения стола и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы стола с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

13.1 Стол не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. В этой связи утилизация стола производится по СанПиН № 2.1.7.14-20-2005 «Правила обращения с медицинскими отходами».

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол операционный ОК-10-__ зав. № _____ упакован в

Частном предприятии «МЕДПРОМИНВЕСТ»

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»



И.В.Королева

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол операционный ОК-10-__ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»



И.В.Королева

Частное предприятие «МЕДПРОМИНВЕСТ»
Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 22-3
Тел.: (+375 17) 251-11-15
тел./факс: (+375 17) 291-08-28
факс: (+375 17) 251-55-33

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт в течение гарантийного срока

Стол операционный ОК-10-__

Зав. № _____

Дата выпуска «__» _____ 201__ г.

Потребитель _____

Юридический адрес _____

Принят на гарантийное обслуживание предприятием _____

Исполнитель _____

должность, Ф.И.О., подпись

Выполнены работы _____

Стол принял к эксплуатации:

«__» _____ 201__ г.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П. _____

должность, Ф.И.О., подпись руководителя учреждения-владельца

М.П. _____

должность, Ф.И.О., подпись руководителя ремонтного предприятия

- Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода стола в эксплуатацию.
- Гарантийный ремонт осуществляется изготовителем, или ремонтными предприятиями, обслуживающими учреждения здравоохранения в данной области, крае, государстве, имеющими договор с изготовителем на гарантийное обслуживание его изделий.
- Гарантийный ремонт производится за счет изготовителя. Если стол в период гарантийного срока вышел из строя в результате небрежного обращения или несоблюдения правил эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»



И.В.Королева

**Приложение к руководству по эксплуатации
медицинского изделия**

I. Стол операционный ОК-10, варианты исполнения: ОК-10-1, ОК-10-2, ОК-10-3, ОК-10-3Г, ОК-10-4Г, ОК-10-1П, ОК-10-2П, ОК-10-3П.

II. Принадлежности:

1. Дуга наркозная – 1 шт.
2. Рукодержатель – 2 шт.
3. Столик для инъекций – 2 шт.
4. Ремень для фиксации туловища – 1 шт.
5. Штатив – 1 шт.
6. Держатель флакона – 2 шт.
7. Ногодержатель – 2 шт.
8. Упор боковой – 2 шт.
9. Кассетодержатель – 1 шт.
10. Зажим поворотный – 3 шт.
11. Зажим – 2 шт.
12. Ручка для пациента – 2 шт.
13. Лоток – 1 шт.

Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»



И.В.Королева



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 лист(ов)

Генеральный директор
ООО "МедТехКонсалт"

[Signature] И.В. Королева

