

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Бутылки из медицинского стекла марки МТО для лекарственных средств, трансфузионных и инфузионных препаратов одноразового использования П-50-2-МТО, П-50Б1-2-МТО, П-100-2-МТО, П-100Б-2-МТО, П-100Е-2-МТО, П-100Б1-2-МТО, П-250-2-МТО, П-250Е-2-МТО, П-250Б-2-МТО, П-250Б1-2-МТО, П-450-2-МТО, П-450Б-2-МТО, П-500Е-2-МТО, П-500Б1-2-МТО».
производства ПАО «БИО МЕД СТЕКЛО», Украина.

1 Требования к эксплуатации бутылок должны соответствовать ГОСТ 30288-95.

2 Бутылки после транспортирования при отрицательных температурах выдерживают в течение 4 часов при нормальных климатических условиях в соответствии с ГОСТ 15150-69.

3 При эксплуатации бутылок не допускаются перепады температур более, чем 50 °С.

4 Бутылки отмывают от налета солей.

Отобранные бутылки промывают один раз дистиллированной водой с температурой (60-70) °С, дальнейшую промывку проводят дистиллированной водой с температурой (20±5) °С. Промывку считают законченной, если величина рН дистиллированной воды после промывки остается равной рН исходной воды.

Применение ершей и абразивных веществ и составов для мойки внутренней поверхности бутылок группы 2 (с обработанной и модифицированной поверхностью) не допускается.

5. Бутылки после промывки высушивают и стерилизуют.

6 Бутылки одноразового использования.

7. После употребления бутылки должны быть утилизированы в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие бутылок требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Председатель правления
ПАО «БИО МЕД СТЕКЛО», Украина



Жарков Л.А.

64
/Круглая печать: «Украина * г. Житомир * Публичное акционерное общество
«БИО МЕД СТЕКЛО» * и.к. 04763746 № 1»/