

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДЕНТА РЕЙ»




Ю. Прокофьев
20 09 г.

Инструкция по применению
Пленка рентгеновская интраоральная для стоматологии DENTIX

1. Каждая плёнка покрыта тонким свинцовым листом. Плёнку следует размещать гладкой стороной упаковки к источнику излучения.
2. Безопасное освещение.
Оливково-зелёной или тёмно-красный свет. (Фильтры: Kodak GBX-2, Agfa R1 или G7).
3. Для достижения наилучших результатов используйте в автоматических проявочных машинах Velorex совместно с химическими реактивами Velorex: время проявления 4 мин. «от сухого до сухого».
4. Подходит для любых проявочных машин и ручной проявки.
5. При использовании совместно с продуктами других марок следуйте инструкции производителя.

Генеральный директор
ООО «ДЕНТА РЕЙ»

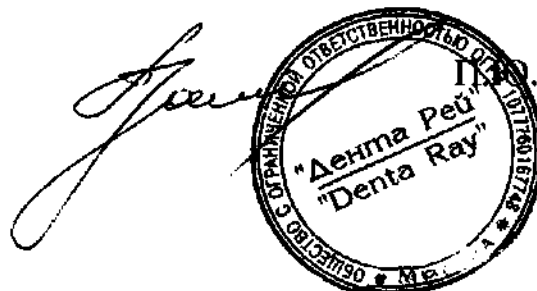

П.А. Прокофьев