

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Медимекс»



Шестак В.Л.  
«13» июня 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
«Комплект съёмных приспособлений и принадлежностей КПП-31»

# КОМПЛЕКТ СЪЁМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КПП-31 ПОДСТАВКИ-СТУПЕНИ К ОПЕРАЦИОННОМУ СТОЛУ

Этикетка

СФИД 731.00.000 ЭТ

Комплект съёмных приспособлений и принадлежностей КПП-31 подставки-ступени к операционному столу (в дальнейшем - подставки) предназначены для использования в операционных отделениях медицинских учреждений и являются дополнением к столу операционному.

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Масса комплекта, кг, не более 18.

1.2 Габаритные размеры (в сложенном виде), мм, не более:

- длина 600;

- ширина 350;

- высота 300.

1.3 Количество подставок в комплекте, шт 3.

1.4 Высота каждой из подставок комплекта, мм:

1.4.1 наибольшей 300;

1.4.2 средней 220;

1.4.3 наименьшей 130.

1.5 Комплект подставок изготовлен из коррозионно-стойких материалов, устойчивых к дезинфекции.

1.6 Допустимая нагрузка на каждую из подставок, кг, не более 100.

1.7 Средний срок службы подставок до списания составляет 7 лет.

1.8 Подставки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 20790-93 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.9 Подставки при эксплуатации обладают вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ 20790-93.

1.10 Подставки цветных металлов и сплавов НЕ СОДЕРЖАТ.

## 2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КОМПЛЕКТ СЪЁМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КПП-31 ПОДСТАВКИ СТУПЕНИ К ОПЕРАЦИОННОМУ СТОЛУ зав.№ \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

контролер ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

## 3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Подставки транспортируют в крытых транспортных средствах.

3.2 Транспортирование подставок осуществляют по группе условий хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

3.3 Хранение подставок осуществляется по группе условий хранения 2(С).  
ГОСТ 15150-69

## 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта подставок требованиям технической документации, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода подставок в эксплуатацию.

Исчисление гарантийного срока начинают по истечении не более 6 месяцев со дня получения подставок потребителем.

4.3 Адрес изготовителя

**ИП "Мединдустрия Сервис"**

**Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова 11 - 622**  
**Тел./Факс: (017) 284-71-86, 285-31-31, тел. (017) 210-15-72**

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Медимекс»



Шестак В.Л.  
«13» июня 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
«Комплект съёмных приспособлений и принадлежностей КПП-32»

4.1 Чистку и дезинфекцию стенда производите 1% раствором хлорамина или другой жидкостью аналогичного назначения, влажной салфеткой.

4.2. После чистки внутренние и наружные поверхности стенда необходимо вытереть насухо.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование стенда должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

5.2 Условия транспортирования по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие стенда требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

6.3 Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев с даты изготовления.

6.4 Адрес изготовителя:

**ИП «Мединдустрия Сервис»**

**Республика Беларусь г. Минск, пр. Машерова 11,**

**Тел./факс: (017) 284-71-86, 285-71-86, тел.(017) 210-15-72**

## 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КОМПЛЕКТ СЪЁМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КПП-32 ПЕРЕДВИЖНОЙ СТЕНД ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЪЁМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ зав. № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

# КОМПЛЕКТ СЪЁМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КПП-32 ПЕРЕДВИЖНОЙ СТЕНД ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЪЁМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 210.000

## ЭТИКЕТКА

Комплект съёмных приспособлений и принадлежностей КПП-32 передвижной стенд для размещения съёмных приспособлений и принадлежностей (в дальнейшем – стенд) предназначен для размещения стандартных и специальных приспособлений к хирургическим столам «Медин».

Стенд изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Основой стенда является каркас из профильных нержавеющей труб с поддоном установленный, на колесные опоры, две из которых с тормозами. На каркасе размещены планки стандартного сечения 10x25 мм, монтажные гнезда: 26x26 мм, 37x37мм, 14x33мм.

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Габаритные размеры, мм:

|               |      |
|---------------|------|
| - длина.....  | 850  |
| - ширина..... | 610  |
| - высота..... | 1500 |

1.2 Масса, кг, не более ..... 20

1.3 Стенд НЕ СОДЕРЖИТ цветных металлов или их сплавов.

1.4 Средний срок службы стенда до списания не менее 5 лет.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки стенда:

|                 |      |
|-----------------|------|
| - стенд.....    | 1 шт |
| - поддон.....   | 1 шт |
| - этикетка..... | 1 шт |