



Рисунок 1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Тележка для умывания больных ТБПУ | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 экз. |

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Не допускается перевозить больного на тележке с панелью, находящейся в крайнем нижнем положении из-за малого дорожного просвета между полом и вертикальной подвижной направляющей.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1 Полученную тележку распакуйте, ознакомьтесь с ее устройством по паспорту.
- 5.2 Протрите наружные поверхности тележки чистой ветошью.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Подъем и опускание панели тележки.

Нажмите ногой на педаль до упора. Панель при этом поднимется приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль, отпуская каждый раз, столько раз, сколько необходимо для поднятия панели на требуемую высоту.

Для опускания панели тележки, поднимите ногой педаль вверх до упора. Панель при этом опускается. Педаль необходимо удерживать в поднятом положении до тех пор, пока панель тележки не опустится на требуемую высоту.