

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «АЛЬФАМЕД»
Шестак В.Л.
01 февраля 2012 г.



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ БОЛЬНЫХ ТБПУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	4
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	4
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
8. КОНСЕРВАЦИЯ	5
9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ	5
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	5

Тележка для умывания больных ТБПУ предназначена для принятия душа тяжело-больных и перевозки их внутри лечебных учреждений в палаты и перекладывания больных на кровати.

Тележка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150 в соответствии с требованиями ТУ РБ 800003039.005-2000.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Грузоподъемность тележки	120 кг
1.2. Высота по дну ванны:	
в крайнем нижнем положении	470 мм
в крайнем верхнем положении	800 мм
Высота по ограждениям:	
в крайнем нижнем положении	650 мм
в крайнем верхнем положении	980 мм
1.3. Длина панели тележки	2130 мм
1.4. Ширина панели тележки	790 мм
1.5. Привод подъема панели тележки	ножной гидравлический
1.6. Подъем панели тележки за один ход педали	8 мм
1.7. Диаметр колес	200 мм
1.8. Угол подъема панели	2 град
1.9. Масса тележки	97 кг

Примечание: Тележки медицинские ТБПУ цветных, драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖАТ,

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1 Тележка состоит из шасси и панели (см. рисунок 1).

2.2 Шасси состоит из рамы, в центре которой установлена вертикальная направляющая, снаружи которой расположен гидродомкрат.

Колеса шасси установлены на поворотных кронштейнах и имеют подшипники качения на горизонтальной оси.

На передних и заднем колесах имеется педаль тормоза.

2.3 Подъем панели тележки на требуемую высоту производится гидродомкратом, приводимым в действие многократным нажатием ногой на педаль.

2.4 Опускание панели тележки производится поднятием ногой педали вверх до упора.



Рисунок 1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Тележка для умывания больных ТБПУ | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 экз. |

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Не допускается перевозить больного на тележке с панелью, находящейся в крайнем нижнем положении из-за малого дорожного просвета между полом и вертикальной подвижной направляющей.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1 Полученную тележку распакуйте, ознакомьтесь с ее устройством по паспорту.
- 5.2 Протрите наружные поверхности тележки чистой ветошью.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Подъем и опускание панели тележки.

Нажмите ногой на педаль до упора. Панель при этом поднимется приблизительно на 10 мм. Нажмите на педаль, отпуская каждый раз, столько раз, сколько необходимо для поднятия панели на требуемую высоту.

Для опускания панели тележки, поднимите ногой педаль вверх до упора. Панель при этом опускается. Педаль необходимо удерживать в поднятом положении до тех пор, пока панель тележки не опустится на требуемую высоту.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Не реже одного раза в месяц производите осмотр тележки и при необходимости производите подтяжку крепежа.

7.2. Чистку и дезинфицирование тележки производите 1 % раствором хлорамина или другой жидкости влажной тряпкой. После чистки тележку необходимо вытереть насухо.

8. КОНСЕРВАЦИЯ

8.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 группы II и условий хранения "С" со сроком консервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ГОСТ 12328 или К-17 ГОСТ 10877).

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

9.1 Законсервированную тележку в виде двух собранных узлов упаковывают в полиэтиленовую пленку и заворачивают в гофрированный картон.

9.2 Схема сборки двух узлов приведена на рисунке 2.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта. Тележку транспортируют в виде двух собранных узлов в крытых транспортных средствах.

10.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от 5° С до + 40° С.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

11.1 Гарантийный срок 18 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

11.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

11.3. Гарантийный ремонт изделия осуществляется ИП «Мединдустрия Сервис» за счет предприятия-изготовителя.

11.4. Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.

11.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность тележки и не гарантирует ее работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- в) небрежности при хранении и транспортировке.

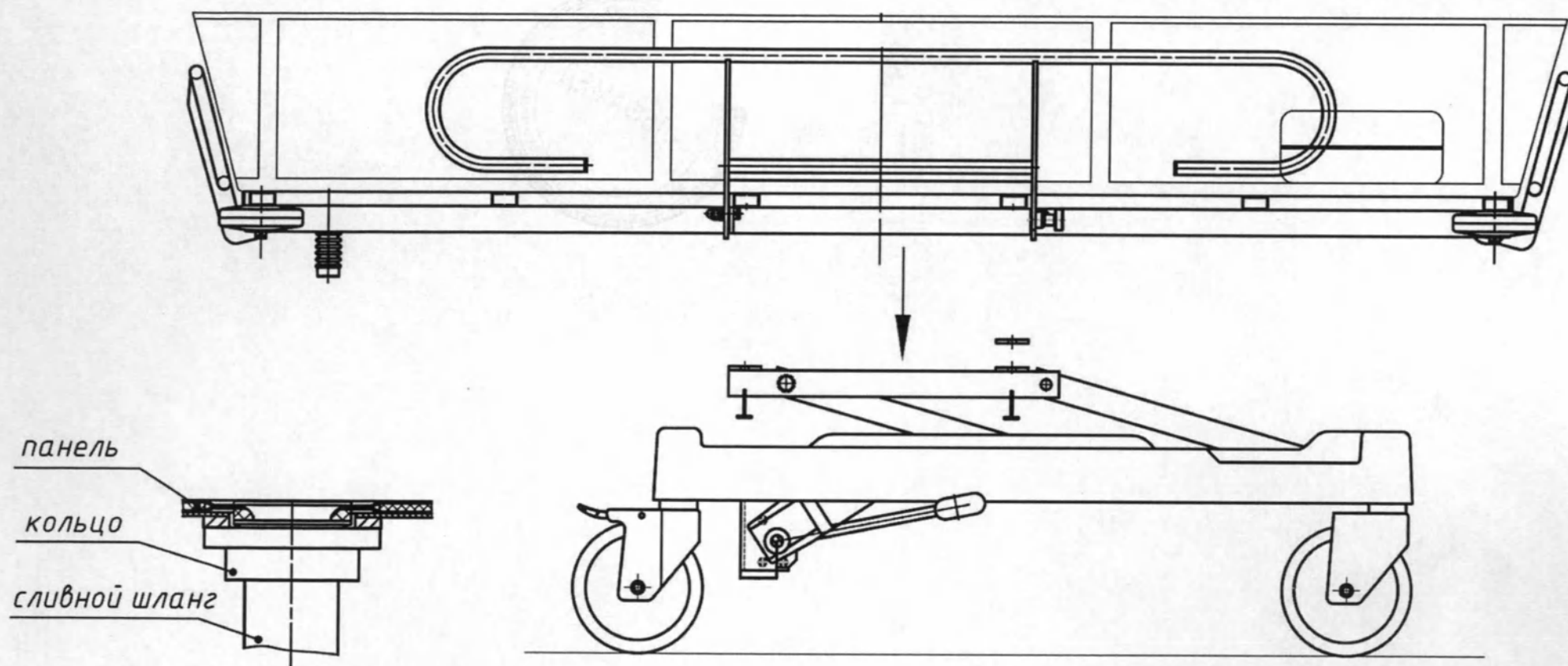


Рисунок 2- Схема сборки тележки ТБПУ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
6 ЛИСТА (ОВ)

