



**ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-2
(для интенсивной терапии)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской функциональной ТМ-2 (для интенсивной терапии) (далее: тележка) по назначению все пользователи должны внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации (РЭ) до начала использования изделия. Руководство по эксплуатации написано для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Руководству по эксплуатации.
- Руководство по эксплуатации следует хранить в непосредственной близости от изделия



Контактная Информация

Производитель:

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие

“Мединдустрия Сервис”

223043, Минский район, Папернянский с/с, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», кабинет №35

Республика Беларусь

Тел/факс.: +375 17 504-80-15, 504-80-25

1. Меры безопасности.

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.
	Передвигать тележку с помощью раздатчика с опрокидывающимися емкостями строго запрещается.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры

	Предупреждение
 ВНИМАНИЕ!  Запрещается использование дезинфицирующих средств, содержащих хлор и активный кислород	Запрещается использовать средства содержащие хлор и активный кислород
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка.

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Иностранное унитарное
 предприятие
 "Мединдустрия Сервис"

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-


 20

 г.

 SN

Сделано в Республике Беларусь

4. Использование изделия по назначению.

Тележка предназначена для хранения и перевозки инструментов, медикаментов, других расходных материалов в пределах отдельных кабинетов или отделений лечебных учреждений.

Тележка не предназначена для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание.

Тележка соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию тележки растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство.

Внешний вид тележки представлен на рисунке 1.

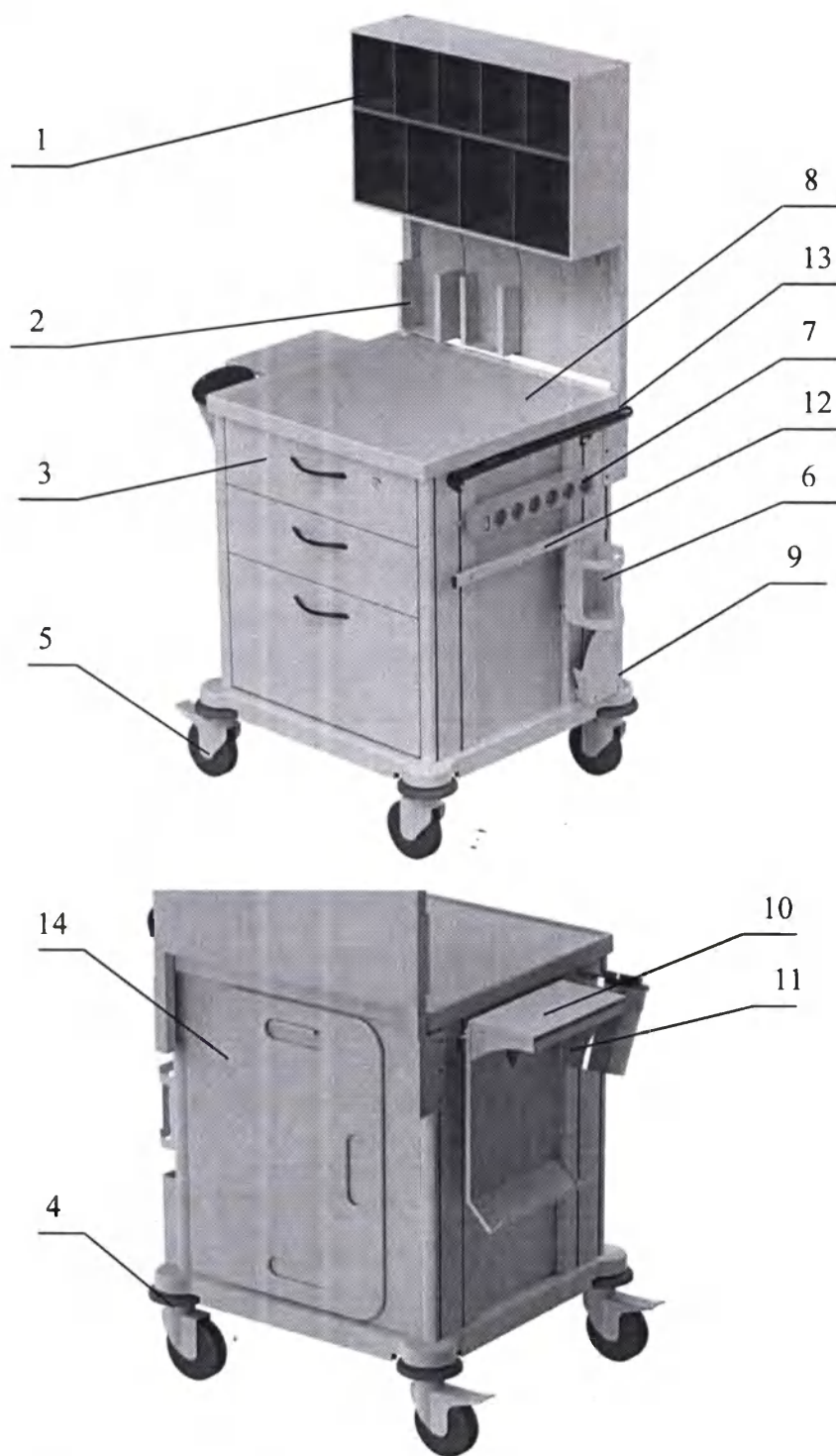


Рисунок 1 – Тележка медицинская функциональная ТМ-2
(для интенсивной терапии)

1 – раздатчик на консоли; 2 – держатель диспенсеров для перчаток и салфеток; 3 – ящик с замком, 4 – колесо без тормоза -125мм; 5 – колесо с тормозом -125мм; 6 – держатель бутылки для воды; 7 – фильтр сетевой; 8 – рабочая поверхность; 9 – карман для шнура сетевого; 10 –держатель полиэтиленового мешка 20 литров; 11 – контейнер для сбора использованного острого инструментария 1,5 литра; 12– рейка; 13 – ручка; 14 - консоль реанимационная

Тележка состоит из тумбочки и раздатчика с откидывающимися емкостями (9 шт.).

Тумбочка имеет 3 ящика с доводчиками, верхний ящик оборудован разделителем и замком.

Раздатчик с откидывающимися емкостями крепится к тумбочке при помощи рамы на которой размещены держатели для одноразовых перчаток поз.2. салфеток поз.3 и таблетница поз.10.

На боковые поверхности тележки крепятся рейки поз.14, и ручка для передвижения тележки поз.15. Рейки предназначены для размещения съёмных приспособлений, их сечение 25×10 мм. Рабочая поверхность тумбочки поз.9 имеет отбортовку с 4-х сторон высотой 6..7 мм.

Тележка установлена на 4-х колесах 2 из которых с тормозом поз.6.

7. Комплект поставки.

Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Основной состав	Количество
1. Тележка;	1
2. Раздатчик на консоли;	1
3. Ключ к замку;	2
4. Держатель для полиэтиленового мешка 20 литров;	1
5. Держатель бутылки и стаканов для воды;	1
6. Фильтр сетевой;	1
7. Держатель диспенсеров для перчаток и салфеток;	2
8. Карман для шнура сетевого;	1
9. Консоль реанимационная 390x590x8 мм;	1
10. Контейнер для сбора использованного острого инструментария 1,5 литра;	1
11. Руководство по эксплуатации.	1
Принадлежности	
1. Раздатчик на консоли;	1
2. Держатель для полиэтиленового мешка 20 литров;	1
3. Держатель бутылки и стаканов для воды;	1
4. Контейнер для сбора использованного острого инструментария 1,5 литра;	1
5. Держатель диспенсеров для перчаток и салфеток.	1

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Тележка должна храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Тележку следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики.

Габаритные размеры тележки:

– длина, мм	790
– ширина, мм	660
– высота, мм	1540
– высота столешницы, мм	855

Допустимые нагрузки на:

- столешницу, кг	10
– один ящик, кг	10
– одну рейку, кг	5
– на тележку, кг	50

Масса тележки, кг, не более 75

Максимальный ток нагрузки на сетевые фильтры, не более А 16

Допустимое отклонение габаритных размеров – $\pm 2\%$

- Усилие, необходимое для перемещения тележек по ровному полу с плиточным покрытием, при нагрузке 50 кг, - 120 Н.

- Усилие выдвигания ящика с нагрузкой $(5\pm 0,2)$ кг - не более 50 Н.

- Усилие, необходимое для рукояток зажимов съемных элементов и дополнительных принадлежностей тележек, не более 50 Н.
- Тормоза колес включаются при приложении на педаль усилия не более 150 Н.
- Тележки устойчиво стоят на ровной поверхности. При этом зазор между одним из колес и поверхностью пола не должен превышать 3 мм.

Тележка драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

Материалы, используемые для изготовления изделия, имеющие контакт с организмом человека:

- Тележка – Сталь конструкционная марки Ст20, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Ручка мебельная – Алюминиевый сплав АД31, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Стойка инфузионная, держатель монитора, держатель эндоскопа, рейка для размещения съёмных приспособлений – Сталь коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т, производства: ПАО «Северсталь», Россия.

10. Уход и обслуживание.
 10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается!
	Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющей сталей.
	Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы.

Дезинфекцию тележки следует производить протираанием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время экспозиции.

После обработки тележки дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Руководства по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет не менее 5 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание).

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего руководства.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание).

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

11. Сведения об утилизации.

	Тележка медицинская функциональная не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию копаненнтов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса стола. Большинство металлических деталей тележки сделано из черной и нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании.

Тележку и съемные приспособления упаковывают в дощатые ящики типа III по ГОСТ 2991, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой.

13. Гарантии Изготовителя

1. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» (далее-Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в руководстве по эксплуатации. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.

2. Срок гарантии (далее - «Гарантийный срок») - 24 месяца. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия.
 3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а так же оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
 4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.
 5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.
 6. Ответственность иностранного унитарного предприятия «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
 7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
 8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причинённый природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
 - Ущерб, причинённый нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате столкновения с другими предметами, падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причинённый в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.

10. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

14. Свидетельство об упаковывании.

Тележка медицинская функциональная ТМ-2(для интенсивной терапии) зав. № _____
упакована в **Иностранном унитарном предприятии «Мединдустрия Сервис»** согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская функциональная ТМ-2(для интенсивной терапии) зав. № _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
Тележка медицинская функциональная ТМ-2(для интенсивной терапии) драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ

Контролер ОТК

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

Заказчик
(при наличии)

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

Гарантийный талон

Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35 Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____
Тележка медицинская функциональная ТМ-2(для интенсивной терапии)
(наименование, тип и марка изделия)

_____ (год, месяц, число выпуска)

Гарантируется исправность изделия в течение _____ 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК _____
(подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность) _____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность) _____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность) _____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность) _____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

Предприятие-изготовитель Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию

*Дата выхода из строя

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

* _____

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

* _____

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: med@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E.mail, тел., факс _____

Изделие, катал.номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
18 (восьмнадцать) листов

Директор
Иностранного унитарного предприятия
«Мединдустрия Сервис» Шевченко К.В.
Должность Подпись Ф.И.О.





**ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-9
(для гинекологического кабинета, приборная)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской функциональной ТМ-9 (для гинекологического кабинета, приборная) (далее: тележка) по назначению все пользователи должны внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации (РЭ) до начала использования изделия. Руководство по эксплуатации написано для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Руководству по эксплуатации.
- Руководство по эксплуатации следует хранить в непосредственной близости от изделия



Контактная Информация

Производитель:

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие
“Мединдустрия Сервис”

223043, Минский район, Папернянский с/с, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», кабинет №35

Республика Беларусь

Тел/факс.: +375 17 504-80-15, 504-80-25

1. Меры безопасности.

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.
	Передвигать тележку с помощью раздатчика с опрокидывающимися емкостями строго запрещается.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение

 ВНИМАНИЕ!  Запрещается использование дезинфицирующих средств, содержащих хлор и активный кислород	Запрещается использовать средства содержащие хлор и активный кислород
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка.

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Иностранное унитарное
 предприятие
 "Мединдустрия Сервис"

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-


 20 г.

SN

Сделано в Республике Беларусь

4. Использование изделия по назначению.

Тележка предназначена для хранения и перевозки инструментов, медикаментов, других расходных материалов в пределах отдельных кабинетов или отделений лечебных учреждений.

Тележка не предназначена для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание.

Тележка соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию тележки растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство.

Внешний вид тележки представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Тележка медицинская функциональная ТМ-9
(для гинекологического кабинета, приборная)

1 – карман для шнура сетевого; 2 – консоль держателя кольпоскопа; 3 – фильтр сетевой; 4 – полка; 5 – полка малая; 6 – пластина со штекерами (зажимами) защитного заземления; 7 – колесо с тормозом - 125мм; 8 – колесо без тормоза - 125мм; 9 – ручка.

Тумбочка имеет 2 ящика с доводчиками и 2 полки. На боковые поверхности тележки крепится ручка для передвижения тележки поз.9. В комплект тележки ТМ-9 входят карман для шнура сетевого поз.1, консоль держателя кольпоскопа поз.2, фильтр сетевой поз.3. Рабочая поверхность полок тумбочки имеет отбортовку с 4-х сторон высотой 6..7 мм. На основании снизу установлена эквипотенциальная пластина со штекерами (зажимами) поз.6 защитного заземления. Тележка установлена на 4-х колесах 2 из которых с тормозом поз.9.

7. Комплект поставки.

Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Основной состав	Количество
1. Тележка;	1
2. Фильтр сетевой;	1
3. Карман для шнура сетевого;	1
4. Консоль держателя кольпоскопа;	1
5. Руководство по эксплуатации.	1

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Тележка должна храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Тележку следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики.

Габаритные размеры тележки:

– длина, мм	690
– ширина, мм	705
– высота, мм	1330

Допустимые нагрузки на:

- столешницу, кг	10
– один ящик, кг	10

/

– одну рейку, кг	5
– на тележку, кг	50
Масса тележки, кг, не более	85
Максимальный ток нагрузки на сетевые фильтры, не более А	16
<i>Допустимое отклонение габаритных размеров – ±2%</i>	

- Усилие, необходимое для перемещения тележек по ровному полу с плиточным покрытием, при нагрузке 50 кг, - 120 Н.
- Усилие выдвигания ящика с нагрузкой (5±0,2) кг - не более 50 Н.
- Усилие, необходимое для рукояток зажимов съемных элементов и дополнительных принадлежностей тележек, не более 50 Н.
- Тормоза колес включаются при приложении на педаль усилия не более 150 Н.
- Тележки устойчиво стоят на ровной поверхности. При этом зазор между одним из колес и поверхностью пола не должен превышать 3 мм.

Тележка драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

Материалы, используемые для изготовления изделия, имеющие контакт с организмом человека:

- Тележка – Сталь конструкционная марки Ст20, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Ручка мебельная – Алюминиевый сплав АД31, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Стойка инфузионная, держатель монитора, держатель эндоскопа, рейка для размещения съёмных приспособлений – Сталь коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т, производства: ПАО «Северсталь», Россия.

10. Уход и обслуживание.

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается!
	Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющей сталей.
	Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы.

Дезинфекцию тележки следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время экспозиции.

После обработки тележки дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Руководства по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет не менее 5 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание).

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего руководства.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание).

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

11. Сведения об утилизации.

	Тележка медицинская функциональная не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию копаненнтов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса стола. Большинство металлических деталей тележки сделано из черной и нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании.

Тележку и съемные приспособления упаковывают в дощатые ящики типа III по ГОСТ 2991, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой.

13. Гарантии Изготовителя.

1. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» (далее-Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в руководстве по эксплуатации. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.
2. Срок гарантии (далее - «Гарантийный срок») - 24 месяца. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия.
3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а так же оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.
5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.
6. Ответственность иностранного унитарного предприятия «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причинённый природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.

- Ущерб, причинённый нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
- Ущерб, причинённый в результате столкновения с другими предметами, падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
- Ущерб, причинённый в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
- Ущерб, причинённый в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.

Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия

- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
- Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
- Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).

9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.

10. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

14. Свидетельство об упаковывании.

Тележка медицинская функциональная ТМ-9 (для гинекологического кабинета, приборная)
зав. № _____

упакована в **Иностранном унитарном предприятии «Мединдустрия Сервис»** согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская функциональная ТМ-9 (для гинекологического кабинета, приборная)

зав. № _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Тележка медицинская функциональная ТМ-9 9 (для гинекологического кабинета, приборная) драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ

Контролер ОТК *

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Гарантийный талон

Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», каб. №35 Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

Тележка медицинская функциональная ТМ-9

(для гинекологического кабинета, приборная)

(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

Предприятие-изготовитель Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия
Сервис»

*Дата выпуска _____, дата
приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию

*Дата выхода из строя

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: med@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E.mail, тел., факс _____

Изделие, катал.номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись

Продлено, пропущено, не секретно по патентам
17 (срок действия) ЛИСОВ

Директор
Иностранного унитарного предприятия
«Мединдустрия Сервис» _____ Шевченко К.В.
Должность Подпись ФИО





**ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-10
(для скорой помощи)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской функциональной ТМ-10 (для скорой помощи) (далее: тележка) по назначению все пользователи должны внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации (РЭ) до начала использования изделия. Руководство по эксплуатации написано для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Руководству по эксплуатации.
- Руководство по эксплуатации следует хранить в непосредственной близости от изделия



Контактная Информация

Производитель:

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие

“Мединдустрия Сервис”

223043, Минский район, Папернянский с/с, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», кабинет №35

Республика Беларусь

Тел/факс.: +375 17 504-80-15, 504-80-25

1. Меры безопасности.

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.
	Передвигать тележку с помощью раздатчика с опрокидывающимися емкостями строго запрещается.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение

 ВНИМАНИЕ!  Запрещается использование дезинфицирующих средств, содержащих хлор и активный кислород	Запрещается использовать средства содержащие хлор и активный кислород
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка.

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Иностранное унитарное
 предприятие
 "Мединдустрия Сервис"

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-


 20 г. SN

Сделано в Республике Беларусь

4. Использование изделия по назначению.

Тележка предназначена для хранения и перевозки инструментов, медикаментов, других расходных материалов в пределах отдельных кабинетов или отделений лечебных учреждений.

Тележка ТМ-10 имеет внизу открытое отделение.

Тележка не предназначена для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание.

Тележка соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию тележки растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство.

Внешний вид тележки представлен на рисунке 1.

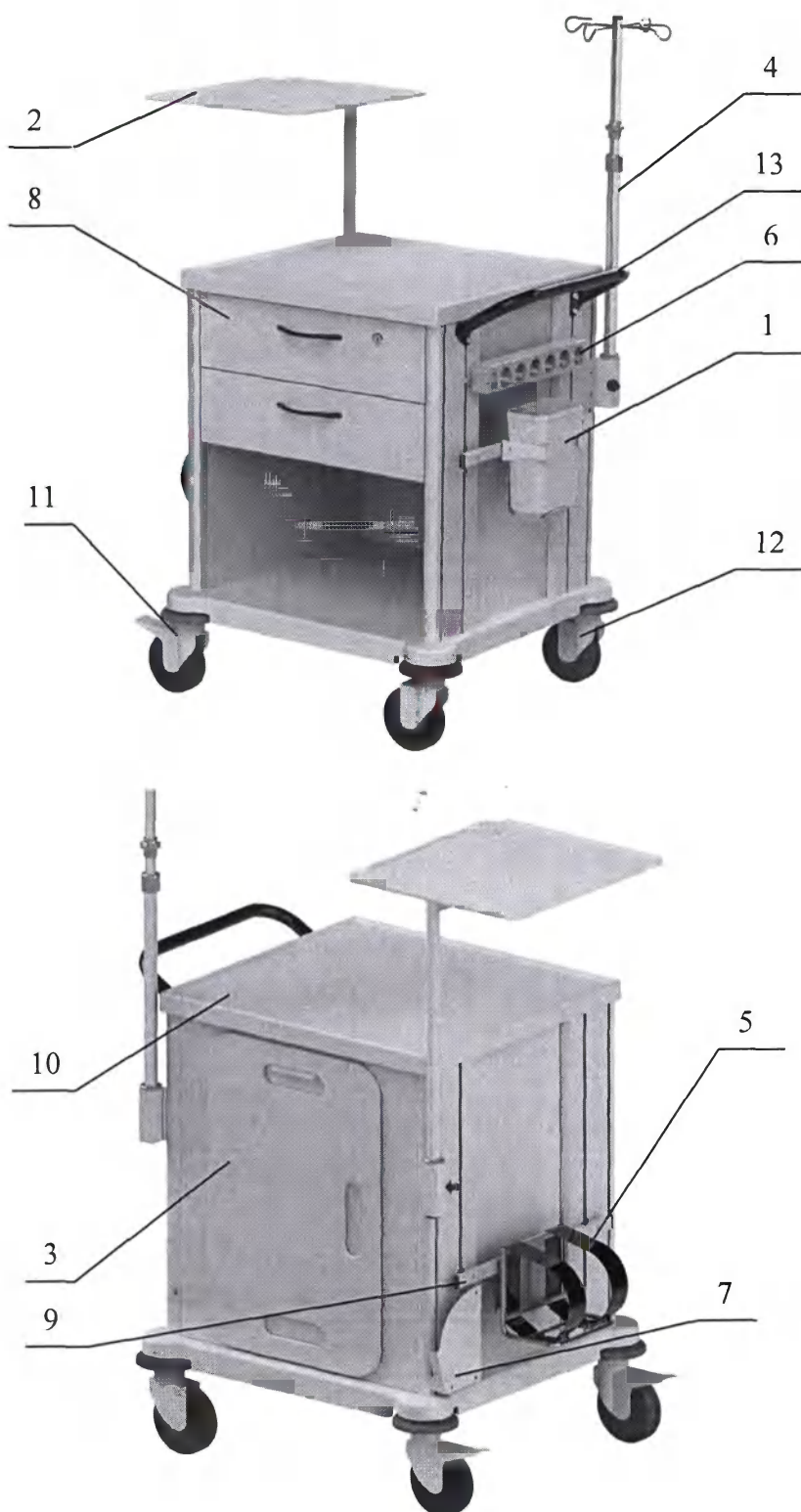


Рисунок 1 – Тележка медицинская функциональная ТМ-10 10 (для скорой помощи)
1 – контейнер для отходов 2 литра; 2 – столик приборный поворотный; 3 – консоль реанимационная; 4 – стойка инфузионная; 5 – держатель кислородного баллона; 6 - фильтр сетевой; 7 – карман для шнура сетевого; 8 – ящик с замком; 9 – рейка; 10 – рабочая поверхность; 11 – колесо с тормозом -125мм; 12 – колесо без тормоза - 125мм; 13 – ручка.

Тележка состоит из тумбочки и навесных приспособлений.

Тумбочка имеет 2 ящика с доводчиками, верхний ящик оборудован замком. На боковые поверхности тележки крепятся рейки поз.6 и ручка для передвижения тележки поз.11. Рейки поз.6 предназначены для размещения съёмных приспособлений, их сечение 25×10 мм. В комплект тележки ТМ-10 входят ёмкость для катетеров поз.1, контейнер для сбора использованного острого инструментария 1,5 литра поз.2, контейнер для отходов 3 литра поз.3, лист-вкладка нержавеющая поз.4, столик откидной поз.8. Рабочая поверхность тумбочки поз.7 имеет отбортовку с 4-х сторон высотой 6..7 мм. Тележка установлена на 4-х колесах 2 из которых с тормозом поз.9.

7. Комплект поставки.

Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Основной состав	Количество
1. Тележка медицинская функциональная ТМ-10 (для скорой помощи);	1
2. Ключ к замку;	2
3. Контейнер для отходов 2 литра;	1
4. Столик приборный 400х450 мм поворотный;	1
5. Консоль реанимационная 390х590х8 мм;	1
6. Стойка инфузионная;	1
7. Держатель кислородного баллона;	1
8. Фильтр сетевой;	1
9. Карман для шнура сетевого;	1
10. Руководство по эксплуатации.	1
Принадлежности	
1. Столик приборный 400х450 мм поворотный;	1
2. Стойка инфузионная.	1

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Тележка должна храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Тележку следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики.

Габаритные размеры тележки:

– длина, мм	790
– ширина, мм	660
– высота, мм	850
– высота над уровнем пола держателя инфузионных растворов стойки инфузионной, мм	970
– возможность увеличения высоты, мм	210

Допустимое отклонение габаритных размеров – $\pm 2\%$

Допустимые нагрузки на:

- столешницу, кг	10
– один ящик, кг	10
– одну рейку, кг	5
– на тележку, кг	50
Масса тележки, кг, не более	64
Максимальный ток нагрузки на сетевые фильтры, не более А	16

- Усилие, необходимое для перемещения тележек по ровному полу с плиточным покрытием, при нагрузке 50 кг, - 120 Н.

- Усилие выдвигания ящика с нагрузкой (5±0,2) кг - не более 50 Н.
- Усилие, необходимое для рукояток зажимов съемных элементов и дополнительных принадлежностей тележек, не более 50 Н.
- Тормоза колес включаются при приложении на педаль усилия не более 150 Н.
- Тележки устойчиво стоят на ровной поверхности. При этом зазор между одним из колес и поверхностью пола не должен превышать 3 мм.

Тележка драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

Материалы, используемые для изготовления изделия, имеющие контакт с организмом человека:

- Тележка – Сталь конструкционная марки Ст20, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Ручка мебельная – Алюминиевый сплав АД31, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Стойка инфузионная, держатель монитора, держатель эндоскопа, рейка для размещения съёмных приспособлений – Сталь коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т, производства: ПАО «Северсталь», Россия.

10. Уход и обслуживание.

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается!
	Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющей сталей.
	Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы.

Дезинфекцию тележки следует производить протираанием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время экспозиции.

После обработки тележки дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Руководства по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет не менее 5 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание).

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего руководства.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание).

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

11. Сведения об утилизации.

	Тележка медицинская функциональная не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию копаненнтов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса стола. Большинство металлических деталей тележки сделано из черной и нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании.

Тележку и съемные приспособления упаковывают в дощатые ящики типа III по ГОСТ 2991, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой.

13. Гарантии Изготовителя.

1. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» (далее-Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в руководстве по эксплуатации. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.

2. Срок гарантии (далее - «Гарантийный срок») - 24 месяца. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия.
 3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а так же оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
 4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.
 5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.
 6. Ответственность иностранного унитарного предприятия «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
 7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
 8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причинённый природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
 - Ущерб, причинённый нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате столкновения с другими предметами, падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причинённый в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.

10. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

14. Свидетельство об упаковывании.

Тележка медицинская функциональная ТМ-10 (для скорой помощи)

зав. № _____

упакована в Иностранном унитарном предприятии «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		

15. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская функциональная ТМ-10 (для скорой помощи)

зав. № _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. Тележка медицинская функциональная ТМ-10 (для скорой помощи) драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ

Контролер ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Гарантийный талон

Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», каб. №35 Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

Тележка медицинская функциональная ТМ-10 (для скорой помощи)

(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Гарантируется исправность изделия в течение _____ 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____
(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

Предприятие-изготовитель Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата
приобретения _____
Дата ввода в эксплуатацию

*Дата выхода из строя

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: med@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E.mail, тел., факс _____

Изделие, катал.номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

17 (скачать) листов

Директор

Иностранного унитарного предприятия

«Мединдустрия Сервис»

Должность

Подпись

Павленко К.В.

ФИО





**ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-11
(эндоскопическая)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Тележки медицинской функциональной ТМ-11 (эндоскопическая) (далее: тележка) по назначению все пользователи должны внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации (РЭ) до начала использования изделия. Руководство по эксплуатации написано для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, ответственного за использование тележки во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Руководству по эксплуатации.
- Руководство по эксплуатации следует хранить в непосредственной близости от изделия



Контактная Информация

Производитель:

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие
“Мединдустрия Сервис”

223043, Минский район, Папернянский с/с, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», кабинет №35

Республика Беларусь

Тел/факс.: +375 17 504-80-12, 504-80-25

1. Меры безопасности.

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство тележки, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.
	Передвигать тележку с помощью раздатчика с опрокидывающимися емкостями строго запрещается.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения тележки следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать тележку по электрическим кабелям.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение

 ВНИМАНИЕ!  Запрещается использование дезинфицирующих средств, содержащих хлор и активный кислород	Запрещается использовать средства содержащие хлор и активный кислород
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка.

На тележке предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Иностранное унитарное предприятие
 "Мединдустрия Сервис"

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТМ-


 20

 г.
 SN

Сделано в Республике Беларусь

4. Использование изделия по назначению.

Тележка предназначена для хранения и перевозки инструментов, медикаментов, других расходных материалов в пределах отдельных кабинетов или отделений лечебных учреждений.

Тележка не предназначена для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание.

Тележка соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию тележки растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство.

Внешний вид тележки представлен на рисунке 1.

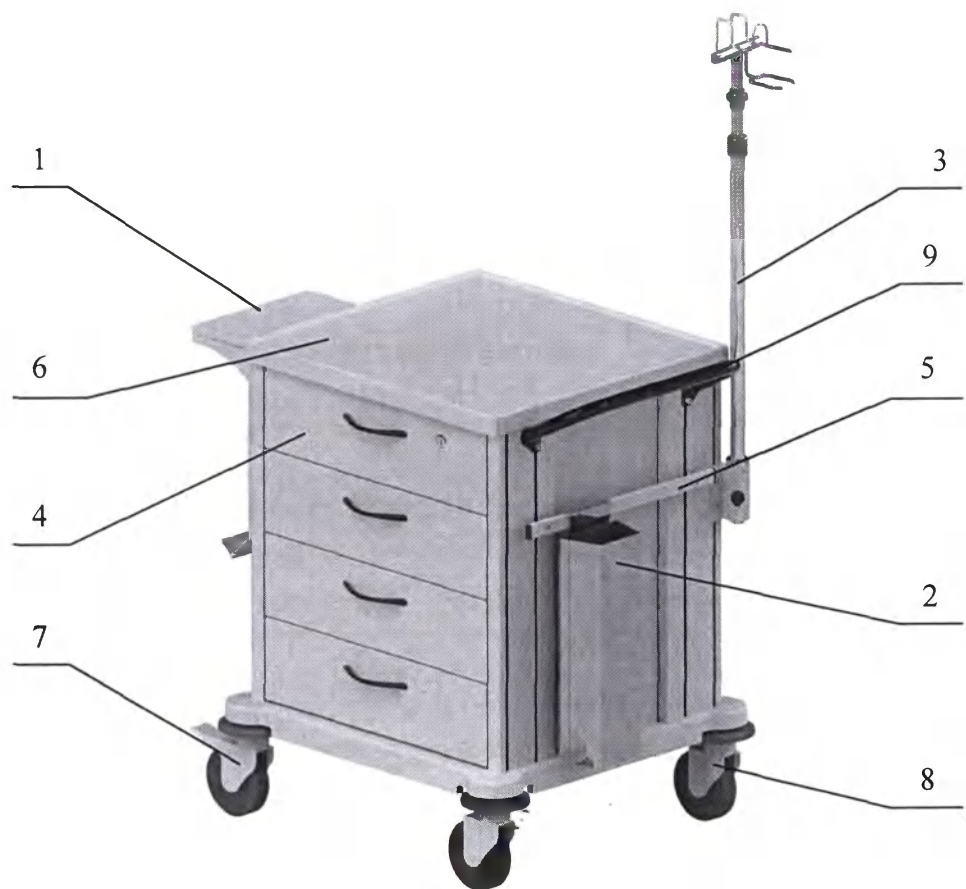


Рисунок 1 – Тележка медицинская функциональная ТМ-11(эндоскопическая)

1 – держатель полиэтиленового мешка 20 литров; 2 – ёмкость для катетеров; 3 – стойка держателя эндоскопов; 4 – ящик с замком; 5 – рейка; 6 – рабочая поверхность; 7 – колесо с тормозом - 125мм; 8 – колесо без тормоза - 125мм; 9 – ручка.

Тумбочка имеет 4 ящика с доводчиками, верхний ящик оборудован замком. На боковые поверхности тележки крепятся рейки поз.5 и ручка для передвижения тележки поз.9. Рейки поз.5 предназначены для размещения съёмных приспособлений, их сечение 25×10 мм. В комплект тележки ТМ-11 входят держатель полиэтиленового мешка 20 литров поз.1, ёмкость для катетеров поз.2, стойка держателя эндоскопов поз.3. Рабочая поверхность тумбочки поз.6 имеет отбортовку с 4-х сторон высотой 6-7 мм. Тележка установлена на 4-х колесах 2 из которых с тормозом поз.7.

7. Комплект поставки.

Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Основной состав	Количество
1. Тележка;	1
2. Ключ к замку;	2
3. Стойка держателя эндоскопов;	1
4. Ёмкость для катетеров;	1
5. Держатель для полиэтиленового мешка 20 литров;	1
6. Руководство по эксплуатации.	1
Принадлежности	
1. Держатель для полиэтиленового мешка 20 литров;	1
2. Стойка держателя эндоскопов;	1
3. Емкость для катетеров.	1

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Тележка должна храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Тележку следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики.

Габаритные размеры тележки:

– длина, мм	790
– ширина, мм	660
– высота, мм	850
– высота над уровнем пола верхнего плеча стойки держателя эндоскопов, мм	850
– возможность увеличения высоты, мм	250

Допустимое отклонение габаритных размеров – ±2%

Допустимые нагрузки на:

- столешницу, кг	10
– один ящик, кг	10
– одну рейку, кг	5
– на тележку, кг	50
Масса тележки, кг, не более	62

- Усилие, необходимое для перемещения тележек по ровному полу с плиточным покрытием, при нагрузке 50 кг, - 120 Н.
- Усилие выдвигания ящика с нагрузкой (5±0,2) кг - не более 50 Н.
- Усилие, необходимое для рукояток зажимов съемных элементов и дополнительных принадлежностей тележек, не более 50 Н.
- Тормоза колес включаются при приложении на педаль усилия не более 150 Н.
- Тележки устойчиво стоят на ровной поверхности. При этом зазор между одним из колес и поверхностью пола не должен превышать 3 мм.

Тележка драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

Материалы, используемые для изготовления изделия, имеющие контакт с организмом человека:

- Тележка – Сталь конструкционная марки Ст20, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;

- Ручка мебельная – Алюминиевый сплав АД31, производства ПАО «Северсталь», Россия, с полимерно-порошковым покрытием на эпоксидной основе марки PrimaTek 29/72169-3, производства: ООО "Гатчинский завод порошковых покрытий", Россия;
- Стойка инфузионная, держатель монитора, держатель эндоскопа, рейка для размещения съёмных приспособлений – Сталь коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т, производства: ПАО «Северсталь», Россия.

10. Уход и обслуживание.

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ .
	Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается!
	Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ . Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющей сталей.
	Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы.

Дезинфекцию тележки следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время экспозиции.

После обработки тележки дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Руководства по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет не менее 5 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации тележки.

ТО-1 (ежесменное техническое обслуживание).

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего руководства.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (ежемесячное техническое обслуживание).

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

11. Сведения об утилизации.

	Тележка медицинская функциональная не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию копаненнтов тележки производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса стола. Большинство металлических деталей тележки сделано из черной и нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании.

Тележку и съемные приспособления упаковывают в дощатые ящики типа III по ГОСТ 2991, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой.

13. Гарантии Изготовителя.

1. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» (далее-Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизированных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в руководстве по эксплуатации. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.
2. Срок гарантии (далее - «Гарантийный срок») - 24 месяца. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия.
3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а так же оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.
4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.

5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.
 6. Ответственность иностранного унитарного предприятия «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.
 7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.
 8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:
 - Ущерб, причинённый природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
 - Ущерб, причинённый нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате столкновения с другими предметами, падения, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причинённый в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причинённый в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.
 10. Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.

14. Свидетельство об упаковывании.

Тележка медицинская функциональная ТМ-11 (эндоскопическая)
зав. № _____

упакована в **Иностранном унитарном предприятии «Мединдустрия Сервис»** согласно
требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число		

15. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская функциональная ТМ-11 (эндоскопическая)

зав. № _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Тележка медицинская функциональная ТМ-11 ТУ ВУ 800003039.039 – 2015
драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ

Контролер ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Гарантийный талон

Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35 Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

Тележка медицинская функциональная ТМ-11
(эндоскопическая)
(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Гарантируется исправность изделия в течение _____ 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК _____
(подпись)
М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность) _____
(подпись)
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность) _____
(подпись)
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность) _____
(подпись)
М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность) _____
(подпись)
М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

Предприятие-изготовитель Иностранное унитарное предприятие «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию

*Дата выхода из строя

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*Представитель продавца (поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: med@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E.mail, тел., факс _____

Изделие, катал.номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (двипольно)) лисов

Директор
Иностранного унитарного предприятия
«Мединдустрия Сервис» _____ Шевченко К.В.
Должность _____ Подпись _____

