

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «АЛЬФАМЕД»

Шестак В.Л.

01 февраля 2012 г.



Стулья медицинские СМ модификаций: СМП, СМПС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с назначением, техническими характеристиками, устройством, условиями работы и правил эксплуатации стульев медицинских СМ для оснащения операционных, функциональных и процедурных отделений лечебных учреждений.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на следующие изделия:

- стул медицинский СМП, СМПС.

Общий вид изделий приведен на рисунках в Приложении А.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Стулья медицинские СМП и СМПС могут применяться в операционных отделениях и кабинетах медицинских учреждений для удобного размещения персонала..

1.2 Стулья изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

1.3 Металлические части стульев изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитным или защитно-декоративным покрытием, устойчивыми к дезинфекции.

1.4 Стул медицинский СМП состоит из основания на колесных опорах, стойки и сиденья, а стул медицинский СМПС в добавок имеет регулируемую по высоте спинку.

Общая нагрузка на стул СМП, СМПС – не более 120 кг.

Масса стула, кг, не более:

СМП – 7, СМПС – 10.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Полученную стулья распакуйте, соберите согласно приложенной схеме сборки и ознакомьтесь с его устройством по руководству по эксплуатации.

Протрите наружные поверхности чистой ветошью.

2.2 У исполнений стульев СМП, СМПС регулирование высоты сиденья производится с помощью винтового домкрата.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Чистку и дезинфекцию стульев производите салфеткой, смоченной в 1% растворе хлорамина или другой жидкости аналогичного назначения.

После чистки внутренние и наружные поверхности изделия необходимо вытереть насухо.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование стульев должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

Транспортирование стульев осуществляют по группе условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.2 Стулья должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40°C, при верхнем значении относительной влажности 80% при температуре 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Большинство металлических деталей стульев сделано из черной и нержавеющей стали и не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, поэтому специальных методов утилизации после окончания срока службы тележек не требуют.

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Средний срок службы стульев до списания составляет 7 лет.

6.2 Гарантийный срок - 18 месяцев, при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода стульев в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня ее изготовления.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 _____ зав. № _____ изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(а) годной для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

1



Рисунок А.1 - Стул медицинский СМП



Рисунок А.2 - Стул медицинский СМПС

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТА (ОВ)

