

Инструкция по применению медицинского изделия
Гель-пенетратор светового излучения ФОТОДИТАЗИН®
(FOTODITAZIN®)
(ТУ 9393-001-53737841-2006)

Регистрационный номер:

Торговое название: ФОТОДИТАЗИН®

Международное непатентованное название: отсутствует

Химическое название: N-диметилглюкаминная соль хлорина Е6

Описание: зеленоватый, полимерный гель для наружного применения

Форма выпуска: 1. Стерильная упаковка со шприцем инъекционным одноразового применения объемом 2,0 мл, содержащим 1,0 мл или 2,0 мл геля - пенетратора ФОТОДИТАЗИН®
2. Флакон стеклянный объемом 10, мл содержащий 1,0 мл или 2,0 мл геля - пенетратора ФОТОДИТАЗИН®

Состав: 1 мл геля содержит:

Активное вещество: фотодитазин (N-диметилглюкаминная соль хлорина Е6) – 5 мг

Вспомогательные вещества: эфиры целлюлозы метилгидроксипропилцеллюлозы

Назначение: ФОТОДИТАЗИН® предназначен для усиления проникающего воздействия источника световой энергии, используемой в фототерапии, в том числе фотодинамической терапии при различных видах светового воздействия

Область применения: для наружного использования в области фототерапии, в том числе фотодинамической терапии при лечении хронических ринитов и риносинусопатий; заболеваний пародонта; вульгарных угрей; псориаза и дерматозов кожи; гнойных, длительно не заживающих ран и трофических язв; базальноклеточного, плоскоклеточного рака и кератозов кожи; фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов; артрозов и артритов, а также в косметологии при фотоомоложении кожи

Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату

Способ применения: гель - пенетратор ФОТОДИТАЗИН® наносят наружно в виде аппликации на кожу или слизистую оболочку за 15-30 минут до светового воздействия из расчета 1 мл геля на 3-5 см² обрабатываемой поверхности. Через 15-30 минут нанесенный гель удаляется смоченным дистиллированной водой ватным тампоном и производится световое воздействие

Условия хранения: при температуре не выше 10 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте

Особые отметки: «Для наружного применения»

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке

Условия отпуска из аптек: по рецепту

Производитель: ООО «Вета-Гранд», 123557. г. Москва, ул. М. Грузинская, д. 38 стр. 1, тел/факс: 254-58-83

Представитель производителя
Генеральный директор ООО «Вета-Гранд»



В.В. Ашмаров