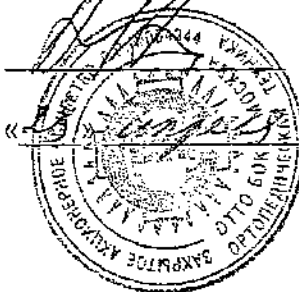



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОТТО БОКК - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»
(ЗАО «ОТТО БОКК -ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»)

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ЗАО «ОТТО БОКК – Ортопедическая техника»


 А.А.Костин
2005 года

ПРОТЕЗ БЕДРА ПН6-ОБ
Памятка по пользованию

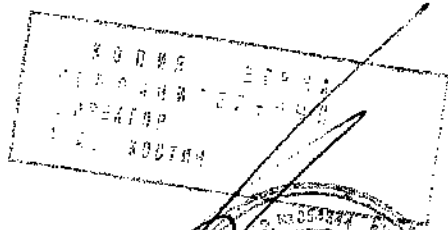



Протез бедра ПН6-ОБ предназначен для протезирования пациентов всех половозрастных групп после односторонней или двусторонней ампутации бедра на уровне верхней, средней и нижней трети.

1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1 Протез имеет модульную конструкцию, содержащую приемную гильзу, коленный модуль, искусственную стопу, регулировочно-соединительные узлы (адаптеры), косметическую облицовку и дополнительные функциональные модули. Протез может быть также оснащен силиконовым чехлом. Широкий выбор комплектующих производства фирмы «ОТТО БОКК» позволяет изготавливать протез с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические, масс-инерционные и другие характеристики инвалида, а также легко корректировать параметры сборки протезов при примерке и в процессе ходьбы.

2 НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕЗОМ

2.1 На протез надеть чулок или носок, затем обувь.

2.2 Нанести тальк на культю и надеть на неё чехол для протягивания культи (протяжка), предварительно вывернув его наизнанку.

2.3 Вставить культю в приёмную гильзу протеза. Дать небольшую нагрузку в положении «стоя» и вытягивая чехол (протяжку) через отверстие вакуумной трубки, протянуть культю полностью в гильзу. Заткнув вакуумным клапаном отверстие трубки, под нагрузкой спустить лишний воздух из культеприёмной гильзы, путём надавливания на кнопку клапана.

2.4 В случае протезирования с использованием силиконового чехла необходимо: нанести тальк на наружную поверхность силиконового чехла и вывернуть чехол наизнанку методом сворачивания наружу в кольцо.

Примечание: при надевании чехла надо быть очень осторожным, чтобы не повредить поверхность гелевого слоя острыми краями ногтей.

2.4.1 Скоординировать центр силиконового чехла по центру культи. Плотно прижать донышко чехла к концу культи, для того, чтобы избежать образования воздушной камеры внутри чехла, и раскатать чехол по всей поверхности культи без складок и воздушных полостей между ним и культей.

Примечание: противопоказано покрывать культю кремами на жирной и спиртовой основе. Рекомендовано применение средств по уходу за культей серии «DERMA».

2.4.2 При использовании силиконового чехла без текстильного покрытия, необходимо надеть на него дополнительно хлопчатобумажный или нейлоновый чехол с дистальным отверстием для силиконовых лайнеров без текстильного покрытия.

2.4.3 Вставить культю в приемную гильзу протеза. Дать нагрузку в положении «стоя» на протез. При правильно надетом протезе, приемная гильза не должна оказывать болевого воздействия на мягкие ткани культи.

2.5 В положении «стоя» необходимо осуществить несколько небольших по амплитуде сгибательных и разгибательных движений в коленном шарнире. Проверить удобство размещения культи в приемной полости гильзы и надежность крепления протеза.

3 УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ И ЧЕХЛОМ

3.1 Протез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

3.2 Внутреннюю полость приемной гильзы не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, с последующей просушкой.

3.3 После использования в дождливую погоду в случае, если стопа, обувь и косметическая облицовка протеза промокли, необходимо снять обувь, а протез протереть и высушить.

3.4 Не следует хранить протез вблизи источника тепла, сушить на солнце.

3.5 В случае протезирования с использованием силиконового чехла, пациенту необходимо придерживаться инструкции прилагаемой к нему, а так же:

3.5.1 После ходьбы на протезе силиконовый чехол не реже одного раза в день должен быть обработан нейтральным моющим средством чтобы удалить продукты выделения сальных и потовых желез, с последующим ополаскиванием в проточной воде и сушкой. При наличии у пациента чувствительной кожи, необходимо производить чистку чехла с использованием чистящего средства для ухода за культей серии «DERMA». Ни в коем случае нельзя для этого применять спиртосодержащие жидкости, а также бензин, ацетон и другие растворители.

3.5.2 Не следует хранить силиконовый чехол в свернутом положении.

3.5.3 Не допускается сушка чехла вблизи нагревательных приборов, либо на батарее отопления.

3.5.4 Необходимо оберегать гелевый материал чехла от порезов, проколов, попадания на него химикатов и агрессивных растворов.

3.5.5 Обрезка чехла по длине производится специалистом протезно-ортопедического предприятия.

4 УХОД ЗА КУЛЬТЕЙ

4.1 Ежедневно, после ходьбы на протезе, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов культи, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж культи, обработка кожи культи защитными питательными кремами и лосьонами.

5 РЕМОНТ ПРОТЕЗА

5.1 Самостоятельная разборка и ремонт протеза запрещены.

5.2 При возникновении неполадок в протезе (появлении люфтов, поломка стопы, повреждение силиконового чехла, облицовки протеза и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее протез.