

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сателлит»



Власова Власова Н.Б.

25» март 2011г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения

**Растворы для контактных линз ОФТАЛЬМИКС PREMIUM,
ОФТАЛЬМИКС COMFORT,**
производства: "SAUFLON PHARMACEUTICALS LIMITED"
(САУФЛОН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД), Великобритания

2011

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОФТАЛЬМИКС PREMIUM, ОФТАЛЬМИКС COMFORT – растворы по уходу за всеми типами контактных линз.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие медицинского назначения **ОФТАЛЬМИКС PREMIUM** – раствор по уходу за контактными линзами применяется для очистки, ополаскивания, дезинфекции, хранения, увлажнения, освежения всех видов контактных линз.

Изделие медицинского назначения **ОФТАЛЬМИКС COMFORT** – раствор для увлажнения, освежения контактных линз.

Применение раствора **ОФТАЛЬМИКС COMFORT** рекомендуется для усиления эффекта увлажнения при ношении всех типов мягких и жестких газопроницаемых контактных линз.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие полностью готово к применению и не требуют дополнительной подготовки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом любых действий по уходу за контактными линзами необходимо тщательно вымыть и вытереть руки.

Очистка. Поместить линзу на ладонь руки и добавить достаточное количество средства **ОФТАЛЬМИКС PREMIUM**. Осторожно потереть обе стороны линзы в ладони руки в течение 15-20 секунд.

Ополаскивание. После очистки ополоснуть линзы в свежем средстве **ОФТАЛЬМИКС PREMIUM**.

Дезинфекция. Наполнить контейнер для контактных линз свежим средством **ОФТАЛЬМИКС PREMIUM** и поместить промытые линзы

3

соответственно в правый и левый отсек контейнера. Оставить линзы в контейнере минимум на 4 часа или на ночь.

Срочная дезинфекция. При промывании линз средством ОФТАЛЬМИКС PREMIUM одновременно происходит и дезинфекция. Особенно удобно для пациентов, носящих линзы в пролонгированном режиме.

Увлажнение. При ополаскивании линз, средство ОФТАЛЬМИКС PREMIUM увлажняет линзы, образуя пленку между поверхностью линзы и роговицей, обеспечивая смягчающий эффект для глаз.

При ощущении сильной сухости и дискомфорта в глазах во время ношения контактных линз, рекомендуется капнуть 2-3 капли средства ОФТАЛЬМИКС COMFORT под нижнее веко, держа флакон со средством над глазом вертикально отверстием вниз и слегка надавив пальцами на стенки флакона.

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Не смешивать средства с другими жидкостями.

Проконсультируйтесь с вашим врачом – офтальмологом перед использованием любого лекарственного средства для глаз во время ношения контактных линз. В случае постоянного раздражения глаз прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим врачом – офтальмологом.

Не промывайте контактные линзы или контейнер водой из-под крана.

Хранение. Рекомендуется снова продезинфицировать линзы после длительного хранения (7 дней или больше). После использования тщательно промыть контейнер для контактных линз кипяченой водой и оставить просушить на открытом воздухе.

Используйте содержимое флакона в течение 3-х месяцев после открытия. Храните все средства по уходу за контактными линзами в недоступных для детей местах. Не допускайте соприкосновения горлышка флакона с другими поверхностями. Всегда закрывайте флакон крышкой после использования.

Храните при температуре от 4С до 30С в защищенных от света местах.

Не замораживать.

Срок годности – указан на упаковке.

Утилизация.

Подлежит утилизации через бытовую сеть.

Использованные упаковки не бросать в канализацию.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Принятая на производстве система контроля качества - ISO - гарантирует тщательный поступенчатый контроль - от сырья до готовой продукции, что обеспечивает высокий уровень потребительских характеристик выпускаемых изделий.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
4 ЛИСТА (ОВ)



Настоящее

поставл
Налого

в налоговос

Инспек

и ей присво

Свидете

Главный г
Межрайон
Город М

Я. Матюсов
Исполнительный директор
Федерального казенного учреждения
«Федеральный центр компетенции в
области контроля за соблюдением
законодательства Российской
Федерации в области
защиты прав потребителей»
ФРЦКП
Москва