

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ликс»



А.Ю. Гвоздев

« 19 » _____ 2010 __ г.

М.п.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия одноразовые медицинские стерильные и
нестерильные для взятия и обработки крови,
водства Chengdu Rich Science Industry Co., Ltd., Китай

Москва, 2010



ите пробирки, соответствующие необходимым исследованиям.

овые иглу, держатель, спиртовые салфетки, пластырь.

ге иглу в держатель и закрутите до упора. Проверьте, крепко ли игла закреплена, избежать ее соскальзывания во время использования.

ожите руку пациента на инъекционном столе.

те жгут, обработайте место венепункции спиртовой салфеткой.

е защитный колпачок с иглы и произведите венепункцию.

е пробирку в иглодержатель до упора (при этом необходимо указательным и пальцами придерживать выступы держателя, а большим пальцем проталкивать су к игле) и удерживайте ее до тех пор, пока кровь не перестанет поступать в су. Для визуального контроля уровня заполнения на этикетке пробирки имеется (если кровь не поступает в пробирку – это значит, что игла прошла вену насквозь случае нужно немного вытянуть иглу (но не вынимать), пока кровь не пойдет в су. Уберите жгут, как только кровь появится в пробирке. При введении и следите за ее положением по центру держателя, чтобы предотвратить боковой крышки и последующую за этим преждевременную потерю вакуума.

те пробирку из держателя. Резиновая мембрана возвращается в исходное ие, перекрывая ток крови по игле. Если необходимо взять кровь в несколько к, повторить процедуры № 7 – 8. Повторно вводить иглу в вену для этого не

те иглу из вены и зажмите место пункции сухим стерильным тампоном.

: иглу с держателя в специальный контейнер для использованных игл.

но переверните пробирку 5-8 раз для того, чтобы достичь полного смешивания нтами. Не встряхивайте пробирку: резкое смешивание может вызвать азование и гемолиз!

сите на этикетку пробирки идентификационные данные пациента, указанные в
влении.

авьте пробирку в лабораторию.