

ООО «ТПК «ПроМед»
Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-Производственная Компания «ПроМед»
ИНН 5037009457, КПП 503701001, ОГРН 1145043003720,
142280, Московская обл., г. Протвино, Победы ул., д. 2, пом. 303
Тел.: 8 (800) 700-54-48

Инструкция по применению
медицинского изделия
Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые по
ТУ 9398-001-31884398-2016

Назначение: «Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые по ТУ 9398-001-31884398-2016» (далее – бахилы) предназначены для препятствия проникновения грязи и влаги, а с ними и болезнетворных микроорганизмов, с обуви персонала и пациентов во внешнюю среду. Бахилы надеваются на обувь сразу при входе в различные медицинские учреждения для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм, сохранения стерильности и чистоты в больницах, роддомах, медицинских центрах, поликлиниках, химических лабораториях, стоматологических клиниках.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, а также другие учреждения, требующие обязательное пользование медицинскими бахилами, как одним из средств личной гигиены медицинского персонала и пациента, а также в быту.

Описание: Бахилы по внешнему виду представляют собой чехлы, изготовленные из полиэтилена различной плотности марки РЕ6 FE-68 производства ООО «Ставролен», Россия (ТУ 6-11-00206368-25-2013) прямоугольной формы с припаянной сверху резинкой (нить латексная оплетенная, производства ИП Рябов Е.А., Россия (ТУ 2514-001-0171317890-2015), оплетена нитью полиэфирной текстурированной неокрашенной некрученной, производства ОАО «СВЕТЛОГОРСКИХИМВОЛОКНО», Республика Беларусь (ТУ ВУ 400031289.129-2007). Бахилы должны быть сшиты по форме ноги и фиксируются при помощи резинок. Крепление резинок осуществляется машинным способом. Внешний вид бахил должен соответствовать рисунку 1. (В артикулах 5 и 6 применяется двойная резинка для усиления).

Бахилы выпускаются в следующих вариантах исполнения по цвету:

- синий;
- зеленый;
- красный;
- желтый.

При изготовлении используются следующие марки красителей:

Суперконцентраты красителей (Masterlatch):

- желтый (марки: BL20096, BL20097, BL20100);
- красный (марки: BL40074, BL40097, BL40098);
- *синий (марки: BL60074, BL60075, BL60089, BL60159);*
- *зеленый (марки: BL70090, BL70091).*

Изготовитель: «Bright Colors S.A.» («Брайт Колорс С.А.»), Греция.

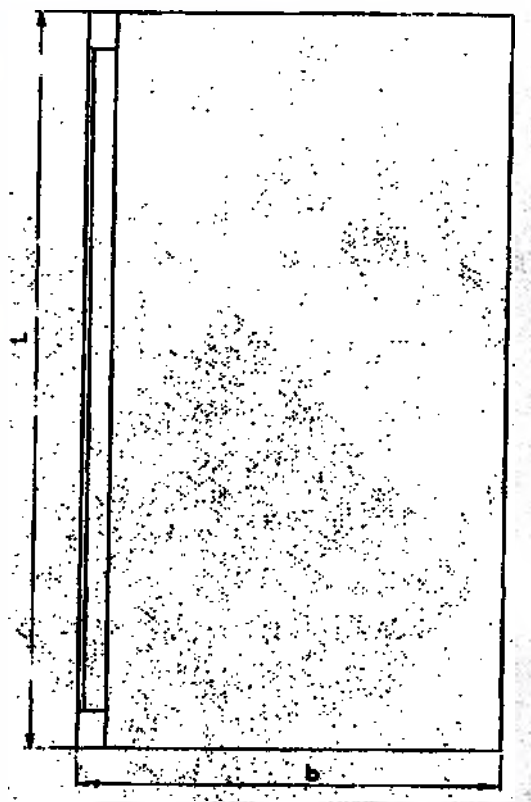


Рисунок 1.

Бахилы в количестве одна пара или 100 пар должны быть упакованы в упаковку из пленки ПОФ (пленка термоусадочная полиолефиновая) бесцветная, марка ASTRAFILM, производства ООО «ЭМ-Пласт», Россия (ТУ 2245-001-99977326-2009). Края должны быть запаяны.

При покупке важно учитывать размер и предполагаемое время ношения, в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Параметры Обозначение артикулов	Толщина материала, мкм	Время ношения, не менее, час
1	30±0,2	1
2	35±0,2	1,5
3	40±0,2	2,0
4	50±0,2	2,5
5	60±0,2	3,0
6	80±0,2	4,0
7	30±0,2	1,0
8	40±0,2	2,0
9	30±0,2	1,0
10	40±0,2	2,0
11	30±0,2	1,0
12	40±0,2	2,0
13	60±0,2	3,0

Размеры, масса: Габаритные размеры и масса бахил должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Параметры Обозначение артикулов	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Масса, 1 шт., г
1	390±10	140±10	1,4±0,2
2	390±10	140±10	1,7±0,2
3	390±10	140±10	2,0±0,2
4	400±10	140±10	2,5±0,2
5	400±10	140±10	3,0±0,2
6	400±10	140±10	5,0±0,2
7	390±10	140±10	1,4±0,2
8	400±10	140±10	2,0±0,2
9	390±10	140±10	1,4±0,2
10	400±10	150±10	2,0±0,2
11	390±10	150±10	1,4±0,2
12	400±10	150±10	2,0±0,2
13	290±10	120±10	3,0±0,2

Показания к применению

Бахилы применяются персоналом и пациентами любых возрастных категорий, без ограничения по состоянию здоровья для поддержания чистоты и соблюдения требований гигиены в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений, а также в других учреждениях и в быту.

Порядок и условия применения: извлечь бахилы из первичной упаковки, растянуть резинку по ширине и надеть на уличную обувь, начиная с носка.

Применять в любых медицинских учреждениях и домашних условиях.

Побочное действие: Нет.

Противопоказания: Нет.

Меры предосторожности: Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Хранение и транспортирование: Транспортирование изделий должно производиться любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования изделий вида климатического исполнения УХЛ 4.2 - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Изделия в упаковке предприятия должны храниться на складах поставщика по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Запрещено хранить и транспортировать бахилы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия). Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от

внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Утилизация: Упаковку, а так же использованные/не использованные или с истекшим сроком годности бахилы утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А или вместе с бытовыми отходами.

Гарантия изготовителя: ООО «ТПК «ПроМед»

ИНН 5037009457, КПП 503701001, ОГРН 1145043003720,

142280, Московская обл., г. Протвино, Победы ул., д. 2, пом. 303

Тел.: 8 (800) 700-54-48

Изготовитель гарантирует соответствие Бахил медицинских одноразовых, полиэтиленовых по **ТУ 9398-001-31884398-2016** заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности бахил - 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с момента приобретения.

Бахилы применяют одноразово, не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.

Генеральный директор
МП



М.А.Исаев

Прочито, пронумеровано
4 (четыре) листов
Ген. Директор ООО ТПК «ПроМед»
Исаев М.А.

