


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРОТЕК-СВМ»

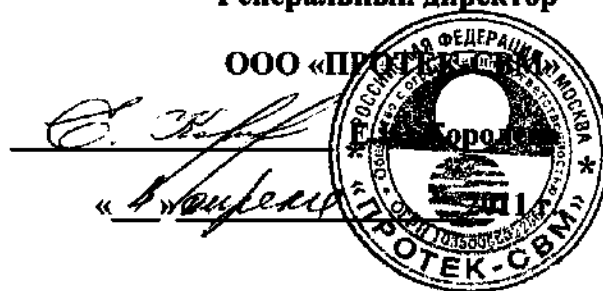

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

«Бинтов эластичных медицинских»

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ.

Бинты эластичные медицинские предназначены для проведения компрессионной терапии в различных областях хирургии (сердечно-сосудистой, абдоминальной, торакальной, пластической и др.), травматологии, ортопедии, спортивной медицине и других областях практического здравоохранения.

Бинты могут быть использованы в клинических, поликлинических, полевых условиях, при оказании первой медицинской помощи и в быту.

Бинты выпускаются 41-го типоразмера: длиной 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 м и шириной 5,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0 и 20 см в 4-х исполнениях:

Исполнение 1. "Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости.

Исполнение 2. "Бинт медицинский эластичный средней растяжимости

Исполнение 3. "Бинт медицинский эластичный малой растяжимости.

Исполнение 4. "Бинт медицинский эластичный спортивный.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Бинты эластичные медицинские выполнены из трикотажного эластичной ленты на основе хлопчатобумажной и высокообъемной полиакрилнитриальной пряжи, хлопчатобумажных нитей, эластомерного латексного волокна или волокна Лусга фиксирующая часть из регулируемой в пределах 2-х размеров текстильной застежки типа «Контакт» (вилькро).

Бинты в исполнениях 1,2,3 выполняются в цвете натурального неотбеленного хлопка, бинты в исполнении 4 в различной цветовой гамме, исключая черный; упаковываются индивидуально в термоусадочную пленку совместно с этикеткой и групповую упаковку по 10-25 штук в картонные коробки по ГОСТ 7933-89.

Бинты имеют плотность и растяжимость в соответствии с исполнением и данными таблицы

Наименование показателя	Исполнение бинта			
	Исполнение 1	Исполнение 2	Исполнение 3	Исполнение 4
1. Поверхностная плотность, г/м ²	430,0±20,0	300,0±20,0	270,0±20,0	450,0±20,0
2. Растяжимость до и после стирки, %	не менее 150	не менее 100, но не более 150	не менее 35, но не более 100	не менее 150

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты должны применяться строго по указанию врача и при соблюдении правил индивидуального подбора. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость и аллергические реакции пациента на отдельные компоненты изделия. противопоказаний не имеют.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

1. Подбор необходимого бинта производится в соответствии с назначением врача:

Исполнение 1. "Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости лечение варикозного расширения вен III-IV степени, комплексная терапия тромбофлебитов и после операций склерозирования и флебэктомии, для лечения травматических повреждений суставов (растяжений, вывихов, ушибов).

Исполнение 2. "Бинт медицинский эластичный средней растяжимости профилактика и лечение начальных стадий варикозного расширения вен и тромбофлебитов.

Исполнение 3. "Бинт медицинский эластичный малой растяжимости для проведения склеротерапии, в качестве вспомогательного средства в травматологии для наложения повязки после снятия гипса.

Исполнение 4. "Бинт медицинский эластичный спортивный профилактика и лечение спортивной травмы (вывихи, растяжения, ушибы) в качестве средства для создания защитной повязки на суставы.

2. В зависимости от места применения на теле пациента подбирается ширина и длина бинта:

- суставы ног и рук – ширина 8 см длина от 0,6 м до 2 м;
- ноги от основания пальцев до и выше колена – ширина 8-10 см длина 3-5 м.

3. Перед использованием бинта, его необходимо перемотать в обратном направлении, так чтобы застежка оказалась внутри мотка. Для этого нужно взяться за край бинта, на котором пришита крючковая часть застежки, при этом застежка должна находиться на внутренней стороне бинта, отогнуть застежку на внешнюю сторону и в этом направлении продолжать намотку.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Бинтование следует осуществлять растягивая бинт на 50-60% нисходящими и восходящими турами, по типу восьмерки.

2. По окончании наложения повязки бинт фиксируется с помощью регулируемой текстильной застежки типа «вилькро».

3. По мере необходимости бинты подвергаются стиркам в теплой воде при температуре 40-45°C с использованием слабощелочных моющих средств. Бинты не выкручивают и сушат в расправленном состоянии.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Бинты следует хранить в сухом месте. Срок хранения – 5 лет.

Претензии направлять по адресу:

ООО «ПРОТЕК-СВМ», 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к.4, стр.7.

Сшито и заверено печатью 3
три лист 2

И.Ю. Корсаков
ЕК-СВМ