

УТВЕРЖДАЮ

Глава Представительства

Публичной
компания «ГамброАксиебулаг»,
Швеция в России

Э.Ю. Таронишвили

23 ноября 2011 г.

М.П.

Руководство по эксплуатации

медицинского изделия

Раствор антикоагулянта «Призмоцитрат» (Prismocitrate)

производства

GambroDascoS.p.A. / ГамброДаскоС.п.А, Италия

2011

1. Назначение

Раствор антикоагулянта «Призмоцитрат» (Prismocitrate) 10 / 2 и 18/0 может быть использован только под руководством или на основании направления врача, компетентного в лечении почечной недостаточности с использованием непрерывной заместительной почечной терапии.

Гемодинамический статус пациента, а также жидкостный, электролитный и кислотно-щелочной баланс, должны тщательно отслеживаться во время лечения.

2. Основные технические характеристики

Prismocitrate 10/2

Компонент	Содержание
Цитрат	10 ммоль/л
Лимонная кислота	2 ммоль/л
Натрий	136 ммоль/л
Хлорид	106 ммоль/л

Prismocitrate 18/0

Компонент	Содержание
Хлорид	86 ммоль
Цитрата	18 ммоль
Натрия	140 ммоль

3. Побочные реакции

Раствор содержит цитрат натрия и лимонную кислоту. Он не содержит кальция или магния. Использование раствора может привести к тяжелым нарушениям кислотно-щелочного баланса (алкалоз) и / или тяжелым снижениям уровней кальция в крови (гипокальциемия) и / или магния в крови (гипомагниемия).

4. Подготовка к работе изделия

Извлечь пакеты из упаковки. При необходимости добавить к раствору через инъекционный порт дополнительные компоненты в соответствии с указаниями лечащего врача. Совместимость дополнительных компонентов находится непосредственно под ответственностью врача.

5. Порядок работы изделия

1.а. При использовании Луер-порта, снимите крышку и подключите Луер-разъем «папа» к линии предварительного кровяного насоса к Луер-разъему «мама» на мешке и затяните.

І.б. С помощью большого пальца сломайте штифт на основании и переместить его туда-обратно. Не используйте инструмент. Убедитесь, что штифт полностью отделен и что жидкость течет свободно. Штифт остается в Луер-порте во время лечения.

ІІ.а. Если используется инъекционный порт, удалите защитный колпачок.

ІІ.б. Затем введите шип через резиновую прокладку. Убедитесь, что жидкость течет свободно.

6. Правила хранения и использования

Хранить раствор при температурах не ниже + 4°C.

Сшито и заверено печатью 3

() лист



Таронциевичи Э.Ю.