

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРОТЕК-СВМ»



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

«Бандажей компрессионных послеоперационных»

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандажи компрессионные послеоперационные предназначены для использования в качестве компрессионно-поддерживающих изделий с малой компрессией на брюшную полость для применения в послеоперационном периоде для поддержания органов и тканей брюшной полости в состоянии покоя с целью профилактики послеоперационных осложнений, при спланхноптозе, в том числе и после родов, а также при слабой атоничной мускулатуре передней брюшной стенки. Бандажи в зависимости от материалов выпускаются в 3-х исполнениях, исполнение 3 дополнительно обеспечивают профилактику вторичного инфицирования.

Бандажи являются также эффективным средством для профилактики пояснично-крестцовых радикулитов, люмбаго, корешкового синдрома, а также травматических повреждений поясничного отдела позвоночника при тяжелых физических нагрузках.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий вид бандажей компрессионных послеоперационных исполнения 1 или исполнения 2

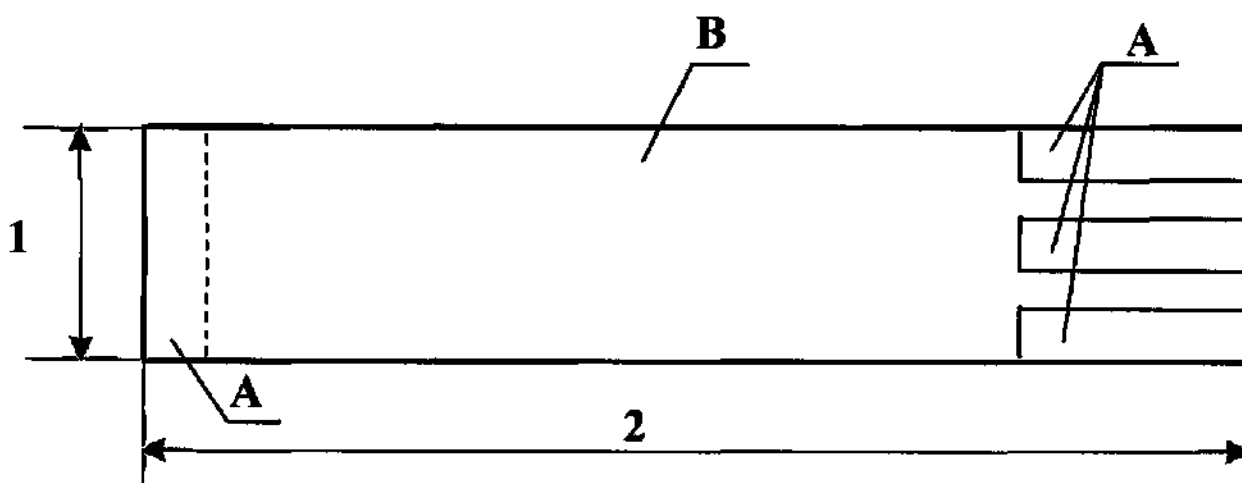

А - застежка; В - эластичный пояс;

Общий вид бандажа компрессионного послеоперационного антимикробного артикул

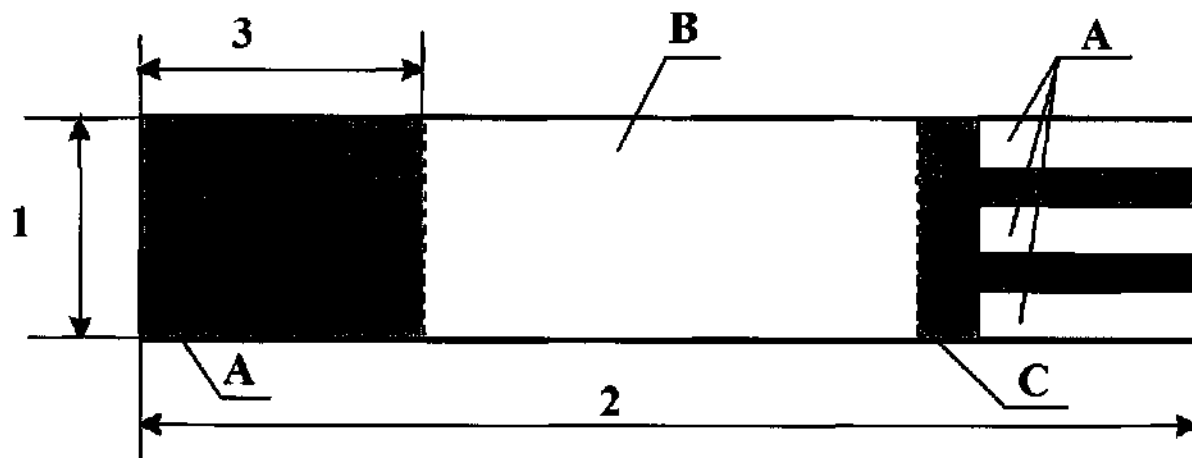

А - застежка; В - эластичный пояс;

С - вставка из хлопчатобумажного материала

Бандажи компрессионные послеоперационные выполнены из трикотажного эластичного полотна на основе хлопчатобумажной высокообъемной полиакрилнитриальной пряжи, хлопчатобумажных и латексных нитей, фиксирующая часть из регулируемой в пределах 2-х размеров текстильной застежки. Бандажи выполняются в различной цветовой гамме, исключая черный; имеют восемь типов-размеров, упаковываются индивидуально в полиэтиленовый пакет совместно с этикеткой и групповую упаковку по 10 штук в картонные коробки по ГОСТ 7933-89. Бандажи имеют растяжимость от 100 до 150 %, остаточные деформации не более 10%, выдерживают многократные стирки, хорошо моделируются и надежно фиксируются.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бандажи должны применяться строго по указанию врача и при соблюдении правил индивидуального подбора. Противопоказанием к применению является наличие у пациента индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на компоненты изделия.

4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Проводят замер обхвата талии пациентки.
2. Согласно размерам пациента по таблице на листе-вкладыше, прилагаемой к упаковке бандажа, осуществляют подбор размера изделия.

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. Изделие надевают на пациента в положении «лежа».
2. Изделие фиксируют с помощью регулируемой текстильной застежки типа «вилькро», при этом маркировка бандажа должна располагаться в верхней части изделия. Наличие полос крепления застежки позволяет осуществлять регулирование натяжения бандажа с учетом особенностей телосложения пациентов.
3. По мере необходимости бандажи подвергаются стиркам в теплой воде при температуре 40-45°C с использованием слабощелочных моющих средств. Бандажи не выкручивают и сушат в расправленном состоянии.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Бандажи следует хранить в сухом месте. Срок хранения – 5 лет.

Претензии направлять по адресу:

ООО «ПРОТЕК-СВМ», 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к.4, стр.7.

Сшито и заверено печатью 3

(м.р.и)

