

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

от

№



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения

**Многофункциональный раствор для ухода за гибкими
(жесткими) газопроницаемыми контактными линзами
«ЛИКОНТИН-ФОРТЕ»**

ТУ 9398-009-34704936-2008

Назначение изделия: Многофункциональный раствор для ухода за гибкими (жесткими) газопроницаемыми контактными линзами «ЛИКОНТИН-ФОРТЕ» предназначен для хранения и повседневного ухода за гибкими и жесткими газопроницаемыми контактными линзами всех типов, может применяться в процессе их изготовления, а также для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор предназначен для ухода за следующими видами контактных линз:

- гибкие газопроницаемые линзы из всех материалов;
- жесткие контактные линзы из полиметилметакрилата.

«ЛИКОНТИН-ФОРТЕ» увлажняет и смазывает поверхность линзы, повышая комфортность пользования линзами. Он обеспечивает надёжную защиту линз от воздействия микрофлоры, препятствует отложению загрязнений.

Ежедневно после снятия линз нанести 3-4 капли раствора ЛИКОНТИН-ФОРТЕ на линзу, протереть на ладони, промыть этим же раствором и поместить в контейнер со свежим раствором ЛИКОНТИН-ФОРТЕ.

При использовании многофункционального раствора для ухода за гибкими (жесткими) газопроницаемыми контактными линзами ЛИКОНТИН-ФОРТЕ не требуется применение ферментных очистителей для удаления белков и протеинов.

Рекомендуется ежедневно заменять раствор ЛИКОНТИН-ФОРТЕ в Вашем контейнере на свежий.

Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев.