

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

от

№

22 апреля 2008

В.П. Гнатюк

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная
«МЕДСТАР»
г. Волгоград, Дзержинский район

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения**

**Раствор для облегчения ношения гибких (жёстких)
газопроницаемых контактных линз всех типов
«ЛИКОНТИН-ФОРТЕ-КОМФОРТ»**

ТУ 9398-009-34704936-2008

Назначение изделия: Раствор для облегчения ношения гибких (жёстких) газопроницаемых контактных линз всех типов «ЛИКОНТИН-ФОРТЕ-КОМФОРТ» предназначен для хранения и повседневного ухода за гибкими и жёсткими газопроницаемыми контактными линзами всех типов, может применяться в процессе их изготовления, а также для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор предназначен для ухода за следующими видами контактных линз:

- гибкие газопроницаемые линзы из всех материалов;
- жесткие контактные линзы из полиметилметакрилата.

«ЛИКОНТИН-ФОРТЕ-КОМФОРТ» увлажняет и смазывает поверхность линзы, повышая комфортность пользования линзами. Он обеспечивает надёжную защиту линз от воздействия микрофлоры, препятствует отложению загрязнений.

Для повышения комфортности ношения контактных линз перед надеванием нанесите 1-3 капли раствора «ЛИКОНТИН-ФОРТЕ-КОМФОРТ» на линзу.

Если дискомфорт не исчезает - проконсультируйтесь с Вашим офтальмологом.

Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев.