

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Директор ООО ИФ «МЕДСТАР»

от

№

В.П. Гнатюк

20 апреля 2007 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения**

**Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для очистки
и облегчения ношения мягких и жестких контактных линз
«Ликонтин-Комфорт»**

ТУ 9318-002-34704936-96

Назначение изделия: Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для очистки и облегчения ношения мягких и жестких контактных линз «Ликонтин-Комфорт» предназначен для ежедневной очистки, а также для облегчения ношения мягких и жестких контактных линз всех типов.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор предназначен для ежедневной очистки и облегчения ношения мягких и жестких контактных линз всех типов.


Нанести 1-3 капли раствора «Ликонтин-Коморт» на линзу перед надеванием.

После снятия линз нанести 3-4 капли раствора «Ликонтин-Коморт» на линзу, протереть на ладони пальцем в течение 10-30 секунд и поместить в контейнер с раствором для хранения.


Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 3 месяцев.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ФГУ «ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

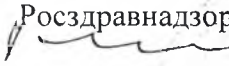
 Б.И. Леонов

« 18 » 04 2007 г.

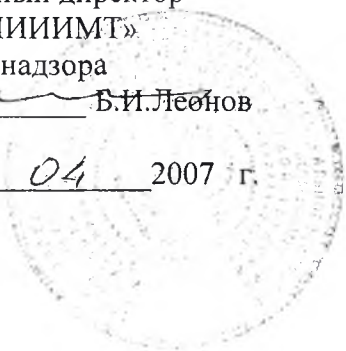

УТВЕРЖДАЮ

ООО НПФ «МЕДСТАР»

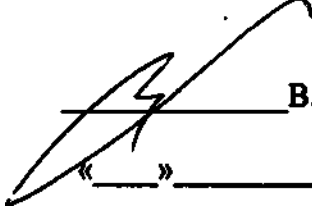
В.П. Гнатюк

« » 2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 34704936.03-07 № 3

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ 9318-002-34704936-96

Инв. № подл.
Подпись и дата
замен. инв. №

		ТУ 9318-002-34704936-96			
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
12.04.2007 Г.				2	2
ПРИЧИНА		Изменение срока действия ТУ			Код 1
ОЗНАЧЕНИЕ О ЗАДЕЛЕ		На заделе не отражается			
ОЗНАЧЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ					
ОБЪЕКТНОСТЬ		ТУ 9318-002-34704936-96			
ОБЪЕКТ					
ОБЪЕКТ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
3	Титульный лист: ОКП 93 1800 ОКП 93 9890 Срок действия с 18.12.1996 г. до 11 июля 2007 г. до 11 июля 2012 г.				
ПРЕДСТАВИЛ		12.04.07г.	Н. КОНТР.		
ОК В. П.			ПР. ЗАК.		
ОБЪЕКТНОСТЬ ВНЕС					


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития




УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

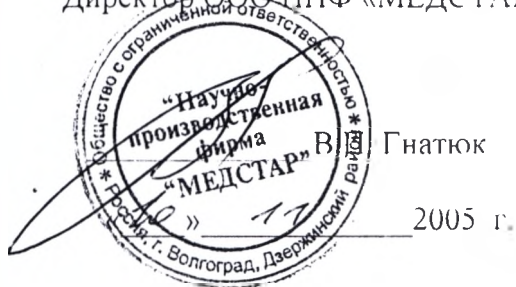

ИЗВЕЩЕНИЕ 34704936.03-05 № 2

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ 9318-002-34704936-96

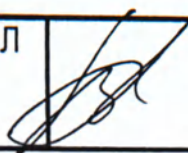		ИЗВЕЩЕНИЕ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	
		ТУ 9318-002-34704936-96			
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
12.07.2005 Г.				2	2
ПРИЧИНА		Изменение срока действия ТУ		Код 1	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		На заделе не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ					
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		ТУ 9318-002-34704936-96			
РАЗОСЛАТЬ					
ПРИЛОЖЕНИЕ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
2	<u>Титульный лист:</u> Срок действия с 18.12.1996 г. до 01.01.2004 г. до 11 июля 2007 г. <u>Лист 2:</u> Литеру О₁ заменить на А				
СОСТАВИЛ				Н. КОНТР.	
Гнатюк	12.07.05г.			ПР. ЗАК.	
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС					

_____ №
орган Гос-
стандарта

001736
номер ре-
гистрации

25.12.1996
дата

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИИМТ

Б.И. Леонов

" 22 " 12 1997 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор НПО "МЕДСТАР"

В.П. Гнатюк

1997 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ 34704936.02-97 № 1
обозначение

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ 9318-002-34704936-96
обозначение ТУ

		ИЗВЕЩЕНИЕ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	
		ТУ 9318-002-34704936-96			
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
01.12.1997 г.				2	2
ПРИЧИНА		Изменение срока действия ТУ		Код 1	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		На заделе не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ					
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ					
РАЗОСЛАТЬ					
ПРИЛОЖЕНИЕ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
1					
Титульный лист: Срок дествия с 18.12.1996 до 01.01.2004 г. до 01.01.1999 г. (1)					
СОСТАВИЛ				Н. КОНТР.	
Гнатюк				ПР. ЗАК.	
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС					

СОГЛАСОВАНО

Директор НИИМИТ

Б. И. Леонов

1996 г.



Директор НИИ "МЕДСТАР"


Научно-

исследовательский

центр

«МЕДСТАР»

1996 г.

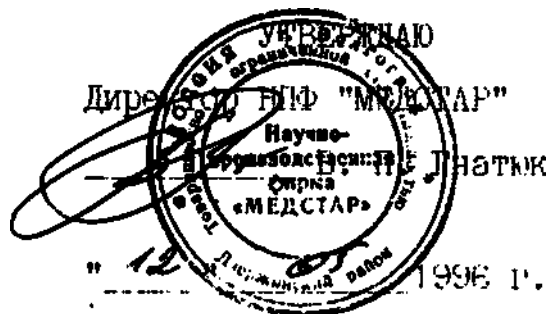

РАСТВОРЫ ВОДНО-СОЛЕВЫЕ В ПЛАСТМАССОВОЙ УПАКОВКЕ
ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

"ЛИКОНТИН"

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 9318-002-34704936-96

(введены впервые)

Срок действия с 18.12.96

до 01.01.1999 г.

1996

Настоящие технические условия распространяются на растворы водно-солевые в пластмассовой упаковке для очистки контактных линз «Ликонтин», представляющие собой водные растворы ионогенных, неионогенных или амфотерных поверхностно-активных веществ и полезных добавок.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

Растворы водно-солевые в пластмассовой упаковке для очистки контактных линз «Ликонтин» (далее - «растворы») предназначены повседневного ухода за мягкими, гибкими и жёсткими контактными линзами.

Растворы изготавливаются в климатическом исполнении 04 по ГОСТ 15150-69.

Пример обозначения раствора при заказе: «Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для хранения мягких контактных линз «Ликонтин», ТУ 9318-002-34704936-96.

Выпускаются следующие наименования растворов «Ликонтин»:

- «ЛИКОНТИН-С» - раствор для ежедневной очистки мягких и жёстких контактных линз;
- «ЛИКОНТИН-УНИВЕРСАЛ» - универсальный раствор для ежедневной очистки и хранения мягких контактных линз;
- «ЛИКОНТИН-КОМФОРТ» - раствор для очистки и облегчения ношения мягких и жёстких контактных линз.

					ТУ 9318-002-34704936-96			
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	РАСТВОРЫ «ЛИКОНТИН»	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Гнатюк В.П.				О1	2	18
Пров.		Лебедев Ф.Б.				НПФ «Медстар»		
Н. контр.								
Утв		Гнатюк В.П.						

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Растворы водно-солевой в пластмассовой упаковке для хранения мягких контактных линз «Ликонтин» должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий согласно технологической документации (Технологический регламент производства № 34704936-002-96).

1.2. Рецептура растворов по сырью и массовым долям компонентов должна соответствовать нормам, приведённым в Приложениях 1-3 к настоящим техническим условиям.

1.3. Основные параметры и размеры.

1.3.1. По органолептическим и физико-химическим показателям средства должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Подвижная жидкость
Цвет	Бесцветный или слегка желтоватый
Запах, вкус	Без запаха, слегка соленого вкуса
Концентрация водородных ионов (pH)	6.0 - 8.0
Массовая доля сухого вещества, %	0.2 – 4.0
Содержание механических примесей	отсутствие

1.4. Характеристики.

1.4.1. Растворы при эксплуатации должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 для исполнения 04. Проверка производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

1.4.2. Растворы при транспортировании должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 для условий хранения 1. Проверка проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

1.4.3. Растворы в транспортной упаковке должны быть устойчивы к механическим воздействиям согласно требованиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444-92.

1.4.4. Средний срок сохраняемости растворов должен быть не менее 18 месяцев со дня изготовления.

За критерий предельного состояния принимается несоответствие растворов хотя бы по одному параметру требованиям, указанным в таблице 1 настоящих ТУ.

1.5. Упаковка.

1.5.1. Упаковку растворов «Ликонтин» производят в полимерные флаконы с навинчивающимися колпачками по ТУ 18-16-451-83 вместимостью от 50 до 3000 мл из полиэтилена пищевого ПНД-276 ГОСТ 16338-85.

1.5.2. Флаконы упаковывают в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 по 10, 24 или 42 флакона в один ящик, но не более 60 флаконов

1.5.3. Коробки должны быть уложены в фанерные ящики по ГОСТ 5959-80. Масса ящика (брутто) не должна превышать 70 кг.

1.5.4. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, на котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- количество флаконов;
- условный номер упаковщика и контролера;
- дата упаковки (месяц, год).

1.6. Маркировка.

Маркировку растворов «Ликонтин», упакованных во флаконы, производят по ГОСТ 27429-87.

					ТУ 9318-002-34704936-96	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.6.1. На этикетке флакона должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (месяц, год).

Маркировка флакона производится после окончательного контроля.

1.6.2. На картонной коробке и на транспортной таре согласно п.1.5.3. должна быть наклеена этикетка, на которой указываются:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименования изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- количество флаконов;
- дата изготовления (день, месяц, год);
- гарантийный срок годности.

2. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

2.1. Испытания проводят при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150-69.

2.2. Растворы подвергаются следующим видам испытаний:

- 1). Приёмо-сдаточные испытания;
- 2). Периодические испытания;
- 3). Сертификационные испытания.

2.3. Сертификационные испытания проводят согласно требованиям, установленным в ГОСТ Р 50444-92.

2.4. Приёмо-сдаточные испытания.

2.4.1. Контролируемые параметры, рекомендуемая последовательность проведения контроля должны соответствовать указанным в табл. 1.

2.4.2. Растворы должны поступать на контроль в виде последовательности полностью сформированных партий. Партией раствора «Ликонтин» считают одноимённую продукцию, выработанную в течение одной смены и оформленную одним документом о качестве.

2.4.3. Соответствие упаковки и маркировки требованиям настоящих технических условий проверяют, отбирая от партии выборку в объёме 3% транспортных единиц, но не менее 3 единиц.

					ТУ 9318-002-34704936-96	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

2.4.4. Если в выборке более 3% продукции в потребительской таре не соответствует требованиям стандарта по упаковке, маркировке, проводят повторную проверку из удвоенной выборки.

По результатам повторной проверки партию принимают, если количество продукции в потребительской таре, не соответствующей требованиям настоящих технических условий, составляет не более 3%, бракуя отобранную продукцию с дефектами.

Партию бракуют, если в выборке более 3% продукции не соответствуют требованиям технических условий.

2.4.5. Для проверки раствора «Ликонтин» по органолептическим и физико-химическим показателям проводят отбор проб в количестве от 6 до 12 изделий из разных мест партии. Масса средней пробы - не менее 100 г.

2.4.6. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному показателю, проводят повторный анализ, для чего вновь отбирают удвоенное количество образцов от проверяемой партии.

Результаты повторного анализа распространяют на всю партию. При несоответствии раствора «Ликонтин» требованиям настоящих технических условий хотя бы по одному из физико-химических показателей всю партию бракуют, о чём составляют акт.

2.5. Периодические испытания.

2.5.1. Массовую долю сухого вещества предприятие-изготовитель гарантирует на основании периодических испытаний, проводимых не реже 1 раза в квартал.

2.5.2. Марка материала флаконов контролируется для каждой партии флаконов не реже 1 раза в 3 месяца путем сличения сопроводительной документации предприятия-изготовителя флаконов с нормами п. 1.5.1 настоящих технических условий.

2.5.3. Выборка раствора «Ликонтин», отобранная согласно п. 2.4.3 настоящих ТУ, подвергается бактериостатическим испытаниям не реже одного раза в квартал.

При неудовлетворительных результатах периодических испытаний повторные испытания проводятся на удвоенной партии растворов.

Результаты повторных испытаний считаются окончательными.

2.5.4. проверка среднего срока сохраняемости проводят по РД 50-707-91 не реже одного раза в 3 года.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия испытаний должны соответствовать нормальным климатическим условиям по ГОСТ 15150.

3.1. Внешний вид и цвет растворов «Ликонтин» определяют по ГОСТ 14618.0-78.

3.2. Запах и вкус растворов «Ликонтин» определяют органолептически при температуре раствора 40-45 оС.

3.3. Концентрацию водородных ионов определяют по ГОСТ 22567-5-77.

3.4. Определение массовой доли сухого вещества.

3.4.1. Аппаратура, материалы и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Шкаф сушильный с температурой нагрева не менее 110 оС.

Эксикатор 2-250 по ГОСТ 25336-82 с осушителем.

Стаканчик СВ-34/12 по ГОСТ 25336-82.

Песок речной.

Допускается применение аппаратуры с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками, а также реактивы, по качеству не ниже указанных в стандарте.

3.4.2. Подготовка к анализу

Для проведения испытаний готовят речной песок, который промывают водопроводной водой и заливают раствором соляной кислоты на 24 часа. После этого его промывают дистиллированной водой до нейтральной реакции и прокаливают до постоянной массы.

3.4.3. Проведение анализа

В высушенный до постоянной массы стаканчик для взвешивания (бюкс) со стеклянной палочкой помещают навеску речного песка около 12 г. Сюда же помещают навеску раствора «Ликонтин» около 1,5 г. Результаты взвешивания записывают до четвертого десятичного знака. Содержимое стаканчика хорошо перемешивают палочкой, помещают его с открытой крышкой в сушильный шкаф и сушат при температуре (100 ± 2) оС.

По окончании сушки стаканчик с закрытой крышкой переносят в эксикатор и охлаждают. Первое взвешивание проводят после 2 ч высушивания, последующие через каждые 30 мин. Постоянную массу считают достигнутой, если разница между двумя взвешиваниями не превышает 0.002 г.

3.4.4. Обработка результатов

Массовую долю сухого вещества (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} * 100$$

где m₁ – масса стаканчика с песком, г;

m₂ – масса стаканчика с веществом до сушки, г;

m₃ – масса стаканчика с веществом после сушки, г;

За окончательный результат испытания принимают средне арифметическое значение двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми при доверительной вероятности p=0,95 не должно превышать 0.5%.

3.5. Проверку на отсутствие механических примесей проводят с помощью микроскопа с увеличением 36 х .

3.6. Проверку маркировки и упаковки проводят внешним осмотром и сличением с документацией.

3.7. Проверку среднего срока сохраняемости растворов проводят на 50 флаконах в условиях, нормированных настоящими ТУ в соответствии с требованиями РД 50-707-91. После испытания растворы должны соответствовать требованиям п. 1.3.1.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Растворы водно-солевые в пластмассовой упаковке для хранения мягких контактных линз «Ликонтин» должны производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к глазным каплям, приготовленным в асептических условиях («МУ по микробиологическому контролю в аптеках» № 3182-84 от 29.12.84 г.).

4.2. Персонал, участвующий в процессе производства растворов «Ликонтин», должен проходить медицинский осмотр в соответствии с приказом № 555 МЗ СССР.

					ТУ 9318-002-34704936-96	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование растворов «Ликонтин» производят в соответствии с требованиями ГОСТ 27429-87.

Растворы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.2. Условия хранения - I по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества растворов «Ликонтин» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортировки и хранения.

6.2. Гарантийный срок годности растворов «Ликонтин» - не менее 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок хранения раствора «Ликонтин» - 12 месяцев со дня отгрузки со склада.

					ТУ 9318-002-34704936-96	Лист
						9
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к ТУ 9318-002-34704936-96

РЕЦЕПТУРА

На раствор для ежедневной очистки мягких и жёстких контактных линз
«ЛИКОНТИН-С»

Наименование сырья	Массовая доля компонентов, %
Твин-20	0,50
Трилон-Б	0,75
Кислота борная	0,12
Натрий тетраборнокислый	0,05
Натрий хлористый	0,90
Хлоргексидина биглюконат	0,002
Вода	до 100,00

					ТУ 9318-002-34704936-96	Лист
						10
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к ТУ 9318-002-34704936-96

РЕЦЕПТУРА

На универсальный раствор для ежедневной очистки
и хранения мягких контактных линз
«ЛИКОНТИН-УНИВЕРСАЛ»

Наименование сырья	Массовая доля компонентов, %
Натрий хлористый	0,60
Трилон-Б	0,10
Кислота борная	0,12
Натрий тетраборнокислый	0,05
Хлоргексидина биглюконат	0,002
Полиэтиленгликоль-400	2,5
Вода	до 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к ТУ 9318-002-34704936-96

РЕЦЕПТУРА

На раствор для очистки и облегчения ношения
мягких и жёстких контактных линз
«ЛИКОНТИН-КОМФОРТ»

Наименование сырья	Массовая доля компонентов, %
Полиэтиленоксид-300 или Полиэтиленоксид-400	3,00
Трилон-Б	0,10
Натрий хлористый	0,90
Хлоргексидина биглюконат	0,002
Вода	до 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к ТУ 9318-002-34704936-96

ЭТИКЕТКА

На растворы водно-солевые в пластмассовой упаковке для очистки
контактных линз
«ЛИКОНТИН-С»

На этикетке указываются:

Наименование изготовителя

«ЛИКОНТИН-С»

Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для ежедневной очистки
контактных линз
ТУ 9318-002-34704936-96

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ежедневно после снятия линз нанести 3-4 капли раствора «ЛИКОНТИН-С» на
линзу, протереть на ладони и поместить в контейнер с раствором для хранения.

№ партии

Срок годности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к ТУ 9318-002-34704936-96

ЭТИКЕТКА

На растворы водно-солевые в пластмассовой упаковке для очистки
и хранения мягких контактных линз «ЛИКОНТИН-УНИВЕРСАЛ»

На этикетке указываются:

Наименование изготовителя

«ЛИКОНТИН-УНИВЕРСАЛ»

Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для
очистки и хранения мягких контактных линз
ТУ 9318-002-34704936-96

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ежедневно после снятия линз нанести 3-4 капли раствора «ЛИКОНТИН-УНИВЕРСАЛ» на линзу, протереть на ладони и поместить в контейнер с этим же раствором.

Рекомендуется ежедневно заменять раствор «ЛИКОНТИН-УНИВЕРСАЛ» в Вашем контейнере на свежий.

№ партии

Срок годности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к ТУ 9318-002-34704936-96

ЭТИКЕТКА

На раствор для очистки и облегчения ношения
мягких и жёстких контактных линз
«ЛИКОНТИН-КОМФОРТ»

На этикетке указываются:

Наименование изготовителя

«ЛИКОНТИН-КОМФОРТ»

Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для очистки и облегчения
переносимости мягких контактных линз
ТУ 9318-002-34704936-96

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести 1-2 капли раствора «ЛИКОНТИН-КОМФОРТ» на линзу перед
надеванием.

После снятия линз нанести 3-4 капли раствора «ЛИКОНТИН-КОМФОРТ»
на линзу, протереть на ладони и поместить в контейнер с раствором для хранения.

№ партии

Срок годности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к ТУ 9318-002-34704936-96

ПЕРЕЧЕНЬ
документов к техническим условиям, на которые даны
ссылки в настоящих технических условиях

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 14618.0-78	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Правила приёмки, отбор проб и методы органолептических исследований
ГОСТ 22567.5-77	Средства моющие синтетические. Метод определения концентрации водородных ионов
ГОСТ 24104-88	Весы лабораторные общего назначения и образцовые
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные и стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 27429-86	Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ТУ 18-16-451-83	Тара потребительская пластмассовая для парфюмерно-косметической продукции
РД 50-707-91	Изделия медицинской техники. Требования к надёжности. Правила и методы контроля показателей надёжности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, необходимого для контроля

Наименование оборудования	Обозначение, параметры
Шкаф сушильный	Температура нагрева не менее 110 °С
Весы лабораторные	ГОСТ 24104-88
Эксикатор 2-250	ГОСТ 25336-82
Стаканчик СВ-34.12	ГОСТ 25336-82

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]