

ИНСТРУКЦИЯ

по применению и хранению грелки резиновой "Meridian"

Назначение

Грелка предназначена для местного согревания тела и служит многократно.

Применение

Санитария, гигиена - для медицинских учреждений и индивидуального применения.

Чтобы грелка не вызывала ожогов, её заворачивают в полотенце

Дезинфекция

Перед употреблением тщательно промыть грелку горячей проточной водой и продезинфицировать погружением в 3% раствор перекиси водорода или 1% раствор хлорамина при температуре 18°C в течение 30 мин.

Хранение

После применения грелку освобождают от воды. Хранить при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Не подвергать действию прямых солнечных лучей, масел, бензина и других веществ, разрушающих резину.

Дата изготовления - 09.2009

Гарантийный срок хранения - 4 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Производитель:

DGM Фарма-Аппарате Хандель АГ
Баарерштрассе 8, Цуг, Швейцария

Продавец:

ООО "ДГМ Фарма-Аппарате РУС"
121614 Москва, ул. Крылатские Холмы,
д.30, копр.9, тел.: (495) 739-39-49



ИМ08



РУ ФС №2005/271 от 22.02.20

Made in China

ИНСТРУКЦИЯ

по применению и хранению пузыря для льда резинового "Meridian"

Назначение

Предназначен для местного охлаждения тела и служит многократно.

Применение

Санитария, гигиена - для медицинских учреждений и индивидуального применения.

Дезинфекция

Перед употреблением тщательно промыть пузырь горячей проточной водой и продезинфицировать погружением в 3% раствор перекиси водорода или 1% раствор хлорамина при температуре 18°C в течение 30 мин.

Хранение

После применения пузырь освобождают от воды и льда. Хранить при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от электроизлучающих приборов. Не подвергать действию прямых солнечных лучей, масел, бензина и других веществ, разрушающих резину.

Дата изготовления - 09.2009

Гарантийный срок хранения - 4 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Производитель:

ООО "ДГМ Фарма-Аппарате Хандель АГ"
Баарерштрассе 8, Цуг, Швейцария

Продавец:

ООО "ДГМ Фарма-Аппарате РУС"
121614 Москва, ул. Крылатские Холмы,
д.30, копр.9, тел.: (495) 739-39-49



ИМ08



ПУ ФС №2005/271 от 22.02.201

Made in China

ИНСТРУКЦИЯ по применению и хранению грелки комбинированной резиновой (кружки "Эсмарха") "Meridian"

Назначение

Грелка предназначена для промывания и спринцевания и служит многократно.

Применение

Санитария, гигиена - для медицинских учреждений и индивидуального применения.

Чтобы грелка не вызывала ожогов, её заворачивают в полотенце.

Дезинфекция

Перед применением тщательно промыть грелку горячей проточной водой и продезинфицировать погружением в 3% раствор перекиси водорода или 1% раствор хлорамина при температуре 18°C в течение 30 мин. Наконечник поместить в 3% раствор перекиси водорода на 8 мин. После дезинфекции грелку и наконечник промыть проточной водой.

Хранение

После применения грелку освобождают от воды. Хранить при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Не подвергать действию прямых солнечных лучей, масел, бензина и других веществ, разрушающих резину.

Дата изготовления - 09.2009

Гарантийный срок хранения - 4 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Производитель:

DGM Фарма-Аппарате Хандель АГ

Баарерштрассе 8, Цуг, Швейцария

Продавец:

ООО "ДГМ Фарма-Аппарате РУС"

121614 Москва, ул. Крылатские Холмы,

д.30, коп.9, тел.: (495) 739-39-49



ПУ №2005/271 от 22.02.2005

Made in China

Инструкция по использованию грелки комбинированной (кружки "Эсмарха") марки "Meridian"

Использование в качестве грелки для согревания тела:

Наполнить грелку проточной водой на 3/4. Перед закрытием грелки выпустить из нее воздух или поместить на плоскую поверхность до стекания воды у горлышка. Это предотвратит увеличение объема грелки.

Проверить надежность закрытия грелки, перевернув ее вверх дном и сжимая.

Непосредственно перед применением обернуть грелку сухой тканью или полотенцем.

После использования вылить воду из грелки.

Использование для спринцевания:

Наполнить грелку теплой водой и раствором для спринцевания (если необходимо).

Аккуратно присоединить адаптер к грелке и встряхнуть, чтобы удостовериться, что она плотно закрыта.

Надеть зажим для воды на трубку и зажать его.

Надеть один конец трубки на адаптер.

Надеть вагинальную насадку на другой конец трубки.

Подвесить (держат) грелку в метре от влагалища.

Перед использованием по назначению приоткрыть зажим для выпуска воздуха.

Возможные положения для спринцевания:

Использовать в душе, слегка раздвинув ноги;

Использовать в ванне, наклонившись вперед, ноги врозь, слегка согнуты;

Использовать в туалете, в сидячем положении, приподняв бедро.

В любом из предложенных положений осторожно ввести наконечник во влагалище. Открыть зажим для медленного перетекания жидкости.

3. Использование в качестве клизмы:

- Наполнить грелку теплой водой или раствором для клизмы (если необходимо).

- Аккуратно присоединить адаптер к грелке.

- Надеть зажим для воды на трубку и зажать его.

- Надеть один конец трубки на адаптер.

- Надеть насадку для клизмы на другой конец трубки.

- Нанести смазочное средство на насадку.

- Подвесить (держат) грелку в метре от ягодиц.

- Перед использованием по назначению приоткрыть зажим для выпуска воздуха.

- Возможные положения:

1) использовать в ванне, наклонившись вперед, слегка согнуть ноги в коленях;

2) использовать в туалете, сидя на унитазе, немного нагнувшись вперед.

- В любом из перечисленных положений ввести смазанную наконечник в прямую кишку. Открыть зажим для медленного перетекания жидкости.

Меры предосторожности:

- Не использовать кипяток или крепкие химические растворы.

- Не помещать грелку на горячий радиатор или горячую

металлическую поверхность.

- Избегать контакта грелки с маслами или другими веществами способными разъедать резину. Если контакт неизбежен, бы промыть грелку водой с мылом. После использования подвесить горлышком вниз для просыхания.

- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

- Внимательно осмотреть грелку перед каждым применением.

- Хранить в сухом прохладном месте.

