

УТВЕРЖДЕНА

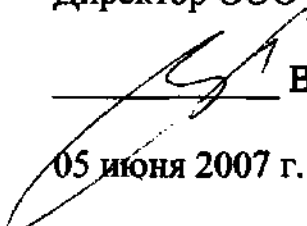
«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

от

№


В.П. Гнатюк

05 июня 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения

Раствор для облегчения ношения мягких, жёстких и
гибких контактных линз всех типов
«ЛИКОНТИН-КОМФОРТ-НЕО»
ТУ 9398-007-34704936-2007

Назначение изделия: Раствор для облегчения ношения мягких, жёстких и гибких контактных линз всех типов «ЛИКОНТИН-КОМФОРТ-НЕО» предназначен для повседневного ухода за мягкими, гибкими и жёсткими контактными линзами всех типов.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор «ЛИКОНТИН-КОМФОРТ-НЕО» облегчает ношение мягких, жёстких и гибких контактных линз всех типов, смазывая и увлажняя их поверхность.

Для повышения комфортности ношения контактных линз перед надеванием нанесите 1-3 капли раствора «ЛИКОНТИН-КОМФОРТ-НЕО» на линзу.

Если дискомфорт не исчезает - проконсультируйтесь с Вашим офтальмологом.

Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев.