

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от

№

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

В.П. Гнатюк

20 апреля 2007 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**изделия медицинского назначения**

**Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для очистки**  
**и хранения мягких контактных линз «Ликонтин-Универсал»**  
**ТУ 9318-002-34704936-96**

Назначение изделия: Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для очистки и хранения мягких контактных линз «Ликонтин-Универсал» предназначен для ежедневной очистки и хранения мягких контактных линз, применяется в процессе их изготовления, а также для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор предназначен для хранения, ежедневной очистки и промывания мягких контактных линз всех типов.

Он обеспечивает надёжную защиту линз от воздействия микрофлоры, препятствует отложению загрязнений. «Ликонтин-Универсал» увлажняет и смазывает поверхность линзы, повышая комфортность пользования линзами.

Ежедневно после снятия линз нанесите 3-4 капли раствора «Ликонтин-Универсал» на линзу и аккуратно протрите на ладони пальцем в течение 10-30 секунд.

Сполосните Ваши линзы в растворе «Ликонтин-Универсал» и поместите их для хранения в контейнер со свежим раствором «Ликонтин-Универсал».

Рекомендуется ежедневно заменять раствор в Вашем контейнере на свежий.

Раствор «Ликонтин-Универсал» может применяться для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев.