

Инструкция по эксплуатации

Кресло-каталка

(ИМКР-1, ИМКР-2, ИМКР-3, ИМКР-4, ИМКР-5, ИМКР-6, ИМКР-7)

Кресло-каталка предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной и полной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Передвижение возможно только при наличии сопровождающего лица.

При посадке больного в кресло-каталку и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоз. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке больного должны быть откинuty в стороны.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

Подготовка кресла-каталки к эксплуатации

Освободить кресло-каталку от упаковки.

Установить кресло-каталку на колеса и зафиксировать их.

Установить подлокотники и подножки (ИМКР-4, ИМКР-6).

Протереть изделие теплой водой с моющими средствами.

а) Опоры для ног.

Кресло-каталка (ИМКР-4, ИМКР-6) комплектуется съемными опорами.

Для установки опор на кресло-каталку необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины подножек производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

б) Спинка и сиденье.

Спинка и сиденье жестко закреплены на раме.

Обивка сиденья и спинки – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой.

Спинка ортопедическая (ИМКР-6)

Спинка с подголовником (ИМКР-1, ИМКР-2)

в) Тормоза.

Задние колеса кресла-каталки снабжены тормозами.

г) Колеса.

Кресло-каталка комплектуется колесами, колеса диаметром 125мм, с ободами из антистатической резины, не оставляющей следов на полу. Два колеса имеют тормозное устройство.

д) Подлокотники.

Обивка подлокотников – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию

дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой

Подлокотники не съемные (ИМКР-1, ИМКР-2, ИМКР-3, ИМКР-5, ИМКР-7); съемные, регулируемые по высоте (ИМКР-4, ИМКР-6).

е) Рама:

Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Максимальная нагрузка не более 150кг

Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-каталка требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья, спинки и подлокотников из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1% раствором хлорамина.

Механизм складывания (опоры для ног, подлокотники) необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Требования безопасности

Запрещается эксплуатировать кресло-каталку, установленное на наклонной поверхности, а также при различной высоте ножек.

Запрещается эксплуатировать кресло-каталку с незакрепленными деталями.

Эксплуатация кресла-каталки допускается при температуре от +10°C до +40°C.

Транспортировка и хранение

Транспортировка возможна любыми видами крытого транспорта. При транспортировке изделие должно быть надежно закреплено во избежание перемещения и повреждения.

Хранение необходимо производить в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия хранения 1 и 2 по ГОСТ Р 15150).

Изготовитель: ООО «ПКФ ИРТЭКС», РОССИЯ

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-каталок требованиям нормативных документов. (ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ Р 16371-93, ГОСТ 19917-93) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Генеральный директор



Столбовая И.Р.



примено
и сиреню

целом
в пер. в 2 кн



пер. 1-й
Станция 1-й