

3.05) описание аппарата для суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД с принадлежностями в исполнении custo flash cor-3/ cor-12.

Комплект поставки


- аппарат для суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД в исполнении custo cor-3/ custo cor-12
- флеш-карта для записи файлов суточной записи ЭКГ и хранения данных
- Флеш-карта для защиты программного обеспечения от нелегального использования (USB ключ)
- Одноразовый электрод
- Набор принадлежностей для custo flash 220, custo cor-3, custo cor-12 (устройство с USB-интерфейсом для считывания данных с Flash-карты, карта Bluetooth)
- ПО для анализа записи многосуточной ЭКГ на CD диске custom tera professional
- Ремень шейный
- Сумочки гигиенические одноразовые для аппарата для суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД
- Чехол из неопрена для аппарата для суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД



Обращение с устройством

Открывание и закрывание отсека батарейки

Для открывания или закрывания верхней крышки отсека батарейки требуется монета или аналогичный инструмент. Вставьте монету и поверните на четверть оборота против часовой стрелки.

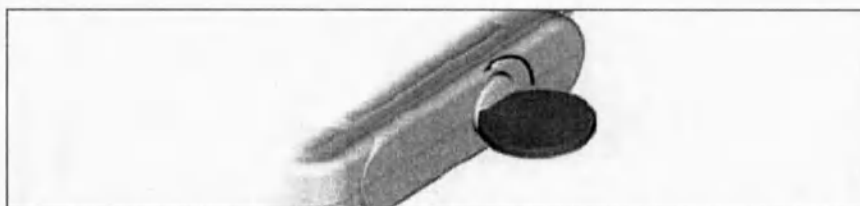

Чтобы закрыть устройство, установите верхнюю крышку отсека аккумуляторной батарейки (стопорный болт в вертикальной позиции) на корпус и сделайте четверть оборота монеткой по часовой стрелке. Будет заметно срабатывание стопорного болта.