

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

от

№

В.П. Гнатюк

05 июня 2007 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения**

**Многофункциональный раствор для ухода за мягкими и
гибкими контактными линзами
«ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ»
ТУ 9398-007-34704936-2007**

Назначение изделия: Многофункциональный раствор для ухода за мягкими и гибкими контактными линзами «ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ» предназначен для хранения и повседневного ухода за мягкими, гибкими и жёсткими контактными линзами всех типов, может применяться в процессе их изготовления, а также для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор предназначен для ухода за мягкими и гибкими контактными линзами всех типов.

Он обеспечивает надёжную защиту линз от воздействия микрофлоры, препятствует отложению загрязнений. «ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ» увлажняет и смазывает поверхность линзы, повышая комфортность пользования линзами.

Ежедневно после снятия линз нанести 3-4 капли раствора ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ на линзу, протереть на ладони, промыть этим же раствором и поместить в контейнер со свежим раствором ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ.

При использовании многофункциональный раствор для ухода за мягкими и гибкими контактными линзами ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ не требуется применение ферментных очистителей для удаления белков и протеинов.

Рекомендуется ежедневно заменять раствор ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ в Вашем контейнере на свежий.

Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев.