

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от

№

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

В.П. Гнатюк

20 апреля 2007 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения**

**Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для хранения
мягких контактных линз «ЛИКОСОЛ»
ТУ 9318-001-34704936-96**

Назначение изделия: Раствор водно-солевой в пластмассовой упаковке для хранения мягких контактных линз «ЛИКОСОЛ» предназначен для хранения мягких контактных линз, применяется в процессе их изготовления, а также для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Областью применения настоящего продукта является офтальмология (контактная коррекция зрения).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Раствор предназначен для хранения, промывания и тепловой обработки мягких контактных линз. Обеспечивает надёжную защиту линз от воздействия микрофлоры, препятствует отложению загрязнений, способствует лучшей переносимости линз.

Промойте Ваши линзы в растворе «ЛИКОСОЛ» после снятия или очистки и поместите их для хранения в контейнер со свежим раствором «ЛИКОСОЛ».

Рекомендуется ежедневно заменять раствор «ЛИКОСОЛ» в Вашем контейнере на свежий.

Раствор «ЛИКОСОЛ» может применяться для разбавления сухих или жидких составов для обработки контактных линз.

Хранить при комнатной температуре. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев.