

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации-
заявителя ООО «Медтэк Центр»
Щербина И.В.

«13» апреля 2010



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Медицинский аппарат «Ауга» для ангиотермографии в диагностике заболеваний молочной железы.



Идентификационные данные

01

1.2 - Идентификационные данные изделия

Аппарат является электротерапевтическим медицинским прибором.

Издание соответствует требованиям Дир. 93/42/CEE

Приложение II.

Модель:	Аппа
Версия:	55010A0
Категория прибора:	A2
Производитель:	GIMA S.p.A

GIMA S.p.A
Via Kennedy, 17
40069 - ZOLA PREDOSA
BOLOGNA - ITALIA (ИТАЛИЯ)

03

Назначение для использования

Прибор AURA позволяет проводить диагностику молочной железы с помощью метода денситометрической ангиотермографии.

Этот вид исследования не является заменителем маммографии и предназначен для повышения точности при диагностике маммологических заболеваний. Этот метод не является инвазивным и может применяться при обследовании женщин всех возрастов; он может регулярно повторяться, не вызывает болевых ощущений и не сопряжен с какими-либо рисками.

Прибор AURA является действительно перспективным диагностическим инструментом, который может применяться также при обследовании молодых пациенток с высокой плотностью молочной железы, а также в профилактических обследованиях.

03

3.2.4 - Подготовка прибора к работе


После удаления оболочки и соответствующих защитных элементов установите прибор на предусмотренном рабочем месте. На нем должна быть розетка переменного тока, а поверхность должна быть абсолютно устойчивой. Кроме того, положение прибора должно обеспечивать его удобное использование.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Подсоедините кабель питания (см. упаковку) ко входному разъему переменного тока (12) и к электрической розетке. Нажмите тумблер (Т) для включения прибора. Убедитесь, что загорелся индикатор (L1), установленный на держателе пластины (8).



Индикатор зарядки
КРАСНЫЙ свет зарядки
ЗВЕНЬЯТ: зарядка аккумулятора
ОРАНЖЕВЫЙ: батарея разряжена
(время зарядки около 3 часов 30 минут)

0% 100%

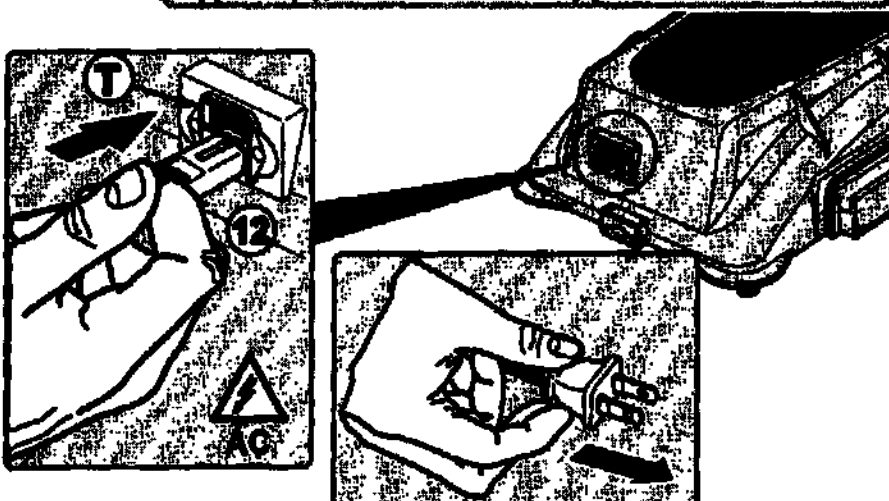

03

Убедитесь, что рукоятка (3) правильно установлена в гнездо блока зарядки (2) и закреплена специальным фиксатором как показано на рисунке.

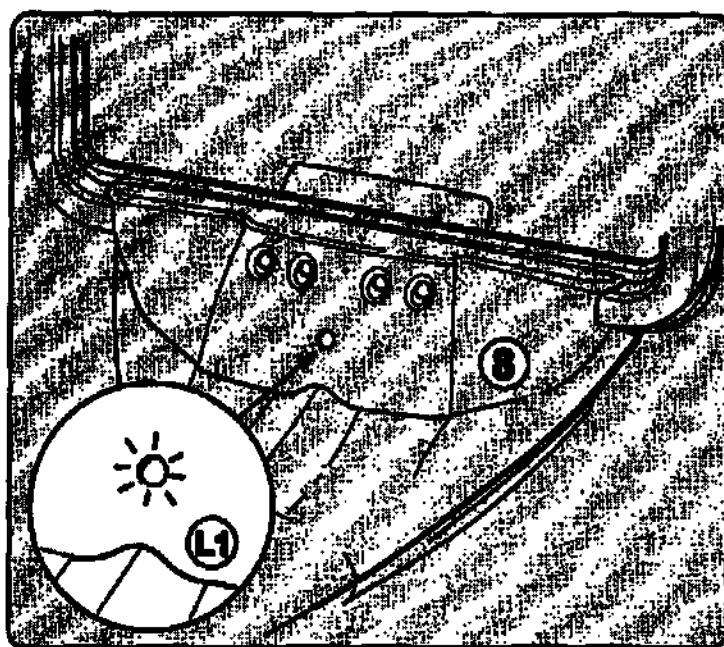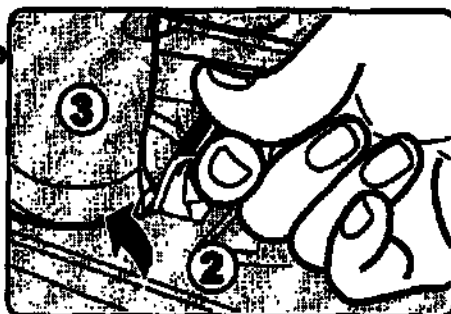


03

Назначение для использования


УСТАНОВКА ПЛАСТИНЫ

Возьмите пластину (5) и установите ее на опоре (8) в соответствии с магнитами (M).
Убедитесь в правильности установки пластины на опоре.
В противном случае повторите операцию.

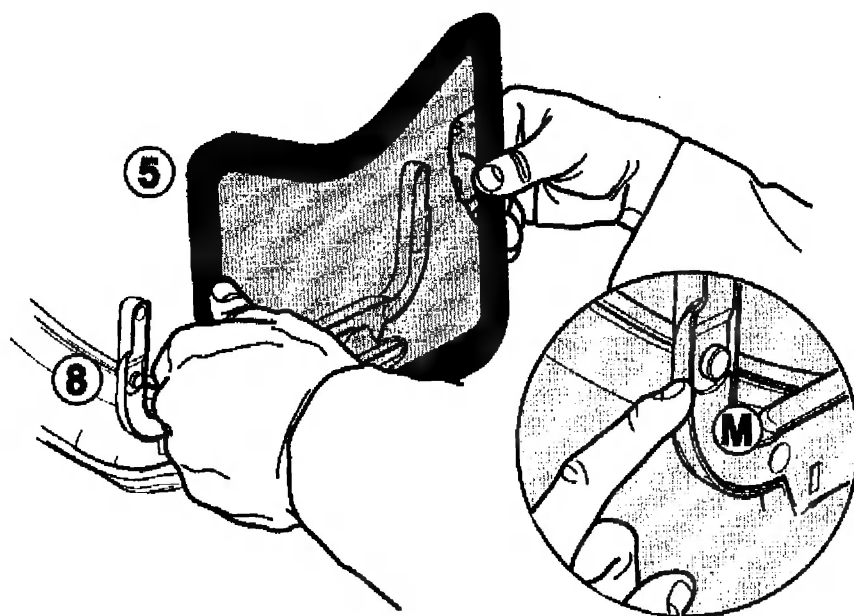

Назначение для использования

00

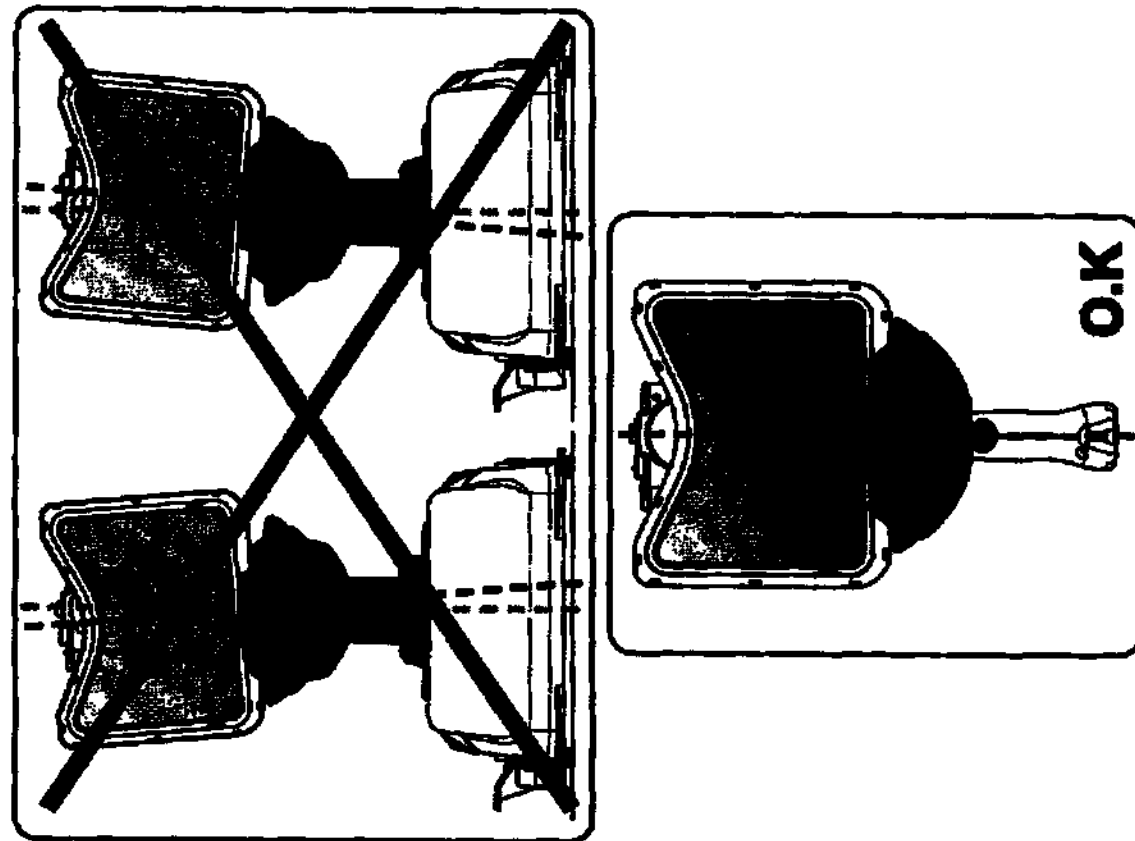


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГИОТЕРМОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ

Как во время использования пластины, так и по окончании диагностики необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.

Ангиотермографическая пластина состоит из тонкой и жесткой рамки, удерживающей очень тонкий лист из пластического материала, на который нанесен слой черной краски и слой жидких кристаллов холестерина. Суммарная толщина составляет несколько сотых миллиметра.

Таким образом, пластина способна быстро воспринимать тепло кожи и так же быстро охлаждаться, возвращаясь в первоначальное состояние.

Во избежание возможных повреждений рекомендуется по окончании работы поместить пластину в специальный отсек, находящийся в основании прибора, как показано на

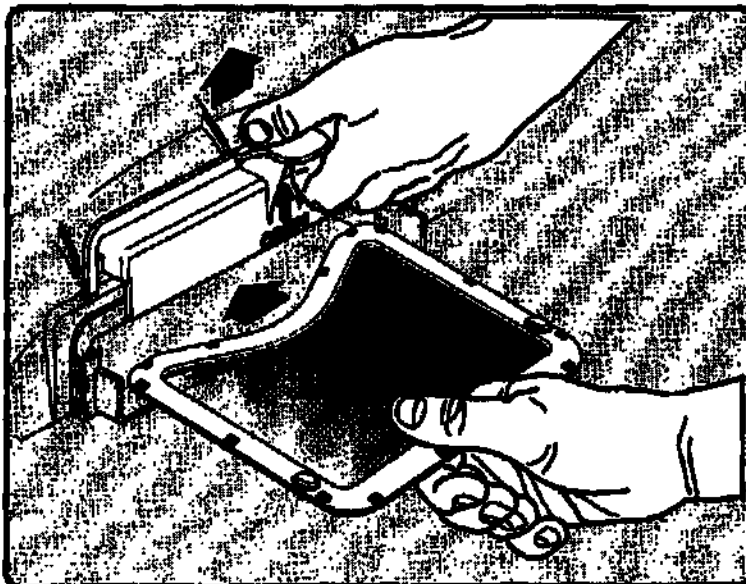

03

1.3 - Противопоказания

Это метод не является радиологическим, поэтому может использоваться для диагностики беременных.

Полученное изображение является необращенным большей "эмкостью", но без новых сосудов, по окончании беременности и акрирования изображение возвращается к первоначальному виду.

Это послужит основой для проведения скрининга связанных с беременностью новообразований молочной железы, проведение которого в других условиях затруднено.

Маммологическая радиотерапия после рака молочной железы препятствует проведению правильной диагностики остаточной патологией (для оценки возможных остаточных рецидивов) в течение не менее 6 месяцев, поскольку отек и воспалительный процесс, вызванный радиотерапией, скрывают наличие новых опухолевых сосудов.

Крем

Эхографический гель

Не зависит от фазы менструального цикла.


4.0 - Правила пользования

4.0.1 - Описание прибора

После извлечения прибора и соответствующих принадлежностей установите его в предварительно подготовленном месте.


Прибор AURA состоит из следующих узлов:


- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 - ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ | 12 - РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ |
| 2 - БЛОК ЗАРЯДКИ | ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| 3 - РУКОЯТКА В СБОРЕ | 13 - РАЗЪЕМ USB |
| 4 - БЛОК БАТАРЕЙ | 14 - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ |
| 5 - КОНСОЛЬ В СБОРЕ | ВЕНТИЛЯТОРА |
| 6 - ВЕНТИЛЯТОР | 15 - КНОПКА |
| 7 - СУППОРТ | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО |
| 8 - ПЛАСТИНА В СБОРЕ | ВКЛЮЧЕНИЯ |
| 9 - ПЛАСТИНА | ИНДИКАТОРОВ |
| 10 - ФОТОКАМЕРА | |
| 11 - ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛАСТИН | |

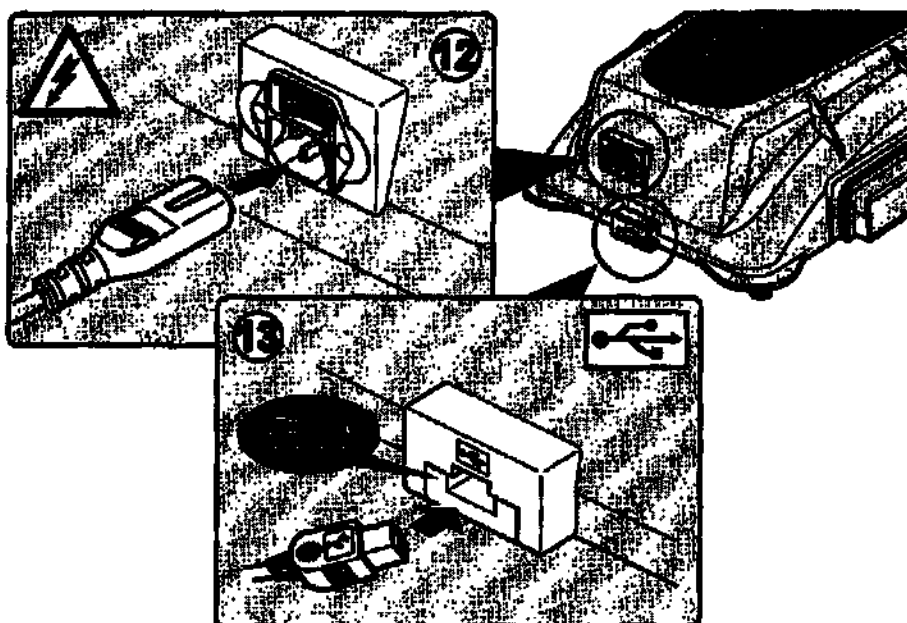

Правила пользования


04

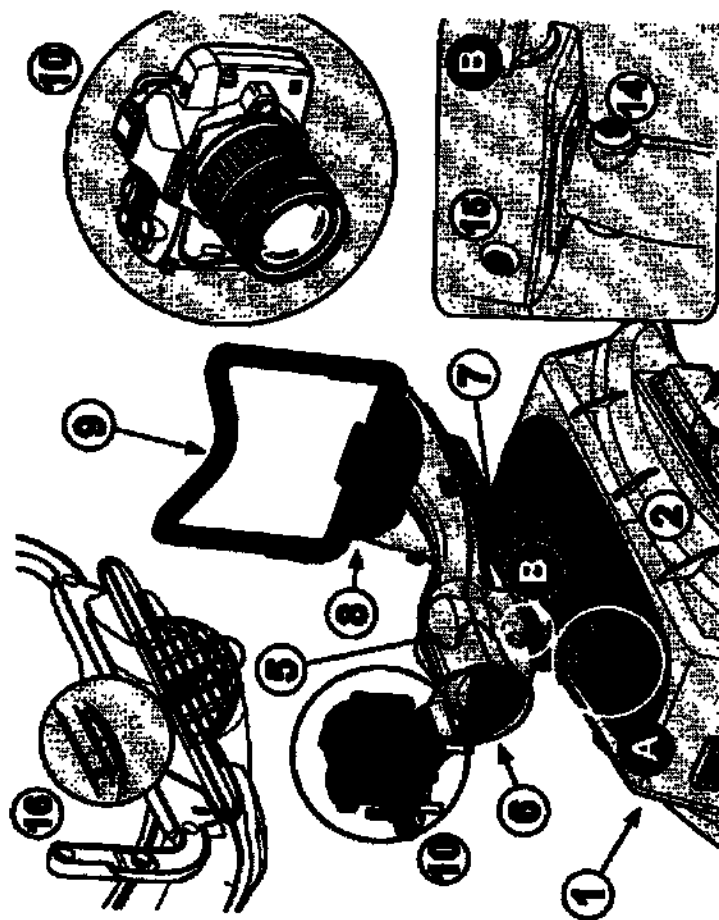

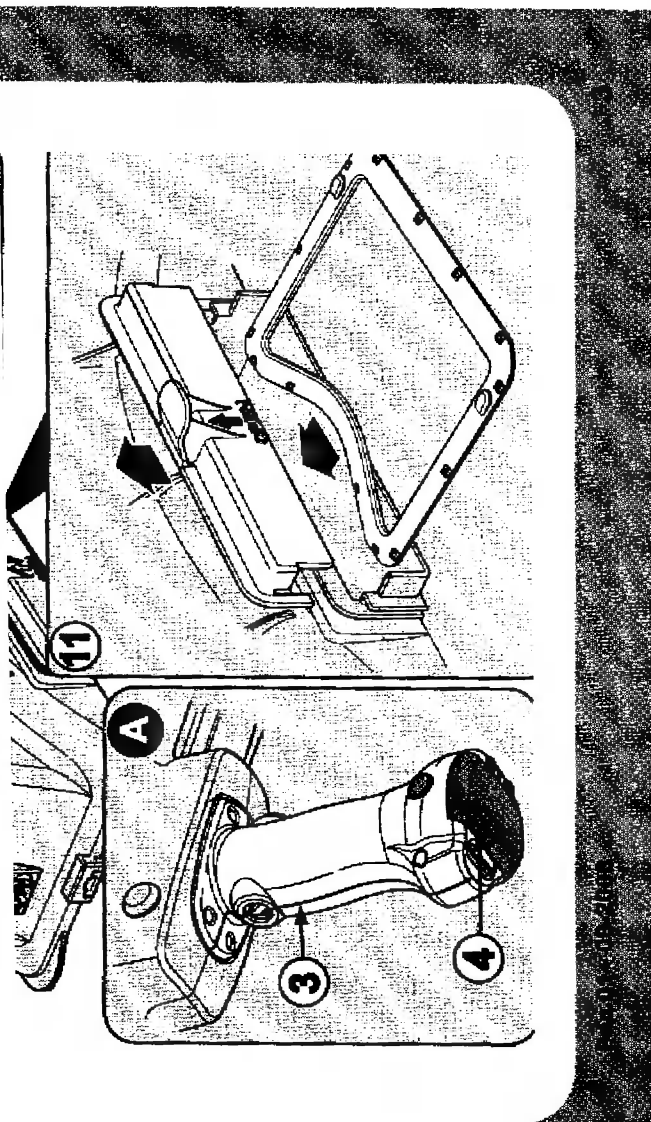


4.9 - Последовательность операций

После установки прибора, как указано в главе "03 - Установка", и, прежде чем приступить к использованию DATG, необходимо осуществить следующие операции по контролю. Убедитесь, что индикатор (L1) (см. "3.2.4 - Подготовка прибора к работе") светится зеленым светом. Убедитесь, что пластина (9) правильно установлена на суппорте, а ее тип соответствует требуемому (отображающая способность). Проверьте ориентацию фотокамеры (10) относительно пластины ("копировальца"). В случае необходимости выполните регулировку с помощью блокировочных винтов (V), расположенных в нижней части суппорта, используя специальный ключ (см. комплект упаковки). Ослабьте их в меру необходимости для позиционирования фотокамеры по отношению к пластине.

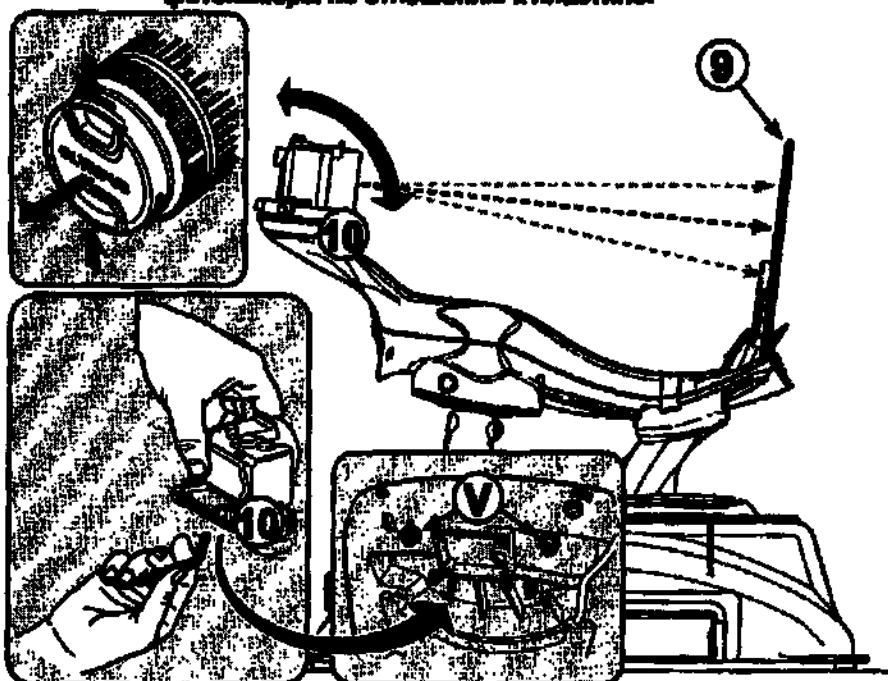

Регулировка должна осуществляться таким образом, чтобы область съемки включала как зону пластины, так и находящиеся под ней индикаторы, как показано на рисунке пунктирными линиями.

По окончании установки снова затяните винты (V). После этого можно снять крышку объектива и приступить к диагностике.

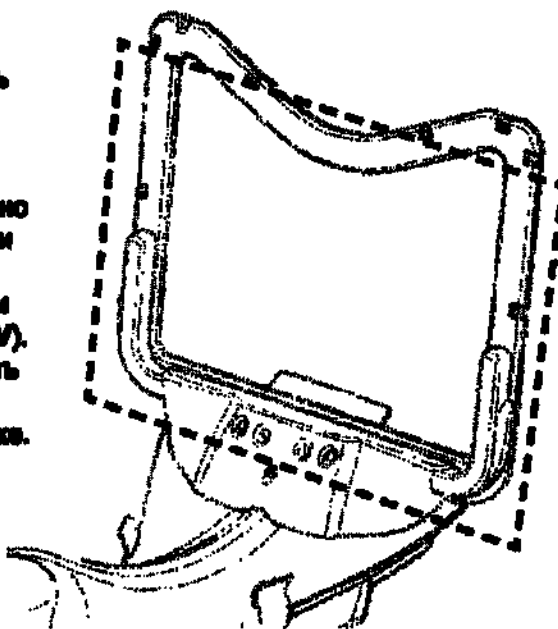

Коллимация представляет из себя регулировку угла фотокамеры относительно пластины или, точнее, регулировку поля фотокамеры относительно зоны съемки.

Производится при сборке производителями.

Регулировочные винты (V), находящиеся в нижней части суппорта, после регулировки закручиваются и блокируются краской.

Возможна ситуация, когда по причине приработки, расширения из-за перепадов температуры и т.д. коллимация нарушается и, значит, должна быть восстановлена.

Правила пользования

Освободите консоль, разблокировав стопор, затем отсоедините ее от блока зарядки и переместите в меру необходимости, ориентируя в установленной зоне (см. "4.0.1 - Определение зоны").

Нажмите кнопку (14) для запуска охлаждающего вентилятора на установленное время.

По достижении необходимых условий нажмите кнопку (15) для получения первой фотографии.

Ее получение сигнализируется загоранием индикатора (L2).

Затем сделайте вторую фотографию; в этом случае она сигнализируется загоранием индикатора (L3).

Каждый раз при получении фотографии соответствующий индикатор гаснет.

Это позволяет оператору контролировать последовательность фотографий (см. Разд. "4.1.1 - Определение зоны")

По окончании операций установите консоль на место, вставив рукоятку в гнездо, а переднюю часть - в суппорт; закрепите консоль с помощью стопора.

Снимите пластину с суппорта и поместите ее в отсек для хранения пластин.

* ОТОБРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Жидкие кристаллы, инкапсулированные промышленным способом, имеют различную чувствительность, поэтому реагируют на полученное тепло (от красного до фиолетового) в соответствии с различными диапазонами значений.


По этой причине пластины имеют различную отображающую способность.

Следовательно, необходимо подготовить пластины, тарированные различными способами.

В обязанности оператора входит периодический выбор пластины, наиболее пригодной для конкретной диагностики.

Правила пользования

04

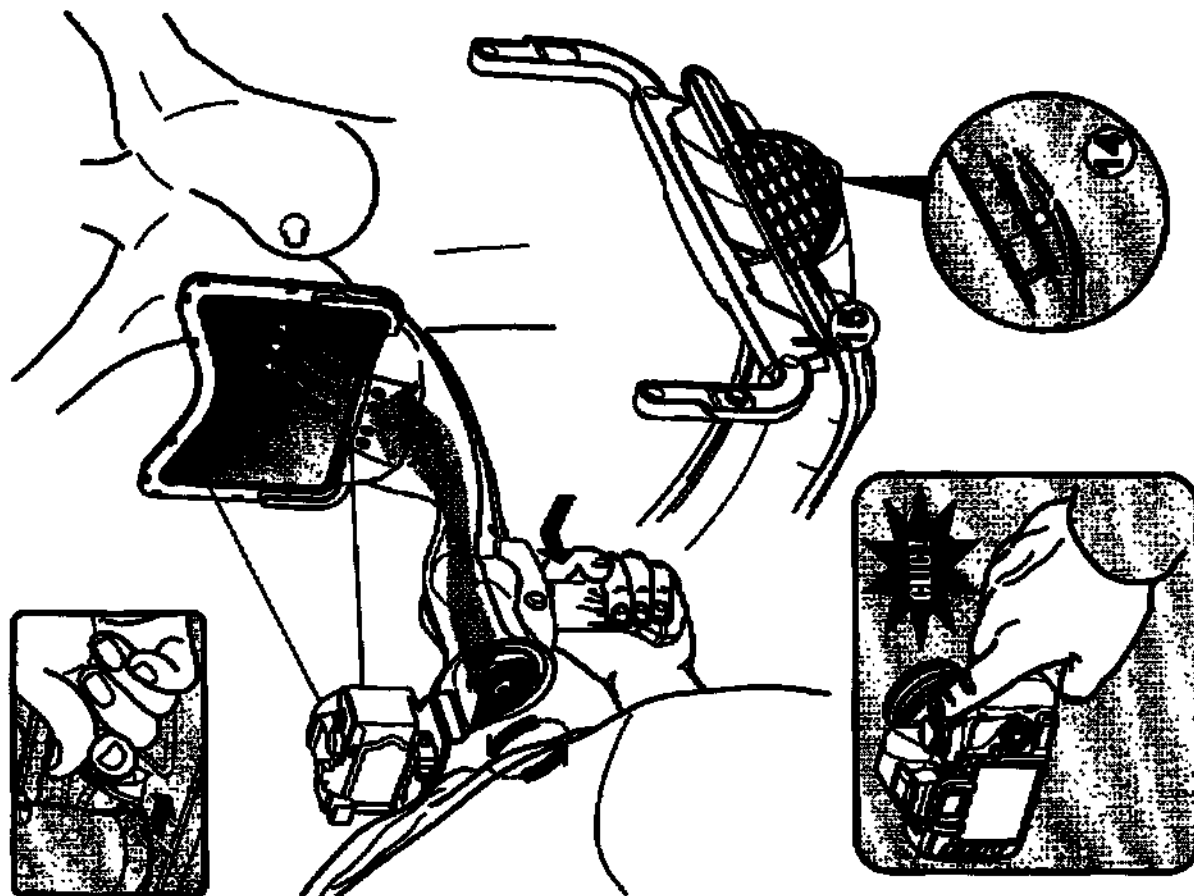


4.1.1 - Определение зоны

Группа индикаторов, имеющихся на опоре пластины, позволяет установить, посредством их загорания, очередность фотографий четырех зон груди. Каждому индикатору соответствует одна из зон правой и левой груди.

Ниже указаны соответствия четырех зонам груди.

- L2 - ЛЕВАЯ ГРУДЬ СБОКУ (LSX)
- L3 - ЛЕВАЯ ГРУДЬ СПЕРЕДИ (LSX)
- L4 - ПРАВАЯ ГРУДЬ СБОКУ (LDX)
- L5 - ПРАВАЯ ГРУДЬ СПЕРЕДИ (LDX)

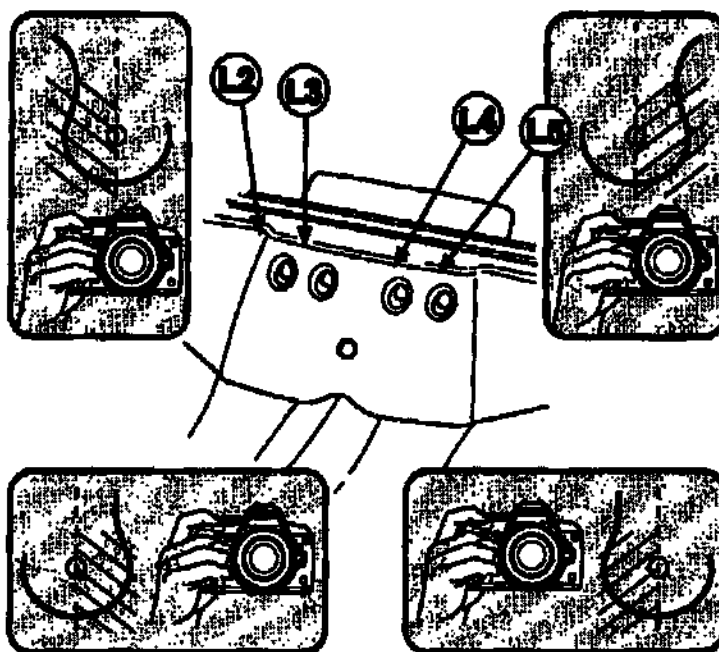

4.2 - Процедура повторного использования

По окончании работы необходимо осуществить операции по поддержанию прибора в состоянии, которое позволит его повторное использование с полной эффективностью. Особое внимание необходимо уделять порядку, в котором оператор должен:

- а) контролировать целостность прибора и его составных частей (кабель питания, устанавливаемые или извлекаемые под напряжением детали и т.д.)
- б) чистить прибор и устанавливаемые на нем детали.


В случае длительного простоя необходимо отсоединить кабель переменного тока от электросети и от самого прибора (см. Разд. "3.2.4 - Подготовка прибора к работе" - **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ**).

Затем поместите прибор в сухое и изолированное место во избежание получения им повреждений.

Накройте прибор чехлом или подобным материалом.

6.0 - Технические данные

6.0.1 - Общие требования

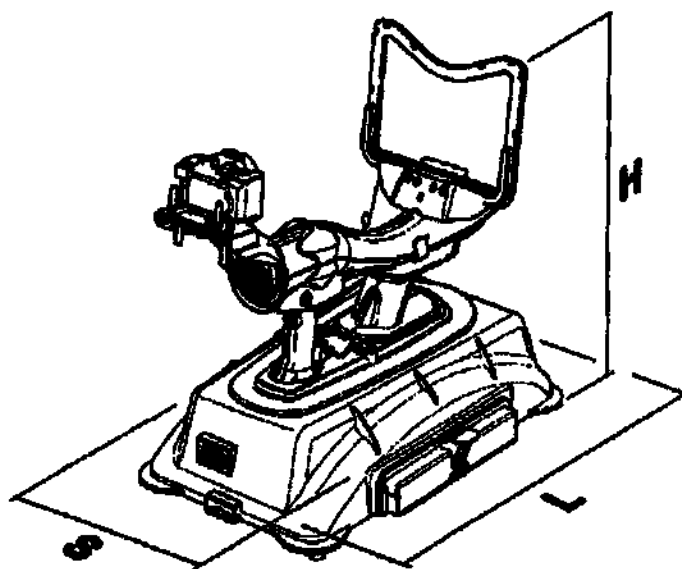

ДАННЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ
ПИТАНИЕ	
БАТАРЕИ	НН-МН 750 мАч 12 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ	
РАЗМЕРЫ	___ (Д) X ___ (В) X ___ (Ш)
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС	кг
РАБ. ТЕМПЕРАТУРА	°C
ТЕМП. ХРАНЕНИЯ	
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	
КЛАСС ПРИБОРА	A2
КЛАСС ЗАЩИТЫ	



Доктор Даниеле Монтрукколи

Онколог, Маммолог.

Специализация по Онкологии в университете Sud-Institute Gustave Rousse – Villejuif в Париже.

Руководитель отделения диагностики маммологии Женевской организации по образованию и исследованиям.

Профессор онкологии Римского университета Сапиенца.

Уважаемые коллеги,

Представляю Вашему вниманию принципиально новую методику ранней диагностики и профилактики рака молочной железы ДИНАМИЧЕСКУЮ АНГИОТЕРМОГРАФИЮ (ДАТГ)

На протяжении 25 лет велись клинические наблюдения совместно с профессором Джан Карло Монтрукколи, который являлся действительным членом Международной Федерации Акушерства и Гинекологии (F.I.G.O.), а так же членом экспертной группы Международной Ассоциации Маммологов (S.I.S)

С 1975 года по настоящее время данная методика была применена в клинических условиях на более чем 7000 пациентах с различными заболеваниями молочной железы. 1200 пациентам, по показаниям, было проведено хирургическое лечение: биопсия, резекция железы. Полученные результаты были опубликованы во многих научных изданиях, а так же использованы в докладах на международных симпозиумах по проблемам рака молочной железы.

Данная методика ранней диагностики рака молочной железы входит в учебную программу медицинских факультетов в университетах Италии, одним из которых является Римский университет Сапиенца.

ДАТГ входит в категорию контактной термографии, методологически принципиально отличается от этого метода. ДАТГ была создана и усовершенствована в тесном сотрудничестве с факультетом биофизики Болонского университета.

Методика исследования сертифицирована и утверждена Международным Научным Обществом (International Classification of Diseases ver.2002)

ДАТГ является интегрированным исследованием с современными методами диагностики как маммография, ультразвуковая диагностика, томография в том числе для диагностики опухолей у молодых женщин, включая и выявление долевой неоплазии.

С наилучшими пожеланиями Даниеле Монтрукколи

Описание методики Динамической Ангиотермографии (ДАТГ)

Для проведения динамической ангиотермографии создан медицинский аппарат Аура, состоящий из корпуса, цифровой камеры, охлаждающей установки, компьютера со специальным программным обеспечением АУРА СОФТ и пластины размером 18х24 см.


Рабочая основа динамической ангиотермографии (ДАТГ) представляет собой пластину, покрытую очень тонким натянутым слоем специального покрытия, содержащего жидкие кристаллы. Молекулярная структура кристаллов позво-

ляет им преломлять внешний рассеянный свет в красно-фиолетовом спектре в зависимости от тепла, обнаруженного специальным покрытием при наложении на молочную железу. Изображение, появляющееся на пластине, выглядит в виде линий кровотока (flowlines) толщиной в несколько миллиметров, которые уже на начальном этапе указывают на изменения характеристики тока крови в нижележащих тканях. Данное изображение в автоматическом режиме поступает в

электронную базу данных для дальнейшей интерпретации. Программное обеспечение Аура софт архивирует в базе данных клинические карты пациентов и позволяет проводить тематические конференции в он-лайн режиме с коллегами по всему миру. Подкреплённые многолетними клиническими исследованиями данные позволяют утверждать, что методика ДАТГ не только диагностирует рак молочной железы, но и показывает доинвазивные изменения в молочной железе.

Преимущества методики ДАТГ

- Специфичность 96%.
- Неинвазивность и безболезненность.
- Отсутствие лучевой нагрузки.
- Эффективность и надежность.
- Скрининговое обследование.
- Разрешено применение в любой возрастной группе (младше 30 лет).
- Динамическое профилактическое наблюдение

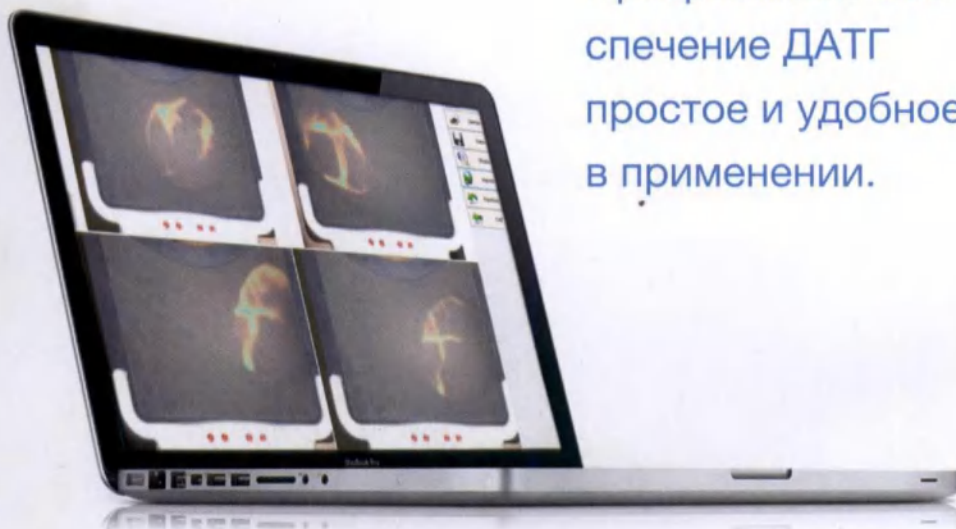

Программное обеспечение ДАТГ простое и удобное в применении.



Пластина Динамического ангиотермографа

Цифровая фотокамера

Воздушное охлаждение

Модель Аура

Dynamic
Angiothermography

Обязательна
специализация по
диагностике ДАТГ

Процедура диагностики при
помощи ДАТГ технологии



Три основные характеристики в диагностическом изображении при помощи ДАТГ

- У каждой женщины свой абсолютно индивидуальный узор линий кровотока (аналогично отпечаткам пальцев).
- В отсутствии патофизиологических изменений эта картина остается не изменной на протяжении всей жизни.
- Патологические изменения остаются независимыми от размера опухоли.

Больная А.

ДАТГ диагностика при отсутствии патологии в течении 25 лет наблюдения.

Осмотр №1 Норма 14.03.1978



Осмотр №2 Норма 27.11.2003



- При отсутствии патологии изображение остается неизменным на протяжении всей жизни.

Больная Б.

ДАТГ диагностика лобулярной карциномы.

Осмотр №1 Норма 02.04.1985



Осмотр №2 патология 18.09.1986




- Две линии кровотока наружной артерии молочной железы (белые стрелки) остаются неизменными.
- Через 15 месяцев наблюдаем исчезновение второй линии кровотока наружной молочной железы (желтая стрелка), формирование новой линии кровотока (красная стрелка) совместно с подмышечной артерией.
- Новая линия кровотока 12-15 см (красная стрелка) сформирована для питания опухоли размером всего в 1 мм.

Рак



Правая молочная железа

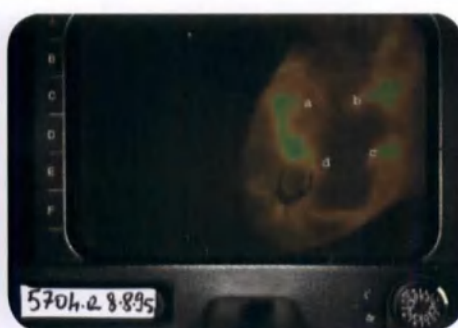

Левая молочная железа

Рак левой молочной железы




Правая молочная железа




Левая молочная железа

Рак правой молочной железы


Стадии развития ангиогенеза от нормы до рака

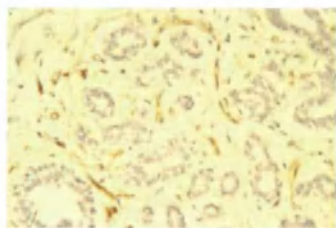


Норма

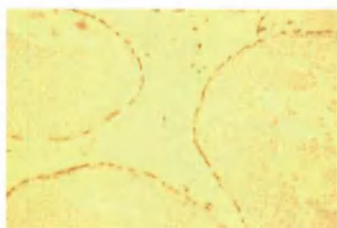

Гиперплазия

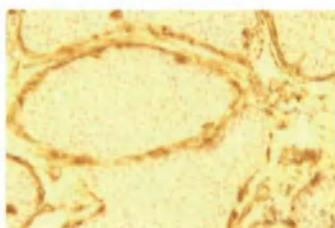

Рак in situ

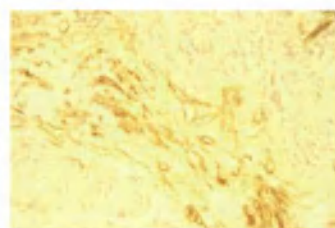

Инвазивный рак

- Новые, сформировавшиеся сосуды разрастаются по мере прогрессирования заболевания.
- Международная научная литература подтверждает ключевую роль в образовании новых сосудов (ангиогенеза) в самом на-

чале новообразований молочной железы.

- Динамическая ангиотермография является единственной методикой, позволяющей обнаружить функциональные токи крови, связанные с ангиогенезом до формирования опухоли.

Семиотика

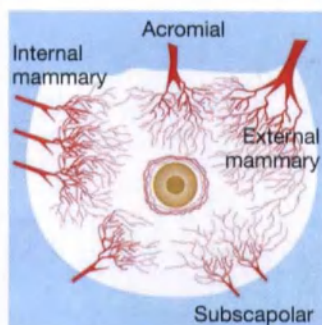



Схема анатомии сосудов левой молочной железы

Артерии, входящие в молочную железу, разветвляются.




Проекция артерий молочной железы на кожные покровы.

Сосуды при разветвлении, утончаются, теряя таким образом тепло, поэтому при наложении пластины ДАТГ на молочную железу получаем изображение линий кровотока законченными и утонченными в конце.

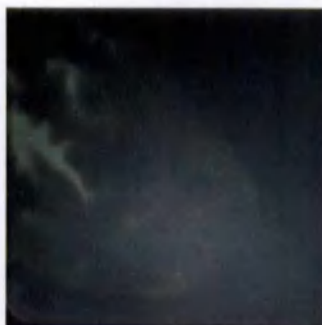

Наружная артерия молочной железы в норме.

Линии кровотока, видимые при помощи ДАТГ, имеют вид законченной, постепенно утончающейся линии.

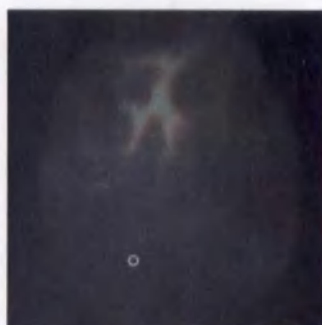


Подмышечная артерия в норме.

Линии кровотока должны быть направлены к центру молочной железы и оставаться в этих пределах. Длина линий в обеих молочных железах пропорциональна.



Линии кровотока при смешанной карциноме.

В наружном квадрате левой молочной железы наблюдаем линию кровотока, которая заканчивается без характерного постепенного утончения. На данном снимке наблюдается активация новой микроциркуляции, необходимой для питания смешанной лобулярной и интрадуктальной карциномы.

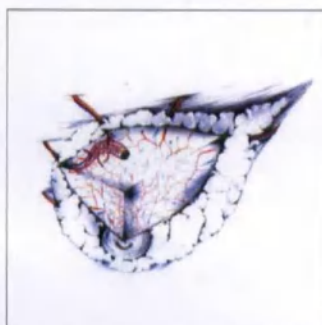

Динамическая ангиотермография

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно выявляется около 1 млн. новых случаев рака молочной железы. Число погибавших от этого заболевания составляет приблизительно половину от общего количества заболевших. За последние годы рак молочной железы значительно помолодел. Статистика неумолимо констатирует развитие данной патологии в возрасте до 30 лет. Накопленный в настоящее время опыт по борьбе с раком молочной железы свидетельствует о том, что важным мероприятием, обеспечивающим раннее выявление рака молочной железы, является систематический (не реже одного раза в год) профилактический осмотр женщин с применением методов, приемлемых для обследования большого числа лиц.

Одной из причин является наследственность. Это связано с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, которые передаются от матери к дочери при рождении. При трансформации нормальной клетки в опухолевую повышается выработка протеина VEGF (Vascular epithelial grow factor), а его выброс из клетки провоцирует неопластический процесс. Предлагаемая инновационная технология DATG фиксирует изображение сосудистых линий кровотока в молочной железе и, в отличие от контактной термографии, не измеряя тепло, изучаемое тканями молочной железы, позволяет с высокой точностью на самых ранних стадиях канцерогенеза выявить развитие нового сосудистого пучка. Получаемые с помощью DATG изображения на высокочувствительных жидкокристаллических пластинах, имеют четкие контуры, и интерпретируются для оценки функционального состояния кровотока в молочной железе. Данная методика даст строго индивидуальное для каждой женщины изображение, которое по специфичности можно сравнить с отпечатками пальцев.

Полученная картина – "морфологическая фотография", при отсутствии патологии в молочной железе, остается неизменной на протяжении всей жизни пациента, что невозможно получить при термографии. Различные патологии молочной железы име-

ют строго индивидуальную "морфологическую фотографию". Соответствие картины DATG определенным патологическим нарушениям обусловлено специфическим характером ангиогенеза и неоваскуляризации при неопластическом росте и местном усилении кровотока, поскольку кровоснабжение развивающейся опухоли происходит в известной мере автономно. Данная технология позволяет выявить инвазивные, микроинвазивные и *in situ* поражения протоков в пределах нескольких миллиметров в диаметре не диагностируемые как при рентгеномаммографии так и термографии. В сочетании с результатами клинического обследования DATG обеспечивает дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных новообразований в молочной железе и позволяет дифференцировать эктазию от пре-неопластических или *in situ* поражений протоков. DATG исследование с целью профилактического наблюдения за женщинами из группы риска позволяет иметь сравнительную картину первого осмотра с последующими, указывая на опухолевую трансформацию клетки в самом начале процесса.

Благодаря неинвазивности, высокой эффективности и специфичности DATG применима и может быть рекомендована для регулярных профилактических рутинных широко масштабных обследований в практическом здравоохранении с целью своевременной диагностики предраковых новообразований, раннего рака молочной железы, а так же для мониторинга активности опухоли на этапе предоперационной химио/гормонотерапии. Проведенные медико-биологические и клинические исследования показали, что DATG в сочетании с маммографическим скринингом, дополненным физикальным обследованием и обучением женщин самообследованию (как мотивирующему моменту), способен привести к значительному (на 30-50%) снижению смертности от рака молочной железы. Внедрение подобного скрининга способно значительно улучшить раннюю диагностику рака, улучшить результаты лечения, и отказаться от калечащих расширенных хирургических вмешательств.

Публикации и конгрессы

- Gian Carlo Montruccoli, Daniele Montuccoli "L'angiogramma dinamica nella diagnosi senologica (Динамическая ангиотермография в диагностике заболеваний молочной железы) - From University Book: Neoplasie della Mammella- E.V.Cosmi; J.A.Pinotti - Piccin Ed.
- Naccarato AG, Viacava P, Vignati S, Fanelli G, Bonadio AG, Montruccoli G, Bevilacqua G. "Bio-morphological events in the development of the human female mammary gland from fetal age to puberty." ("Био-морфологические изменения в развитии молочной железы человека от фетального до пубертатного периода") VIRCHOW'S ARCHIV-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PATHOLOGY, (Virchows Archiv - Международный журнал патологии) num. 5, vol. 436, pp. 431, 2000
- Naccarato AG, Viacava P, Bocci G, Fanelli G, Aretini P, Lonobile A, Montruccoli G, Bevilacqua G. "Definition of the microvascular pattern of the normal human adult mammary gland." ("Определение микрокапиллярной структуры нормальной молочной железы взрослого человека") JOURNAL OF ANATOMY, vol. 203, pp. 599-603, 2003
- G.C. Montruccoli, D. Montruccoli Salmi, F. Casali "A new type of breast contact thermography plate: a preliminary and qualitative investigation of its potentiality on phantoms." ("Новый тип пластины для контактной термографии груди: предварительное и качественное исследование ее потенциальных возможностей на фантомах") PHYSICA MEDICA Vol. XX, N.1, January-March 2004 pp.27-31
- Daniele Montruccoli, Franco Casali, Stefano Brusori, Paolo Barillari, Corrado Scipioni et Gian Carlo Montruccoli "Angiothermographie dynamique: un avenir?" ("Динамическая ангиотермография - будущее?") AGENDA GYNECOLOGIE, Mars 2005 pag.42-43
- G.C. Montruccoli, D. Montruccoli, D. Barnabe, V. Altomare "Thermography fiction or reality?" ("Термография - вымысел или реальность?") INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY Vol. 83 Supplement N.3 pag.18 November 2-7 2003 (Международный журнал акушерства и гинекологии т. 83 дополнение N.3 стр.18 2-7 ноября 2003)
- G. C. Montruccoli, D. Montruccoli, F. Casali, S. Brusori, W. F. Grigioni, A. G. Naccarato, P. Viacava, N. Decarli, A. Cavazzana, G. Bevilacqua. "Clinical application of a new thermographic plate: histopathological findings of 1027 breast lesions." ("Клиническое применение новой термографической пластины: гистопатологические данные 1027 пациентов") 95TH AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, AACR ANNUAL MEETING 27-31 MARCH 2004 (АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РАКА, 95-Я ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА AACR 27-31 марта 2004)
- Viacava P, Naccarato A.G., Bocci G., Fanelli G., Aretini P., Lonobile A., Montruccoli G.C., Bevilacqua G. "Angiogenesis and VEGF expression in pre-invasive lesions of human breast" ("Ангиогенез и VEGF-экспрессия в доинвазивных изменениях молочной железы человека") JOURNAL OF PATHOLOGY 2004; 204: 140-146
- D. Montruccoli, F. Casali, A. D'Errico, S. Brusori, S. Sibio, S. Spata and G.C. Montruccoli "A new diagnostic technique in detecting early phases of breast cancer" ("Новая диагностическая методика в выявлении ранних стадий рака молочной железы") 17th Congress ICACT International Congress on Anti - Cancer Treatment-Paris 2006 (17й конгресс ICACT, Международный конгресс по лечению рака - Париж 2006)
- D. Montruccoli, F. Casali, F.C. Schmitt, S. Brusori, M. Merialdi, A. Campana and G.C. Montruccoli "New advances in treatment of breast cancer" (Новые достижения в лечении рака молочной железы) Proceedings XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics (Труды XVIII-го Всемирного конгресса по акушерству и гинекологии FIGO) Kuala-Lumpur Malesia 5-19 November 2006
- Adhemar Longatto Filho, Sandra M. Costa, Fernanda Milanezi, Daniele Montruccoli, Gian Carlo Montruccoli, Fatima Baltazar And Fernando C. Schmitt. "Immunohistochemical expression of VEGF-A and its ligands in non-neoplastic lesions of the breast sampling-assisted by dynamic angiothermography" ("Иммуногистохимическая экспрессия VEGF-A и ее лигандов в не-опухолевых изменениях груди с помощью динамической ангиотермографии") Oncology Report -18: 1201-1206, 2007

Производство:

Gima S.p.a.
Via Kennedy, 17
40069 Zola Predosa (BO) Italia
www.gima.com

Research and development:

Breast Life S.r.l.
Piazza San Martino, 1
40126 Bologna Italia
www.breastlife.it

В сотрудничестве:




С Женевским Фондом медицинского образования и исследований Всемирной организации здравоохранения.
Центром сотрудничества в образовании и исследованиях Репродукции человека.
www.gfmer.ch

Эксклюзивный дистрибьютор в России :

Группа компаний «МЕДТЕК»

Россия. 119048 Москва
Ул.Ефремова, 21 офис 1
Тел.+7 495 950-57-01
Факс+7 499 242-66-43
www.medtec.ru

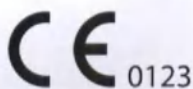

Laboratory of industrial research
Art. n. 14 of ministerial decree n. 593 of 8 August 2000



Ministero dell'Istruzione
dell'Università della Ricerca

Динамическая ангиотермография в диагностике рака молочной железы

Excellence in Mastology

MARONA - 11. 10/5/13 per.

Visura ordinaria società di capitale - GIMA S.P.A.

Camera di Commercio Bologna

Documento n. A KM039184395870000288 estratto dal Registro Imprese in data 03/07/2009

Denominazione: GIMA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ZOLA PREDOSA (BO)
VIA KENNEDY 17 cap 40069

Codice fiscale: 02506731203

Numero REA: BO-445058

Sede

Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 445058

Sede legale

ZOLA PREDOSA (BO)
VIA KENNEDY 17 cap 40069

Partita IVA

02506731203

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro
Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02506731203

del registro delle imprese di BOLOGNA

Data di iscrizione: 03/01/2005

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 03/01/2005

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 09/12/2004

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2005

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

AMMINISTRATORE UNICO

Numero minimo amministratori: 1

Numero massimo amministratori: 1

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA VENDITA DI IMPIANTI AUTOMATICI, MECCANICI ELETTRONICI ED ELETTRICI, NONCHE' ATTIVITA' AFFINI, COLLATERALI E COMPLEMENTARI ALLE PRECEDENTI. LA SOCIETA' POTRA' QUINDI ASSUMERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMERESE AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO, FINANZIARE LA PROPRIA ATTIVITA' IN QUALSIASI MANIERA ADEGUATA, GARANTIRE ED IMPEGNARSI, RILASCIANDO TRA L'ALTRO AVALLI, FIDEJUSSIONI, MALLEVERIE OD ALTRE GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI DELLE SOCIETA' OD IMPRESE CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CONTROLLANO LA SOCIETA', NE SONO CONTROLLATE OPPURE SONO CONTROLLATE DALLE MEDESIME ENTITA' CHE CONTROLLANO LA SOCIETA'. LA SOCIETA' AVRA' ANCHE IL POTERE DI RICHIEDERE, NEGOZIARE, ACQUISTARE O ACQUISIRE IN ALTRO MODO, BREVETTI, LICENZE, INVENZIONI, MIGLIORIE, FORMULE, KNOW-HOW, COPYRIGHTS, SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE, MARCHI DI FABBRICA, NOMI COMMERCIALI E/O OGNI ALTRO SEGRETO, INFORMAZIONE E/O DIRITTO, OPZIONE O CONTRATTI AD ESSI RELATIVI, O DI DISPORRE DEGLI STESSI O TRARNE BENEFICIO IN ALTRO MODO.

Informazioni

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO, SE NOMINATO, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O ALL'AMMINISTRATORE UNICO, SE NOMINATO, LE SEGUENTI COMPETENZE:

- A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505 BIS;
- B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDE SECONDARIE;
- C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE, AL VICEPRESIDENTE, SE NOMINATO, E/O ALLO O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, NONCHE' AD ALTRI AMMINISTRATORI, FERMO RESTANDO CHE SONO IN OGNI CASO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, E COME TALI NON SONO DELEGABILI, LE DECISIONI SULLE MATERIE SPECIALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 29.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE E CONFERIRE POTERI A DIRETTORI, COME PURE PUO' NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E CONFERIRE LORO POTERI. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE HA LA FIRMA LIBERA PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO, NONCHE' LA FACOLTA' DI AGIRE E RESISTERE IN OGNI TIPO E FASE DI GIUDIZIO, ANCHE AVANTI ALLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE E SUPERIORI, COME PURE IN OGNI TIPO DI PROCEDURA ARBITRALE, E DI NOMINARE ARBITRI E AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

INOLTRE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL VICEPRESIDENTE E ALLO O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, ANCHE IN VIA DISGIUNTIVA SE COSI' STABILITO DAL CONSIGLIO, NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI CUI IL CONSIGLIO LE ABBAIA ATTRIBUITE.

Ripartizione
degli utili e
delle perdite
tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DOPO DEDUZIONE DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA VENTESIMA PARTE DI ESSI DA DESTINARSI ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SONO ASSEGNATI ALLE AZIONI COME DIVIDENDO, SALVO CHE L'ASSEMBLEA DELIBERI ACCANTONAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O PER ALTRA DESTINAZIONE O DI MANDARE GLI UTILI AI SUCCESSIVI ESERCIZI.

IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI E' EFFETTUATO PRESSO LE CASSE DESIGNATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DALL'AMMINISTRATORE UNICO ED A DECORRERE DAL GIORNO CHE VIENE ANNUALMENTE FISSATO DAL CONSIGLIO STESSO.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI SIANO DIVENUTI ESIGIBILI, SONO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA'.

Informazioni sulla struttura societaria

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche
statutarie

atti e fatti soggetti
a deposito

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 9 GENNAIO 2008 IL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETA' VIENE AFFIDATO AL COLLEGIO SINDACALE

Modifica articoli dello
statuto

ART.23

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 5.700.000,00

Sottoscritto: 5.700.000,00

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Versato: 5.700.000,00

Azioni

Numero
azioni: 570.000

Valore: 10,00 EURO

Strumenti finanziari
previsti dall'articolo

Obbligazioni:

ART. 8

Altri strumenti finanziari:

ART. 11

Pratica con atto
del 01/08/2008

Data deposito: 04/08/2008

Data protocollo: 04/08/2008

Numero protocollo: BO-2008-54781

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
5.700.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 570.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 5.700.000,00 EURO

FORUM S.P.A.
Codice fiscale: 02312411206

Tipo di diritto: PROPRIETA'

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 9

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Amministrazione straordinaria

**PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE** **QUADRELLI SANDRO**
Nato a BOLOGNA (BO) il 20/03/1938
**RESPONSABILE
TECNICO** **Codice fiscale: QDRSDR38C20A944M**
CONSIGLIERE **Residenza ZOLA PREDOSA (BO)**
VIA SAN PANCRAZIO 86 cap 40069

Cariche e
poteri

RESPONSABILE TECNICO nominato il 09/11/2006

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008 -
POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA: 1. ACQUISIRE E VENDERE AZIONI,
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E/O INTERESSENZE IN SOCIETA', CONSORZI E/O ALTRI ENTI,
IN ITALIA E ALL'ESTERO, CHE SVOLGANO IN GENERALE ATTIVITA' ANALOGHE, CONNESSE O
COMUNQUE COMPLEMENTARI CON GLI SCOPI DELLA SOCIETA'; STIPULARE, MODIFICARE E
RISOLVERE I RELATIVI ACCORDI, CONTRATTI E ATTI, ANCHE NOTARILI, DI
TRASFERIMENTO, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO TUTTI GLI ATTI E
LE FORMALITA' INERENTI O CONSEGUENTI. 2. ACQUISTARE E VENDERE BENI IMMOBILI,
STIPULANDO, MODIFICANDO E RISOLVENDO I RELATIVI CONTRATTI, DETERMINANDONE TUTTE
LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 3. ASSUMERE E
CONCEDERE LOCAZIONI IMMOBILIARI; E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI
CONTRATTI PER UNA DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI, DETERMINANDONE TUTTE LE
CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 4. CONFERIRE
INCARICHI E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI AGENZIA, DI
DISTRIBUZIONE, NONCHE' ALTRI ACCORDI O CONTRATTI DI NATURA COMMERCIALE,
DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E COMPIENDO OGNI ATTO INERENTE O
CONSEGUENTE. 5. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI O CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA DI MARCHI, DI LICENZA, FRANCHISING O DI ALTRA NATURA CONCERNENTI
NOMI E MARCHI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLA SOCIETA',
DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E COMPIENDO OGNI ATTO INERENTE O
CONSEGUENTE. 6. ACQUISTARE, ACQUISIRE A LEASING, ASSUMERE A NOLEGGIO,
VENDERE ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE PER UFFICIO E BENI STRUMENTALI IN
GENERE, ANCHE REGISTRATI; E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI
CONTRATTI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE E
CONSEGUENTE ATTO. 7. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE QUALSIASI ALTRO
ACCORDO O CONTRATTO CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', COMPRESI, IN VIA
NON LIMITATIVA, CONTRATTI DI MANDATO, NOLEGGIO, DEPOSITO, SPEDIZIONE, TRASPORTO
E ASSICURAZIONE, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE
O CONSEGUENTE ATTO. 8. ACQUISTARE, ACQUISIRE IN LEASING, ASSUMERE A NOLEGGIO
E VENDERE AUTOMEZZI; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI,
DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE
ATTO; SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI O ATTI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DI AUTOMEZZI
APPARTENENTI ALLA SOCIETA' E REGISTRATI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

AUTOMOBILISTICO, E RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI VINCOLI, ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DEGLI STESSI SUI DETTI AUTOMEZZI, CON ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA' DEL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO. 9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA', CONSOREI O ALTRI ENTI DA ESSA PARTECIPATI; PRENDERE PARTE ALLE RELATIVE DELIBERAZIONI A NOME DELLA SOCIETA'; E IN GENERALE ESERCITARE TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA SUA PARTECIPAZIONE IN TALI ALTRE SOCIETA', CONSOREI O ENTI. 10. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI AZIONARI OD OBBLIGAZIONARI DELLA SOCIETA'. 11. ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI E PERSONALE IN GENERE; STIPULARE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON GLI STESSI, STABILIRNE LE ATTRIBUZIONI E I COMPENSI; COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI RELATIVI ALLA GESTIONE DI TALI RAPPORTI, COMPRESI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI; AUTORIZZARE DIPENDENTI A GUIDARE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'; DEFINIRE VERTENZE DI LAVORO E CONCLUDERE E STIPULARE TRANSAZIONI CON DIPENDENTI O EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA'. 12. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANISMO SINDACALE; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI CON RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI, ANCHE DEFINENDO VERTENZE SINDACALI. 13. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI E NELLE PRATICHE CON GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI; ESPLETARE QUALSIASI PRATICA CON TALI ISTITUTI, E SOTTOSCRIVERE OGNI INERENTE DOCUMENTO. 14. CEDERE E ACQUISTARE CREDITI, PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ATTI DI CESSIONE O DI ACQUISTO DI CREDITI, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI, CONVENZIONI E ALTRI DOCUMENTI CONTRATTUALI CON SOCIETA' DI FACTORING, DETERMINARNE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIERE OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO, COMPRESO OGNI REGOLAMENTO DI CONTI. 15. NEGOZIARE E DEFINIRE CON QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO OD ENTE FINANZIARIO IN GENERE, OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO E CONTI CORRENTI, LA CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO E DI FINANZIAMENTI IN GENERE, FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI PER ANTICIPI, CONCORDARE TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI, E QUALSIASI ALTRA QUESTIONE INERENTE ALL'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI E DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA E GENERE, LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI CARTE DI CREDITO. 16. DISPORRE DI APERTURE DI CREDITO E PRELEVARE FONDI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE E CORRISPONDENTI, ANCHE ALLO SCOPERTO. 17. TRARRE E GIRARE EFFETTI CAMBIARI E ASSEGNI SIA PER LO SCONTO CHE PER L'INCASSO E PROCEDERE A PROTESTI. 18. TRARRE E GIRARE EFFETTI CAMBIARI A FRONTE DI FORNITURE. 19. EMETTERE E GIRARE ASSEGNI A NOME DELLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO. 20. EMETTERE ISTRUZIONI PER PAGAMENTI BANCARI ED AUTORIZZARE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE A DEBITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO. 21. AVVIARE E COLTIVARE AZIONI IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIARIA, CIVILE, ANCHE IN MATERIA LAVORISTICA, PENALE E AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE, E QUINDI ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE, E PURE NEI GIUDIZI DI REVOCAZIONE, SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO, NOMINANDO A TALE SCOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. 22. RICHIEDERE SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ATTI DI OPPOSIZIONE E REVOCARLI, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI GIUDIZI DI FALLIMENTO, FARE ISTANZA DI FALLIMENTO E DI INSINUAZIONI NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORSALE, FARE LE RELATIVE PREVISIONI DI CREDITO, VOTARE IN CONCORDATI, DISCUTERE I RELATIVI CONTI DI LIQUIDAZIONE, ESIGERE RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI E INTERVENIRE IN CONCORDATI PREVENTIVI, IN AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE E IN TUTTE LE PROCEDURE COLLEGATE. 23. EFFETTUARE RINUNCE E CONCLUDERE E STIPULARE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI IN VERTENZE, GIUDIZI E PROCEDIMENTI DI QUALSIASI NATURA. 24. STIPULARE CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMESSI; ADIRE, RESISTERE IN ARBITRATI E NOMINARE ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E ARBITRATORI. 25. ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE INERENTI ALL'ISTITUZIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO DI FILIALI, AGENZIE, RAPPRESENTANZE O DEPOSITI, ASSUMERNE LA RESPONSABILITA' E DETERMINARNE I RELATIVI POTERI, FUNZIONI O REMUNERAZIONI. 26. SUBDELEGARE POTERI E ATTRIBUZIONI NELL'AMBITO DEI POTERI QUI CONFERITI; NOMINARE PROCURATORI GENERALI O SPECIALI E MANDATARI IN GENERE E CONFERIRE LORO POTERI, ANCHE DI FIRMA INDIVIDUALE, SEMPRE NELL'AMBITO DEI POTERI QUI CONFERITI.

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**Riconoscimento sigillato
tecnico-professionista**

RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G, F

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

CONSIGLIERE

ZANIBONI CARLO
Nato a CASTENASO (BO) il 28/08/1946

Codice fiscale: ZNBCRL46M28C292C

Residenza CASTENASO (BO)
VIA TOSARELLI 228 cap 40055

**Cariche e
poteri**

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008 E PIU' PRECISAMENTE CON LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DELLA SOCIETA' - POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA: 1. ACQUISTARE MATERIE PRIME, MATERIALI, MERCI, PRODOTTI E BENI IN GENERE CONCERNENTI L'ATTIVITA' TECNICA DELLA SOCIETA'; ACQUISTARE, E NOLEGGIARE HARDWARE E SOFTWARE; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI ORDINI E CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI FORNITURA E SIMILI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 2. ACQUISIRE E FORNIRE SERVIZI CONCERNENTI L'ATTIVITA' TECNICA DELLA SOCIETA'; E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI ORDINI E CONTRATTI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 3. DEPOSITARE DOMANDE DI BREVETTO, DI MODELLO INDUSTRIALE E DI MARCHIO. 4. COMPIERE QUALSIASI PRATICA PRESSO UFFICI BREVETTI ITALIANI ED ESTERI, SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI E GLI ATTI NECESSARI. 5. TENERE E FIRMARE IN GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONNESSA ALLA FUNZIONE E AI POTERI QUI PREVISTI. ':

CONSIGLIERE

QUADRELLI FILIPPO

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Nato a BOLOGNA (BO) il 22/10/1964

Codice fiscale: QDRFPP64R22A944E

**Residenza BOLOGNA (BO)
VIA SARAGOZZA 149 cap 40100**

**Cariche e
poteri**

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008 E PIU' PRECISAMENTE CON LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'AREA MARKETING COMMERCIALE - POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA: 1. CONFERIRE INCARICHI E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI AGENZIA, DI DISTRIBUZIONE, NONCHE' ALTRI ACCORDI O CONTRATTI DI NATURA COMMERCIALE, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E COMPIENDO OGNI ATTO INERENTE O CONSEGUENTE. 2. ACQUISTARE, ACQUISIRE A LEASING, ASSUMERE A NOLEGGIO, VENDERE ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE PER UFFICIO E BENI STRUMENTALI IN GENERE, ANCHE REGISTRATI; E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE E CONSEGUENTE ATTO. 3. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE QUALSIASI ALTRO ACCORDO O CONTRATTO CONCERNENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA', COMPRESI, IN VIA NON LIMITATIVA, CONTRATTI DI LOCAZIONE O DI LEASING DI IMPIANTI AUTOMATICI, MECCANICI, ELETTRONICI ED ELETTRICI, CONTRATTI DI MANDATO, NOLEGGIO, DEPOSITO, SPEDIZIONE, TRASPORTO E ASSICURAZIONE, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 4. EMETTERE E GIRARE ASSEGNI A NOME DELLA SOCIETA'. 5. TENERE E FIRMARE IN GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONNESSA ALLA FUNZIONE E AI POTERI QUI PREVISTI.

CONSIGLIERE

QUADRELLI MATTEO

Nato a BOLOGNA (BO) il 13/03/1967

Codice fiscale: QDRMTT67C13A944B

**Residenza ZOLA PREDOSA (BO)
VIA PEPOLI 16 cap 40069**

**Cariche e
poteri**

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008 E PIU' PRECISAMENTE CON LA FUNZIONE DI RESPONSABILE AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE - POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA: 1. ACQUISTARE,

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

ACQUISIRE A LEASING, ASSUMERE A NOLEGGIO, VENDERE ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE PER UFFICIO E BENI STRUMENTALI IN GENERE, ANCHE REGISTRATI; E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI, DETERMINANDO TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE E CONSEGUENTE ATTO. 2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE QUALSIASI ALTRO ACCORDO O CONTRATTO CONCERNENTE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', COMPRESI, IN VIA NON LIMITATIVA, CONTRATTI DI LOCAZIONE ODI LEASING DI IMPIANTI AUTOMATICI, MECCANICI, ELETTRONICI ED ELETTRICI, CONTRATTI DI MANDATO, NOLEGGIO, DEPOSITO, SPEDIZIONE, TRASPORTO E ASSICURAZIONE, DETERMINANDO TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 3. ACQUISTARE, ACQUISIRE A LEASING, ASSUMERE A NOLEGGIO E VENDERE AUTOMEZZI; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI, DETERMINANDO TUTTE LE CONDIZIONI E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO; SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI O ATTI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DI AUTOMEZZI APPARTENENTI ALLA SOCIETA' E REGISTRATI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, E RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI VINCOLI, ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DEGLI STESSI SUI DETTI AUTOMEZZI, CON ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA' DEL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO. 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA', CONSORZI O ALTRI ENTI DA ESSA PARTECIPATI; PRENDERE PARTE ALLE RELATIVE DELIBERAZIONI A NOME DELLA SOCIETA'; E IN GENERALE ESERCITARE TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA SUA PARTECIPAZIONE IN TALI ALTRE SOCIETA', CONSORZI O ENTI. 5. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI AZIONARI OD OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'. 6. ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI E PERSONALE IN GENERE; STIPULARE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON GLI STESSI; STABILIRNE LE ATTRIBUZIONI E I COMPENSI; COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI RELATIVI ALLA GESTIONE DI TALI RAPPORTI, COMPRESI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI; AUTORIZZARE DIPENDENTI A GUIDARE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'; DEFINIRE VERTENZE DI LAVORO E CONCLUDERE E STIPULARE TRANSAZIONI CON DIPENDENTI O EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA'. 7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALUNQUE ORGANISMO SINDACALE; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI CON RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI, ANCHE DEFINENDO VERTENZE SINDACALI. 8. CEDERE E ACQUISTARE CREDITI, PRO-SOLUTO O PRO-SOLVENDO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ATTI DI CESSIONE O DI ACQUISTO DI CREDITI, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI, CONVENZIONI E ALTRI DOCUMENTI CONTRATTUALI CON SOCIETA' DI FACTORING, DETERMINARNE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIERE OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO, COMPRESO OGNI REGOLAMENTO DI CONTI. 9. NEGOZIARE E DEFINIRE CON QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO OD ENTE FINANZIARIO IN GENERE, OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO E CONTI CORRENTI, LA CONCESSIONE DI LINEE DI CREDITO E DI FINANZIAMENTI IN GENERE, FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI PER ANTICIPI, CONCORDARE TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI, E QUALSIASI ALTRA QUESTIONE INERENTE ALL'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI E DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA E GENERE, LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI CARTE DI CREDITO. 10. TRARRE E GIRARE EFFETTI CAMBIARI E ASSEGNI SIA PER LO SCONTO CHE PER L'INCASSO E PROCEDERE A PROTESTI. 11. EMETTERE E GIRARE ASSEGNI A NOME DELLA SOCIETA'. 12. EMETTERE ISTRUZIONI PER PAGAMENTI BANCARI ED AUTORIZZARE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE A DEBITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'. 13. AVVIARE E COLTIVARE AZIONI IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIARIA, CIVILE, ANCHE IN MATERIA LAVORISTICA, PENALE E AMMINISTRATIVA, IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE, E QUINDI ANCHE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE, E PURE NEI GIUDIZI DI REVOCAZIONE, SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO, NOMINANDO A TALE SCOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. 14. RICHIEDERE SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ATTI DI OPPOSIZIONE E REVOCARLI, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI GIUDIZI DI FALLIMENTO, FARE ISTANZA DI FALLIMENTO E DI INSINUAZIONI NELLE ALTRE PROCEDURE CONCORDALI, FARE LE RELATIVE PREVISIONI DI CREDITO, VOTARE IN CONCORDATI, DISCUTERE I RELATIVI CONTI DI LIQUIDAZIONE, ESIGERE RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI E INTERVENIRE IN CONCORDATI PREVENTIVI, IN AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE E IN TUTTE LE PROCEDURE COLLEGATE. 15. EFFETTUARE RINUNCE E CONCLUDERE E STIPULARE CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI IN VERTENZE, GIUDIZI E PROCEDIMENTI DI QUALSIASI NATURA. 16. ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE INERENTI ALL'ISTITUZIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO DI FILIALI, AGENZIE,

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

RAPPRESENTANZE O DEPOSITI, ASSUMERNE LA RESPONSABILITA' E DETERMINARNE I RELATIVI POTERI, FUNZIONI O REMUNERAZIONI. 17. TENERE E FIRMARE IN GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONNESSA ALLA FUNZIONE E AI POTERI QUI PREVISTI. 18. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN RELAZIONE AD OPERAZIONI E PROCEDURE DI IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DOGANALI E VALUTARIE IN GENERE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI BANCA, UFFICIO O AUTORITA' COMPETENTE, ANCHE SOTTOSCRIVENDO BENESTARI, DICHIARAZIONI, DOMANDE, ATTI E DOCUMENTI INERENTI. 19. FARE IN GENERE QUALUNQUE OPERAZIONE CON GLI UFFICI DI DOGANA, FERROVIE, SOCIETA' DI NAVIGAZIONE, E COMPAGNIE AEREE, ALTRI VETTORI E SPEDIZIONIERI. 20. TENERE E FIRMARE IN GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONNESSA ALLA FUNZIONE E AI POTERI QUI PREVISTI.

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008:

1. ASSUMERE, ANCHE AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 626/94 E 242/96 (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI), TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE, ANCHE SE DI CARATTERE ECCEZIONALE, ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI NECESSARI ALLO SCOPO, COMPRESO QUELLO DI DESTINARE LE SOMME NECESSARIE PER I RELATIVI INTERVENTI, CON LA NECESSARIA AUTONOMIA FINANZIARIA, SALVO L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL PIANO DI INVESTIMENTI E DI SPESA. PROVVEDERE, IN TALE QUADRO, ALLA TEMPESTIVA E PUNTUALE ESECUZIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI CITATI DECRETI LEGISLATIVI E DALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO, PROTEZIONE AMBIENTALE, MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, ED IN PARTICOLARE, IN VIA NON LIMITATIVA, PROVVEDERE: (A) ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI; (B) ALLA ELABORAZIONE, CONSERVAZIONE E COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE IN MERITO ALLA PREDETTA VALUTAZIONE; (C) ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RELATIVO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE; (D) ALLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEGLI ADETTI AL SERVIZIO INTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; (E) ALLA DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE; (F) ALLA DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI; (G) AL NECESSARIO AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE ED AL CONTROLLO COSTANTE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO; (H) ALLA FORNITURA AI LAVORATORI DI IDONEI MEZZI DI PROTEZIONE; (I) ALL'INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN MATERIA DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI; (L) ALLA PREDISPOSIZIONE DI NORME INTERNE TESE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IN GENERE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO; (M) ALLA ADOZIONE DI OGNI MISURA NECESSARIA OD OPPORTUNA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE INTERNO E CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO, MANTENENDO SOTTO CONTINUO MONITORAGGIO GLI EVENTUALI AGENTI DI RISCHIO AMBIENTALE; (N) ALLA RICHIESTA E ALL'OTTENIMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI, APPROVAZIONI, AUTORIZZAZIONI E PARERI DI LEGGE IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI CUI SOPRA; (O) ALLA EVENTUALE SUBDELEGA PER SETTORE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLA CURA IN CONCRETO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DEL SISTEMA DI SICUREZZA SOPRA MENZIONATI; NONCHE' (P) ALLA SUPERVISIONE IN GENERE DELLA MIGLIORE E CONCRETA ATTUAZIONE DI QUANTO PRECEDE.

2. IN GENERALE, ANCHE RELATIVAMENTE A QUANTO NON OGGETTO DEI RICORDATI DECRETI LEGISLATIVI N. 626/94 E 242/96 (E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI), SOVRINTENDERE, ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DELLE ALTRE NORMATIVE APPLICABILI, ALLE ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO CONCERNENTI I SETTORI DELLA SICUREZZA, DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, DELL'IGIENE, DELLA SALUTE, DELLA TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE, NONCHE' ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI I SETTORI DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI, DEI MACCHINARI, DELLE ATTREZZATURE E PROVVEDERE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI E DELLE MISURE NECESSARIE PER LA LORO RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME DI LEGGE E DELLE ALTRE NORMATIVE AD ESSI APPLICABILI. 3. RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO LA SOCIETA' AVANTI TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO NELLE SUDDETTE MATERIE.

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

CONSIGLIERE

FANTAZZINI GIAMPIERO
Nato a PIANORO (BO) il 03/07/1951

Codice fiscale: FNTGPR51L03G5700

Residenza CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
VIA MARTELLI 29 cap 40024

Cariche e
poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008 E PIU' PRECISAMENTE CON LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'AREA MONTAGGIO SITUATO A ZOLA PREDOSA, BOLOGNA, VIA KENNEDY 17 - POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA: 1. ASSISTERE A CONSEGNE, ACCETTAZIONI E COLLAUDI DI QUANTO ACQUISTATO DALLA SOCIETA' O AD ESSA FORNITO E DEI RELATIVI COMPONENTI O MATERIALI, E FIRMARE OGNI RELATIVO ATTO, DICHIARAZIONE VERBALE O DOCUMENTO. 2. GESTIRE LA PRESTAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA ANCHE POST-VENDITA ALLA CLIENTELA ITALIANA ED ESTERA, PROVVEDENDO ANCHE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE UMANE DA DESTINARE ALLA CLIENTELA. 3. TENERE E FIRMARE IN GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONNESSA ALLA FUNZIONE E AI POTERI QUI PREVISTI.

CONSIGLIERE

DRAGHETTI FIORENZO
Nato a MEDICINA (BO) il 18/10/1953

Codice fiscale: DRGFNZ53R18F083Y

Residenza MEDICINA (BO)
VIA DONINO 506 cap 40059

Cariche e
poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.01.2008 E PIU' PRECISAMENTE CON LA FUNZIONE DI DIRETTORE DI STABILIMENTO - POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA: 1. ACQUISTARE MATERIE PRIME, MATERIALI, MERCI, PRODOTTI E BENI IN GENERE CONCERNENTI L'ATTIVITA' TECNICA DELLA SOCIETA'; ACQUISTARE, E NOLEGGIARE HARDWARE E SOFTWARE; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI ORDINI E CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI FORNITURA E SIMILI,

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 2. ACQUISIRE E FORNIRE SERVIZI CONCERNENTI L'ATTIVITA' TECNICA DELLA SOCIETA'; E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI ORDINI E CONTRATTI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI, E COMPIENDO OGNI INERENTE O CONSEGUENTE ATTO. 3. DEPOSITARE DOMANDE DI BREVETTO, DI MODELLO INDUSTRIALE E DI MARCHIO. 4. COMPIERE QUALSIASI PRATICA PRESSO UFFICI BREVETTI ITALIANI ED ESTERI, SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI E GLI ATTI NECESSARI. 5. TENERE E FIRMARE IN GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONNESSA ALLA FUNZIONE E AI POTERI QUI PREVISTI.

CONSIGLIERE

LUDERGNANI ROBERTO

Nato a BOLOGNA (BO) il 08/07/1954

Codice fiscale: LDRRRT54L08A944D

Residenza BOLOGNA (BO)
VIA DAL LUZZO 2 cap 40100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 09/01/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

CONSIGLIERE

QUADRELLI ALESSANDRA

Rappresentante dell'Impresa

Nata a BOLOGNA (BO) il 26/03/1986

Codice fiscale: QDRLSN86C66A944I

Residenza ZOLA PREDOSA (BO)
VIA SAN PANCRAZIO 86 cap 40069

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 07/01/2009

Data iscrizione: 19/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

CONSIGLIERE

SCRIVANI MASSIMO

Rappresentante dell'Impresa

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Nato a BRONI (PV) il 10/04/1963

Codice fiscale: SCRMSM63D10B201N

**Residenza CASTEGGIO (PV)
VIA REPUBBLICA 9 cap 27045**

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 07/01/2009

Data iscrizione: 19/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Sindaco Effettivo

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

Data inizio carica: 20/07/2007

Sindaco Effettivo

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

**BELTRAMELLI MARIO ALBERTO
Nato a BOLOGNA (BO) il 04/11/1952**

Codice fiscale: BLTMLB52S04A944I

**Residenza BOLOGNA (BO)
VICOLO DELL'ORTO 2 cap 40124**

Cariche e poteri

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto
del 20/07/2007**

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

BARBIERI STEFANO

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Nato a MODENA (MO) il 18/05/1969

Codice fiscale: BRBSFN69E18F257Q

**Residenza BOLOGNA (BO)
VIA BAMBAGLIOLI 6/2 cap 40100**

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/07/2007

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 61

Data: 03/08/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

**CAZZOLI GIULIA
Nata a BOLOGNA (BO) il 08/10/1969**

Codice fiscale: CZZGLI69R48A944E

**Residenza BOLOGNA (BO)
VIALE ORIANI 23/2 cap 40100**

Cariche e poteri

SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/07/2007

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 35

Data: 04/05/2004

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE

**CORADUCCI VITTORIO
Nato a BOLOGNA (BO) il 03/08/1957**

Codice fiscale: CRDVTR57M03A944E

**Residenza BOLOGNA (BO)
VIA DEL MELONCELLO 1 cap 40100**

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Cariche e poteri

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 20/07/2007

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE

MARI MANUELA

Nata a BOLOGNA (BO) il 01/05/1964

Codice fiscale: MRAMNL64E41A944P

Residenza CASALECCHIO DI RENO (BO)
VIA DELLO SPORT 10 cap 40033

Cariche e poteri

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 20/07/2007

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

SOCIO UNICO

FORUM S.P.A.

Codice fiscale: 02312411206

Numero repertorio economico amministrativo: BO 429850

Data costituzione: 04/03/1977

Sede BOLOGNA (BO)
VICOLO DELL'ORTO 2 cap 40100

Cariche e poteri

SOCIO UNICO

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Iscritto nel libro dei soci dal 09/12/2004

SCISSIONE

Atto del 09/12/2004

Estremi della pratica

Data deposito: 28/12/2004

Data protocollo: 28/12/2004

Numero protocollo: BO-2004-80097

Estremi ed oggetto dell'atto

Notaio: SERTORI FABRIZIO

Numero repertorio: 50428

Cedente

GIMA LOGISTICA S.P.A.
Codice fiscale: 01105600371

Cessionario

GIMA S.P.A.
Codice fiscale: 02506731203

Trasferimento di azienda

**Progetto di fusione
mediante incorporazione
della societa'**

PLAN.E.T. S.P.A.

Codice fiscale: 03575990969

Sede: ZOLA PREDOSA

Estremi della pratica

Data iscrizione: 09/04/2009

Data atto: 07/04/2009

Attività, attività in licenza e acquisizioni

**Inizio attività
(informazione storica)**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/01/2005

Attività

FABBRICAZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA, LA

Visura ordinaria società di capitale - GIMA S.P.A.

esercitata nella
sede legale

CONFEZIONE E PER L'IMBALLAGGIO (COMPRESI PARTI E ACCESSORI); NONCHE' (DAL
09/11/2006): L. 46/90 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI,
ELETTRONICI, IDROTERMO SANITARI, GAS, E ANTINCENDIO, E INSTALLAZIONE IMPIANTI
SOLLEVAMENTO

Classificazione
ATTIVITÀ 2007
della descrizione attività
(informazione di sola
natura statistica)

Codice: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la
confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 03/01/2005

Codice: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere
di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 43.22 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in
edifici o in altre opere di costruzione

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas
(inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio,
compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e
scale mobili

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Data inizio: 09/11/2006

Classificazione
ATECORI 2002
della descrizione attività
(informazione di sola
natura statistica)

Codice: 29.24.5 -Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura,
la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 03/01/2005

Codice: 29.22.2 -Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di
sollevamento e movimentazione

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 45.31.01-Installazione o riparazione di impianti per la distribuzione
dell'energia elettrica

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 45.31.02-Installazione e riparazione di impianti Radio TV,
impianti d'allarme, impianti telefonici ed altri impianti di
telecomunicazione , antenne e parafulmini

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 45.31.03-Installazione di impianti di sollevamento, esclusa la
riparazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 45.33.01-Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e
di condizionamento

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 45.33.02-Installazione e riparazione di impianti idrosanitari

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Codice: 45.33.03-Installazione e riparazione di impianti per il trasporto del
gas

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Codice: 45.34.01-Installazione e riparazione di impianti integrati di protezione antincendio

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 09/11/2006

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2007

Dipendenti: 122

Addetti
(informazione di sola
natura statistica)

Attività svolte dall'impresa

Ditta operante con l'estero

Numero: BO051160

Data: 03/02/2005

Attività svolte dall'impresa

**Requisiti morali e/o
tecnicoprofessionali**

Codice: INSTALLATORI - LETTERA G (LEGGE 46/1990)

Stato: requisiti in fase di accertamento

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

**Data
denuncia:** 09/11/2006

Codice: INSTALLATORI - LETTERA F (LEGGE 46/1990)

Stato: requisiti in fase di accertamento

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

**Data
denuncia:** 09/11/2006

Codice: INSTALLATORI - LETTERA E (LEGGE 46/1990)

Stato: requisiti in fase di accertamento

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

**Data
denuncia:** 09/11/2006

Codice: INSTALLATORI - LETTERA D (LEGGE 46/1990)

Stato: requisiti in fase di accertamento

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

**Data
denuncia:** 09/11/2006

Codice: INSTALLATORI - LETTERA C (LEGGE 46/1990)

Stato: requisiti in fase di accertamento

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Data
denuncia: 09/11/2006

Codice: INSTALLATORI - LETTERA B (LEGGE 46/1990)
Stato: requisiti in fase di accertamento
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data
denuncia: 09/11/2006

Codice: INSTALLATORI - LETTERA A (LEGGE 46/1990)
Stato: requisiti in fase di accertamento
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data
denuncia: 09/11/2006

Unita' locale

UNITA' LOCALE n. 1

DEPOSITO

Data apertura: 03/01/2005

Indirizzo

ZOLA PREDOSA (BO)
VIA CORNO 8/A-B cap 40069

Classificazione
ATECORI 2007
della descrizione attivita'
(informazione di sola
natura statistica)

Codice: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la
confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Classificazione
ATECORI 2002
della descrizione attivita'
(informazione di sola
natura statistica)

Codice: 29.24.5 - Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura,
la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

UNITA' LOCALE n. 2

UNITA' LOCALE OPERATIVA

Data apertura: 01/10/2005

Indirizzo

ZOLA PREDOSA (BO)
VIA PARINI 1 cap 40069

Attivita' esercitata

PROGETTAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA,
LA CONFEZIONE E L'IMBALLAGGIO (COMPRESI PARTI E ACCESSORI)

Visura ordinaria societa' di capitale - GIMA S.P.A.

Classificazione
ATECORI 2007
della descrizione attività
(informazione di sola
natura statistica)

Codice: 28.29.3 -Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la
confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/10/2005

Classificazione
ATECORI 2007
della descrizione attività
(informazione di sola
natura statistica)

Codice: 29.24.5 -Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura,
la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/10/2005

Aggiornamento imprese

Data ultimo protocollo: 09/04/2009