

курсора между полями и для рассмотрения определенных частей теста при ознакомлении с результатами исследования пациента. Кнопка «Назад» (“Back”) служит для того, чтобы вернуться в меню и для возврата курсора в предыдущее положение. Кнопка «Печать» (“Print”) для будущего использования.



1.3 Задние части и кабели

Рассмотрите заднюю сторону монитора:



Три кабеля должны быть подсоединены к разъемам устройства:

1. **NICOM Patient cable (кабель пациента)** – широкое гнездо предназначенное для NICOM кабеля пациента, другой конец которого необходимо подсоединить к NICOM электродам, которые прикладываются к телу пациента как описано в разделе «Выполнение измерений».
2. **Шнур питания** – гнездо для стандартного электрического шнура. Устройство может работать от аккумуляторов, подсоединяя данный кабель к источнику питания, когда они будут заряжаться
3. **USB кабель** – соединительный стандартный USB кабель позволяет пользователю/специалисту выполнять измерение во время