



ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России

Утверждаю
Директор ФГУП
«Свердловское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
А.В.Пугачев
2010 г.

Обувь ортопедическая на протезы

Памятка по пользованию

Версия 0

2010

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Назначение

Обувь ортопедическая на протезы, предназначена для взрослых и детей, пользующихся протезами нижних конечностей.

Обувь на протезы при односторонней ампутации назначается инвалидам в зависимости от состояния сохранившейся конечности:

- при деформации или дефекте стопы – с целью восстановления или компенсации статико- динамической функции стопы,
- при отсутствии деформации стопы – для профилактики развития статической деформации стопы.

Обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей назначается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы.

Условия эксплуатации

- сушить обувь ежедневно при комнатной температуре,
- не допускается сушить обувь на нагревательных поверхностях.
- чистить обувь при необходимости с применением мягкой влажной ткани.
- не допускается контакт обуви с концентрированными растворами кислот, щелочей, красящими веществами, нефтепродуктами и растворителями.

Уход за стопой сохранившейся конечности

Ежедневно, после ходьбы в обуви, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж, обработка кожи защитными питательными кремами и лосьонами.

Гарантии изготовителя

- на кожаной подошве 40 дней,
- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней,
- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней,
- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней,
- на детскую обувь – 45 дней.

со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона.

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездное изготовление обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Зинченко Г.Н.	<i>Г.Н. Зинченко</i>	11.11.16
Проверил		Климова И.А.	<i>И.А. Климова</i>	11.11.16
Согласовано		Поспелова С.И.	<i>С.И. Поспелова</i>	11.11.16

Обувь ортопедическая на протезы
Памятка по пользованию

Лит.	Лист	Листов
A	2	3
ФГУП «Свердловское ПрОП»		

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Печ. и дата

					Обувь ортопедическая на протезы Памятка по пользованию	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		