



**ООО ПТФ «Лечебно- ортопедический
центр по социальной
реабилитации инвалидов**

300012, г. Тула, ул. Первомайская, 13, корп. 11

Тел./факс (4872) 31-06-69, E-mail: lots@mail.ru

№ _____ от _____

Тутор на всю ногу ТН8-02 (памятка)

Тутор на всю ногу ТН8-02 - протезно-ортопедическое пособие индивидуального изготовления.

Назначение.

Обеспечивает стабильное удержание нижней конечности в заданном положении за счет жесткости гильзы.

Показания.

Назначается детям для фиксации нижней конечности в заданном положении: при специфических и неспецифических воспалительных заболеваниях (в стадии подострой и ремиссии), при параличе мышц нижней конечности; с целью коррекции и профилактики при различных деформациях костей, контрактурах, при различных операциях на костях и связочном аппарате нижней конечности, замедленной консолидации переломов, ложных суставах костей голени и бедра, остеомах, кистах.

Противопоказания.

Фиксированные деформации. Относительное противопоказание воспалительный процесс на кожных покровах контактирующих с гильзой.

Инструкция к применению.

Тутор одевают на хлопчатобумажный чулок, задают указанное врачом положение нижней конечности, вкладывают конечность в гильзу тутора, последовательно фиксируя снизу вверх элементы крепления. Сегмент конечности должен плотно удерживаться в гильзе тутора без явлений локального давления на костные выступы и мягкие ткани. Тутор предназначен на время дневного и ночного сна. Ходьба в туторе запрещена.

Уход за тутором.

Внутреннюю поверхность гильзы рекомендуется протирать влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем растворе (детском мыле), с последующей просушкой. Металлические элементы следует предохранять от попадания влаги.

Уход за кожными покровами.

Ежедневно необходимо проводить гигиеническую обработку кожных покровов пораженной конечности теплой водой с мылом с последующим массажем ее. По назначению лечащего врача-ортопеда, ежедневно выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Вас. Вострякова Е.В.