



**ООО ПТФ «Лечебно- ортопедический
центр по социальной
реабилитации инвалидов**

300012, г. Тула, ул. Первомайская, 13, корп. 11

Тел./факс (4872) 31-06-69, E-mail: lots@mail.ru

№ _____ от _____

Аппарат ортопедический фиксирующий на ногу (памятка)

Аппарат ортопедический фиксирующий на ногу - протезно-ортопедическое пособие индивидуального изготовления.

Назначение.

Обеспечивает стабильное удержание сегментов конечности в заданном положении за счет жесткости гильз и системы крепления.

Показания.

Назначается детям при специфических и неспецифических воспалительных заболеваниях (в стадии подострой и ремиссии), при параличах и парезах мышц нижней конечности, в сочетании с небольшими контрактурами в коленном, голеностопном суставах, вальгусным или варусным отклонением голени, ротации ее; с целью коррекции и профилактики при различных деформациях костей, контрактурах, при различных операциях на костях и связочном аппарате нижней конечности, замедленной консолидации переломов, ложных суставах костей голени и бедра, остеомах, кистах.

Противопоказания.

Общесоматические заболевания, когда временно или на длительный срок ребенку запрещен двигательный режим.
Относительное противопоказание - воспалительный процесс на кожных покровах, контактирующих с гильзами.

Инструкция к применению.

Ортопедический аппарат надевают в положении "сидя" или "лежа", на согнутую в коленном суставе конечность. Надев на пораженную конечность хлопчатобумажный чулок, вложить ее в гильзы аппарата и башмачок, последовательно фиксируя снизу вверх элементы крепления башмачка и гильз. Сегменты конечности должны плотно удерживаться в гильзах аппарата без явлений локального давления на костные выступы и мягкие ткани в покое и при ходьбе.

Фиксирующий аппарат предназначен для постоянного пользования, что способствует правильному формированию костей, суставов и нормализации их функций.

Ортопедический фиксирующий аппарат допускает возможность пользования стандартной или специальной обувью с заданной высотой каблука.

Уход за аппаратом.

Внутреннюю поверхность гильз и башмачка рекомендуется протирать намыленной влажной тканью с последующей просушкой. Нельзя сушить и хранить аппарат вблизи источников тепла. Шарнирные соединения следует смазывать машинным маслом. Металлические части аппарата следует предохранять от попадания влаги.

Уход за кожными покровами.

Ежедневно, после ходьбы в аппарате, необходимо проводить гигиеническую обработку кожных покровов пораженной конечности теплой водой с мылом с последующим массажем ее. По назначению лечащего врача-ортопеда ежедневно выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений.

Гарантийный срок 7 месяцев со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.