



**ООО ПТФ «Лечебно- ортопедический
центр по социальной
реабилитации инвалидов**

300012, г. Тула, ул. Первомайская, 13, корп. 11

Тел./факс (4872) 31-06-69, E-mail: lots@mail.ru

№ _____ от _____

Тутор на всю руку TP8-02 (памятка)

Тутор на всю руку TP8-02 - протезно-ортопедическое пособие индивидуального изготовления.

Назначение.

Обеспечивает стабильное удержание верхней конечности в заданном положении за счет жесткости гильзы.

Показания.

Тутор на всю руку назначается для обеспечения фиксации пораженной конечности, в положении достигнутой коррекции при патологических сгибательных и разгибательных, пронационных и супинационных контрактурах и установках в локтевом и лучезапястном суставе, для профилактики вторичных деформаций при неврологических поражениях.

Противопоказания.

Относительное противопоказание воспалительный процесс на кожных покровах контактирующих с гильзой.

Инструкция к применению.

Тутор одевают на хлопчатобумажный чулок, конечности задают необходимое положение и вкладывают сначала в гильзу кисть и лучезапястный сустав в гильзу тьютора, фиксируют липучку в области лучезапястного сустава, на тыле кисти крест на крест фиксируют ленту с липучкой. последовательно фиксируя снизу вверх элементы крепления. Сегмент конечности должен плотно удерживаться в гильзе тьютора без явлений локального давления на костные выступы и мягкие ткани. Тутор предназначен для постоянного пользования или на время ночного сна.

Уход за тьютором.

Внутреннюю поверхность гильзы рекомендуется протирать влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем растворе (детском мыле), с последующей просушкой. Металлические элементы, окантовку следует предохранять от попадания влаги.

Уход за кожными покровами.

Ежедневно необходимо проводить гигиеническую обработку кожных покровов пораженной конечности теплой водой с мылом с последующим массажем ее. По назначению лечащего врача-ортопеда, ежедневно выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Вз- Вострикова Е.В.