



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АЛЬМЕД»

И.П.Фомин

А.И.Мед 2011г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ТРУБЧАТЫЕ СЕТЧАТЫЕ

ТУ 9393-005-72041950-2011

код ОКПО 93 9370

производства ООО «АЛЬМЕД»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты предназначены для фиксации перевязочных средств, тампонов, сухих и влажных повязок, прокладок, салфеток на различных участках тела.

Бинты могут быть использованы в клинических, поликлинических, полевых условиях, при оказании первой медицинской помощи и в быту.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бинты изготавливаются на основе латексной нити с включением хлопчатобумажной пряжи, пряжи из полиэфирных и других синтетических волокон по техническим условиям ТУ 9393-005-72041950-2011.

В зависимости от ширины бинты медицинские эластичные фиксирующие трубчатые сетчатые выпускаются 8-ми типоразмеров условных номеров с № 1 по № 8. (Таблица 1).

Условный номер бинта	Область применения
№1	Для фиксации перевязочных средств на пальцах взрослых, пальцах и кисти детей.
№2	Для фиксации перевязочных средств на кисти, предплечье, стопе и локтевом суставе взрослых, голени, кисти, стопе, коленном и локтевом суставе детей.
№3	Для фиксации перевязочных средств в области локтевого сустава, коленного сустава, голени взрослых, головы и нижней части бедра детей.
№4	Для фиксации перевязочных средств в области коленного сустава, нижней части бедра взрослых, головы, области шеи, плеча и верхней части бедра ребенка.
№5	Для фиксации перевязочных средств в области головы, средней части бедра взрослых, области плеча, груди, верхней части бедра и живота детей.
№6	Для фиксации перевязочных средств в области головы, груди, плеча, верхней части бедра и живота взрослых.
№7	Для фиксации перевязочных средств в области груди, живота и верхней части бедра взрослых.
№8	Для фиксации перевязочных средств в области груди, живота и верхней части бедра взрослых крупного телосложения.

Бинты №4 , №5 , №6 , №7 и №8 могут выпускаться в виде шорт (для фиксации в районе паха и промежности).

Бинты №3 , №4 , №5 , №6 и № 7 могут выпускаться в виде шапочки (для более удобной фиксации на голове).

Бинты выпускаются длиной: 0,10м; 0,15м; 0,20м; 0,30м; 3,00м; 25,00м и шириной: 10,0мм; 20,0мм; 30,0мм; 40,0мм; 50,0мм; 60,0мм; 70,0мм и 80,0мм.

Бинты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре 42С и относительной влажности до 80%.

Средний срок годности должен быть не менее 6 лет.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению данного изделия медицинского назначения не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед использованием бинтов, упаковку вскрывают и извлекают бинт. Затем используют его по назначению.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Бинты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация ИМН производится путем сжигания.