



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Зеленая Дубрава»

Горбунов В.Н.

2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Повязки биологической «Дигестол»

НАЗНАЧЕНИЕ.

«Повязка биологическая «Дигестол» предназначена для применения в хирургии в качестве раневого покрытия при комплексном лечении гнойных ран, после вскрытия абсцессов и флегмон, нагноившихся послеоперационных ран, ожогов, ожоговых ран после некрэктомии, трофических язв, пролежней, язвенно-некротических поражений стоп больных сахарным диабетом, при огнестрельных ранах, нагноившихся микротравматических повреждений кожи и мягких тканей, а также в стоматологии при лечении инфекционно-воспалительных поражений слизистой полости рта (пародонтоз, стоматит и др).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

«Повязка биологическая «Дигестол» представляет собой стерильные прямоугольные пластины губчатой структуры, различных типоразмеров в мм: (10x10), (50x50), (100x100), белого или кремового цвета, изготовленных методом сублимации из смеси растворов природного биополимера коллагена и коллагенолитического фермента дигестаза (коллагеназы из гепатопанкреаса камчатского краба).

Дигестаза (коллагеназа из гепатопанкреаса камчатского краба) – комплекс коллагенолитических трипсиноподобных протеаз обладает широкой субстратной специфичностью в отношении патологически измененного коллагена и выраженной некролитической активностью, оказывает непосредственное воздействие и на микробную флору, гидролизует пептидогликаны бактериальной оболочки.

«Повязка биологическая «Дигестол» оказывает положительное влияние на метаболические процессы заживления раны, обладает некролитическим противовоспалительным действием. Благодаря своему губчатому строению при аппликации на рану «Повязка биологическая «Дигестол» хорошо впитывает раневые экссудаты и под его воздействием превращается в гидрофильный гель, беспрепятственно заполняющий всю полость раны. Под влиянием экссудата и клеточных элементов тканей раны коллагеновый гель постепенно лизируется, освобождая дигестазу (коллагеназу) из гепатопанкреаса краба, которая обеспечивает очищение раны, а продукты коллагенолиза, включаясь в процессы раневого метаболизма, стимулируют репаративную регенерацию. Сама губка и образующийся из неё гель сорбируют экссудат и способствуют удалению продуктов некролиза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость составных компонентов повязки биологической «Дигестол».

Показанием для отмены «Дигестол» является полное очищение раны, прекращение экссудации, появление здоровых грануляций.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

«Дигестол» назначают в I фазу раневого процесса в качестве некролитического и противовоспалительного средства, способствующего очищению раны. С соблюдением правил асептики вскрывают пакет с «Биологической повязкой «Дигестол» нужного размера, обрезают края по форме раны и накладывают на раневую поверхность, при наличии раневой полости её рыхло тампонируют. Поверх накладывают стерильную марлевую салфетку и фиксируют обычным способом (бинтом, пластырем и пр.). Первую перевязку обычно производят на следующие сутки. В дальнейшем смену повязки производят по мере рассасывания губки.

Местное лечение ран (язв, ожогов и др.) «Дигестолом» проводят в сочетании другими необходимыми средствами общей и местной терапии.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Срок хранения – 3 года.

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Руководитель организации-заявителя

От _____ 200 г. № _____

Горбунов В.Н.
2007 г.

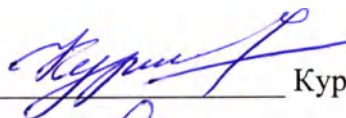


ИНСТРУКЦИЯ

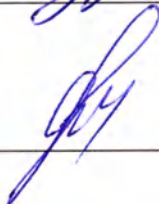
По применению Повязки биологической «Дигестол»

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Начальник цеха


Курлаев В.В.

Главный врач
Госпиталь для ветеранов


Г.М.Местергази

ИНСТРУКЦИЯ **по применению Повязки биологической «Дигестол»**

НАЗНАЧЕНИЕ.

«Повязка биологическая «Дигестол» предназначена для применения в хирургии в качестве раневого покрытия при комплексном лечении гнойных ран после вскрытия абсцессов и флегмон, нагноившихся послеоперационных ран, ожогов, ожоговых ран после некрэктомии, трофических язв, пролежней, язвенно-некротических поражений стоп больных сахарным диабетом, огнестрельных ран, нагноившихся микротравм кожи мягких тканей, а также в стоматологии при лечении инфекционно-воспалительных поражений слизистой полости рта (парадонтоз, стоматит и др).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

«Повязка биологическая «Дигестол» представляет собой стерильные прямоугольные пластины губчатой структуры, различных типоразмеров в мм: (10х10), (50х50), (100х100), белого или кремового цвета, изготовленных методом сублимации смеси растворов природного биополимера коллагена и коллагенолитического фермента дигестаза (коллагеназы из гепатопанкреаса камчатского краба).

Дигестаза (коллагеназа из гепатопанкреаса камчатского краба) – комплекс коллагенолитических трипсиноподобных протеаз обладает широкой субстратной специфичностью в отношении патологически измененного коллагена и выраженной некролитической активностью, оказывает непосредственное воздействие и на микробную флору, гидролизуя пептидогликаны бактериальной оболочки.

«Повязка биологическая «Дигестол» оказывает положительное влияние на метаболические процессы заживления раны, обладает некролитическим противовоспалительным действием. Благодаря своему губчатому строению при аппликации на рану «Повязка биологическая «Дигестол» хорошо впитывает раневые экссудаты и под его воздействием превращается в гидрофильный гель, беспрепятственно заполняющий всю полость раны. Под влиянием экссудата и клеточных элементов ткани раны коллагеновый гель постепенно лизируется, освобождая дигестазу (коллагеназу гепатопанкреаса краба), которая обеспечивает очищение раны, а продукты коллагенолиза, включаясь в процессы раневого метаболизма, стимулируют репаративную регенерацию. Сама губка и образующийся из неё гель сорбируют экссудат и способствуют удалению продуктов некролиза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость составных компонентов повязки биологической «Дигестол».

Показанием для отмены «Дигестола» является полное очищение раны, прекращение экссудации, появление здоровых грануляций.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

«Дигестол» назначают в I фазу раневого процесса в качестве некролитического противовоспалительного средства, способствующего очищению раны. С соблюдением правил асептики вскрывают пакет с «Биологической повязкой «Дигесто»» нужного размера, обрезают края по форме раны и накладывают на раневую поверхность, в наличии раневой полости её рыхло тампонируют. Поверх накладывают стерильную марлевую салфетку и фиксируют обычным способом (бинтом, пластырем и пр.). Перевязку обычно производят на следующие сутки. В дальнейшем смену повязки производят по мере рассасывания губки.

Местное лечение ран (язв, ожогов и др.) «Дигестолом» проводят в сочетании с другими необходимыми средствами общей и местной терапии.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.
Срок хранения – 3 года.