

Инструкция по применению
ЭЛЕКТРОД С АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР,
ОДНОРАЗОВЫЙ - «ИНИСС-МЕД», размер - а*б мм.
ТУ 9398-005-50034180-2015
ОКПД2 21.20.23.199

Назначение изделия:

Электрод предназначен для прикрепления (неинвазивного) к коже пациента с целью передачи электрического стимула через поверхность тела (например, чрескожная электростимуляция нервов (ЧЭСН), электростимуляция мышц, транскраниальная электростимуляция). Он представляет собой плоскую гибкую электропроводящую площадку с возможностью приклеивания с помощью геля к определенной части тела. Электрод соединяется с аппаратом посредством многоцветного изделия «Кабель подключения электродов для низкочастотных электротерапевтических процедур по ТУ 9398-006-50034180-2015» имеющего регистрационное удостоверение №РЗН 2016/5034 от 21.11.2016г. Применяется в физиотерапевтических отделениях клиник и лечебно-профилактических учреждений.

Общие сведения:

Электрод представляет собой изделие на основе электропроводной бумаги, которая равномерно распределяет ток по всей поверхности электрода и покрыта высококачественным адгезивным гелем (обеспечивающим хороший контакт с любыми типами кожи пациента и позволяет избежать процедуры эпиляции при снятии электродов после процедуры). Контакт электрода с кабелем подключения электродов для низкочастотных электротерапевтических процедур осуществляется при помощи зажима типа «крокодил» не имеющего непосредственного контакта с кожей пациента.

Показания к применению:

- для прикрепления (неинвазивного) к коже пациента с целью передачи электрического стимула через поверхность тела (например, чрескожная электростимуляция нервов (ЧЭСН), электростимуляция мышц, транскраниальная электростимуляция).

Противопоказания к применению:

- индивидуальная непереносимость кожи при контакте с используемыми материалами;
- повреждения кожного покрова в месте контакта с электродом

Меры безопасности:

Электрод – предназначен для однократного использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок годности изделия, который указан на этикетке.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять электрод по истечении срока годности.

Электрод должен эксплуатироваться при температурах от +10 °С. до +40°С.

Подготовка изделия к работе.

- протереть место наклеивания электрода на тело пациента спиртовой салфеткой, чтобы очистить кожу;
- отделить электрод от защитной пленки;
- наклеить электрод на подлежащий воздействию участок кожи пациента;
- присоединить к электроду зажим типа «крокодил» кабеля подключения электродов для низкочастотных электротерапевтических процедур;
- провести физиотерапевтическую процедуру.

По окончании процедуры:

- отсоединить от электрода зажим типа «крокодил» кабеля;
- начиная с места крепления зажима кабеля медленно снять электрод и утилизировать;
- место наклеивания электрода на кожу пациента протереть спиртовой салфеткой.

Ремонт и техническое обслуживание.

Техническому обслуживанию и ремонту изделия не подлежат

Вид поставки и маркировка на упаковке:

Электрод поставляется в групповой упаковке, где изделия упакованы в ZIP-LOCK пакет от 4 до 100 шт.

Хранение:

Срок годности электрода в потребительской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре, либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69

(при температуре от +5° до +15°С и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий).

Гарантийный срок годности – 12 месяцев.

Утилизация

Использованные изделия стерилизуются складываясь в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б, и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Изготовитель:

ООО "ИНИСС-мед" 195196, Санкт-Петербург,
ул. Таллинская дом 7 лит. "О" Тел/факс: (812) 313-76-68

иниссмед.пф
mail@iniss.ru

