

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
А.А.Алепшин
«19» ноября 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
КОЛЛАГЕНОВЫЙ ГИДРОГЕЛЬ «ЭМАЛАН»

Регистрационный номер:

Назначение: раневое покрытие.

Состав: коллаген, димексид, аллантоин, эмоксипин.

Вспомогательные вещества: вода очищенная, натрия тетраборат, натрия фосфат, фенолпип.

Коллаген – строительный материал и активный участник процесса заживления.

Эмоксипин – антиоксидант, блокирует негативное повреждающее действие свободных радикалов, снижает перекисное окисление липидов, за счет этого блокирует патологический процесс и ускоряет заживление.

Аллантоин – способствует очищению раны и удалению мертвых клеток, смягчает роговой слой и стимулирует регенерацию, ускоряет заживление ран, успокаивает раздраженную кожу.

Димексид (ДМСО, диметилсульфоксид) – обладает способностью проникать через биологические мембраны, в том числе через кожные барьеры, усиливает проникновение через кожу лекарственных веществ. Обладает противовоспалительным действием, в дерматологии используется в лечении склеродермии, фурункулеза, рожистого воспаления, акне и др.

Описание: белая или белая с желтоватым оттенком однородная масса гелеобразной консистенции со специфическим запахом.

Свойства: оказывает противовоспалительное, противомикробное, антигипоксическое действие, улучшает микроциркуляцию, в результате уменьшается покраснение, болезненность, припухлость, а также снимает зуд и шелушение. Препятствует распространению инфекции и предупреждает образование рубцов.

Показания к применению:

- негнойные без кровотечения раны различной этиологии;
- ожоги любого происхождения (солнечные, химические, термические);
- травматические и послеоперационные раны;
- длительно незаживающие раны;
- трофические язвы;
- пролежни;
- любые бытовые повреждения кожи, укусы животных и насекомых;
- гингивиты, пародонтиты, стоматиты;
- ожоги и травматические повреждения слизистой оболочки носо- и ротоглотки;
- дерматиты и дерматозы;
- повреждения слизистой оболочки влагалища;
- трещины анального отверстия;
- акне и акнеформные дерматозы, розовые угри, демодикоз, себорея;
- комбинированная терапия после химических и механических пилингов, лазерной эпиляции;
- после косметологических операций для ликвидации послеоперационных и травматических отеки, экхимозов различной степени выраженности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав.

Способ применения:

- подготовить рану, очистить от нежизнеспособных тканей, обработать раствором антисептика и просушить;
- нанести на рану гидрогель равномерным слоем толщиной 1-2 мм, дать немного подсохнуть;
- закрыть рану вторичной повязкой;
- процедуру желательнее проводить несколько раз в день, но не реже 1 раза в день;
- при ожогах I-IIА степени на обожженную поверхность нанести тонким слоем гидрогель и дать ему высохнуть, процедуру повторять через 1-2 часа до купирования боли и снятия отека;
- при небольших повреждениях кожи вторичная повязка не нужна.

Особые указания: основным принципом использования гидрогеля является его частое нанесение в небольшом количестве на поврежденную поверхность.

При применении гидрогеля у послеоперационных больных следует помнить, что данный препарат улучшает микроциркуляцию в зоне применения, поэтому начинать использовать его следует не ранее чем через 5-8 часов после операции.

Побочные действия: редко в первые минуты после нанесения на кожу или слизистые возможно покалывание, пощипывание, чувство стянутости, проходящее самостоятельно и не требующее отмены препарата. При индивидуальной чувствительности возможны местные аллергические реакции. В этом случае применение препарата прекращают.

Условия хранения: в сухих, защищённых от света условиях, при температуре от +4°C до +25°C. Пожелтение гидрогеля в процессе хранения не отражается на качестве продукции и не влияет на эффективность средства.

Срок годности: 3 года.

Производитель: ЗАО «Зеленая Дубрава», 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 151, тел.(49622) 3-05-85, (495) 993-99-95