

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

ГУБКА КОЛЛАГЕНОВАЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Назначение:

Губка коллагеновая кровоостанавливающая предназначена для применения в качестве раневого покрытия в хирургии, травматологии, дерматологии и стоматологии или в домашних условиях в качестве местного гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки альвеолярного кровотечения после удаления зуба, для заполнения дефектов паренхиматозных органов.

Основные технические характеристики:

Губка коллагеновая кровоостанавливающая представляет собой стерильные прямоугольные пластины губчатой структуры, различных типоразмеров в мм: $10,0 \times 10,0 \times 8,0$ ($10,0 \times 20,0 \times 8,0$), ($50,0 \times 50,0 \times 8,0$), ($53,0 \times 53,0 \times 8,0$), ($50,0 \times 100,0 \times 8,0$), ($97,0 \times 97,0 \times 8,0$), ($100,0 \times 100,0 \times 8,0$), ($100,0 \times 200,0 \times 8,0$) желтого или кремового цвета, изготовленных методом сублимации из смеси растворов природного биополимера коллагена, аминокaproновой кислоты, арговита, борной кислоты.

Противопоказания к применению:

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.

Подготовка к работе изделия:

Местно. Губку вскрывают непосредственно перед применением, соблюдая правила асептики.

На предварительно подготовленную раневую поверхность накладывают губку и прижимают в течение 2-3 минут или плотно тампонируют кровоточащую полость. После пропитывания кровью губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности.

После остановки кровотечения губку не удаляют, так как впоследствии она полностью рассасывается.

Порядок работы изделия:

Губка коллагеновая кровоостанавливающая оказывает гемостатическое и противомикробное действие, стимулирует регенерацию и эпителизацию тканей.

Препятствует распространению инфекции и предупреждает образование рубцов.

КОПИЯ
ВЕРНА

Правила хранения и использования:

В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре от +4° до +25° С

Срок годности – 3 года со дня стерилизации.

Утилизация:

Губка коллагеновая кровоостанавливающая, подлежащая утилизации или ее части утилизируются, как медицинские отходы класса Б «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии СанПиН 2.1.7.2790, поскольку в процессе эксплуатации контактирует и загрязняется биологическими жидкостями и выделениями тканей организма (кровь и/или другие биологические жидкости).

Упаковочные материалы, пачка из картона подлежат утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

Губка коллагеновая кровоостанавливающая подлежит утилизации в случае нарушения целостности потребительской упаковки, либо в случае окончания срока годности в стерильной упаковке.

ТУ 9393-004-13380984-2009

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141800,

Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 151

тел./факс: +7 (496) 223-05-85, +7 (495) 993-99-95 E-mail: zdubrava@yandex.ru

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 2 листа(ов).

Генеральный директор

Патеева О.Ю.

22 09

2018

