

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО ЦСП «Промышленный
стандарт»

Середа О.А.

«07» октября 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Презервативы латексные: классические, с точечной структурой поверхности, с
ребристой поверхностью, ультратонкие.

2010

1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Используйте новый презерватив для каждого полового акта.
- Разрывайте упаковку презерватива аккуратно. Не используйте для открытия упаковки зубы, ножницы и другие предметы, которые могут повредить презерватив.
- Перед началом полового акта, расположите свернутый презерватив на головке полового члена, находящегося в состоянии эрекции. Физические повреждения, пре- эякуляционные выделения, семенная жидкость, вагинальные секреты и кровь могут быть переносчиками инфекций.
- Расправьте презерватив вниз до основания полового члена. Если презерватив с легкостью не расправляется, то возможно он расположен внутренней стороной, поврежден или слишком старый. Выбросьте его и попробуйте одеть новый.
- Сразу после эякуляции извлеките половой член, прижав к нему кольцо презерватива, чтобы он не соскользнул. Избегайте вытекания семенной жидкости.
- Заверните презерватив в салфетку или бумагу и поместите в емкость для отходов. Помойте руки под водой с мылом.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Каждый презерватив можно использовать только один раз.

- Храните презервативы в прохладном, сухом месте (не более 37 °C) и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Если латекс кажется липким или непрочным, поврежденным- не используйте презерватив.
- Если цвет презерватива неровный или изменился, не используйте презерватив.
- Не применяйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, а также лосьоны и вазелин, т.к. это может повредить презерватив.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергические реакции.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Презервативы следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности

воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Генеральный директор
ООО ЦСП «Промышленный стандарт»



Середа О.А.

«01» октября 2010 г