

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

«Альянс Групп»

Гасымлы А.А.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия:

«Перчаток медицинских смотровых Dr.KLAUSS»

производства фирмы: **«Perusahaan Getah Asas Sdh. Bhd.»**,
Малайзия

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральный директор
ООО «Альянс Групп»



Гасымлы А.А.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Перчатки медицинские используются для осмотра пациентов в медицинских, стоматологических и косметологических учреждениях.

Перчатки медицинские смотровые Dr.KLAUSS, имеют три варианта исполнения: нитриловые, текстурированные, без пудры, нестерильные; латексные, гладкие, опудренные, нестерильные; латексные, текстурированные, без пудры, нестерильные.

Применяются в общей медицине как средство индивидуальной защиты для медицинского персонала - при первичных осмотрах и диагностике, хирургических и амбулаторных процедурах, а также в стоматологии:

- возможный контакт с кровью;
- контакт с семенной жидкостью или цервикальным секретом;
- контакт со слизистыми оболочками носа, рта;
- контакт с какой-либо биологической жидкостью, независимо от наличия в ней крови;
- контакт с предметами или материалами, загрязненными кровью или другими биологическими жидкостями;
- при любом нарушении целостности кожи медперсонала или пациента;
- возможный контакт с постельными принадлежностями пациента.

2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латексные перчатки изготовлены из натурального латекса, а нитриловые перчатки изготовлены из синтетического каучука.

Гладкие перчатки повышают чувствительность пальцев врача или косметолога.

Перчатки, выполненные из латекса, обладают хорошими протекторными свойствами в отношении микроорганизмов, идеально облегают ладонь, не стесняют движений.

Нитриловые перчатки, как альтернатива латексных, для людей имеющих аллергические реакции, устойчивы также к химическим агентам, термоэластичны.

Перчатки медицинские, используются для индивидуальной защиты. Предохраняют от инфицирования и повреждения кожных покровов рук.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перчатки не имеют направленности относительно правой или левой руки, поэтому для работы необходимо достать из коробки две любые перчатки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Надевать **Перчатки** необходимо на сухие чистые руки. При этом их необходимо равномерно подтягивать с разных сторон во избежание порыва или перекоса перчаток на руке. При правильном подборе размера **Перчаток** и правильном надевании пальцы рук должны быть плотно обтянуты материалом перчаток, между кончиками пальцев рук и пальчиков **Перчаток** не должно быть воздушных полостей.

После работы **Перчатки** необходимо снять с рук путем выворачивания наизнанку от конечной части **Перчаток** со стороны кисти руки.

Снятие перчаток

Этапы	Обоснования
1. Сделать отворот на левой перчатке пальцами правой руки, касаясь только наружной стороны	Предупреждается загрязнение кожи предплечья или рукавов халата, если перчатки покрывают нижнюю часть рукавов халата
2. Снять перчатку с левой руки, выворачивая ее на выворот и держа за отворот. Держите ее в правой руке	Предупреждается загрязнение окружающей среды
3. Взять правую перчатку левой рукой за отворот с внутренней стороны	Предупреждается загрязнение левой руки
4. Снять перчатку с правой руки, выворачивая ее на выворот: левая перчатка оказалась в середине правой	Предупреждается загрязнение окружающей среды, обеспечивается инфекционная безопасность
5. Положить перчатки в дезраствор.	Предупреждается распространение микроорганизмов в окружающей среде

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перчатки упакованы в бумажные коробки. На каждой коробке имеется маркировка размера и типа перчаток находящихся внутри. Для удобства, на лицевой части коробки находится перфорированный отрывной овал. Распаковывать коробку следует путем отрыва перфорированной части коробки, что позволяет получить доступ к Перчаткам.

Транспортируются транспортными коробками. В транспортной коробке 10 упаковок перчаток.

Одна упаковка содержит 50 пар перчаток.

Хранить перчатки необходимо согласно следующей инструкции: помещение должно быть не влажным и прохладным, избегать повышения температуры (до 40 гр.), должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Предлагаемые «Перчатки медицинские смотровые Dr.KLAUSS» – одноразовые и после применения их необходимо выкинуть в контейнеры для мусора. Не допускается использование Перчаток повторно, а также использование одной пары перчаток при работе с разными пациентами!

Производитель Перчаток «Perusahaan Getah Asas Sdh. Bhd.», Малайзия гарантирует качество и соответствие заявленным характеристикам.