




«УТВЕРЖДАЮ»

Коммерческий директор
ООО «РИПЛ»

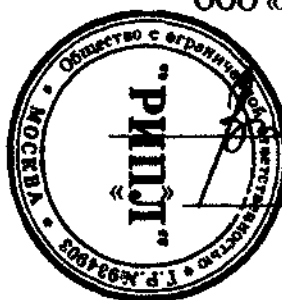

В.В. Помегун

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Инструменты бужирующие для проведения малонивазивных вмешательств

Назначение медицинского изделия

Инструменты бужирующие (катетеры, зонды, дилататор), с принадлежностями предназначены для проведения малоинвазивных вмешательств. Катетеры предназначены для дренирования абсцессов, кист, асцита, гематом, для пункции плевры, холицистостомии, нефростомии, чрезкожной гастростомии, чрезкожной аспирации жидкости, введения лекарственных препаратов, для проведения гистеросальпингографии и сиалогодуктографии. Катетеры изготовлены из полиэтилена или полиуретана, эхоконтрастны. Способ фиксации: фиксирующей нить, «свиной хвостик» (pigtail).

Дилататоры мягко и атравматично разделяют ткань, обеспечивая введение катетеров, стентов, изготовлены из рентгеноконтрастного полиэтилена и снабжены люэровским наконечником с винтовой фиксацией для ввода контрастного вещества и замены проводника.

Зонд предоставляет собой эластичную трубку для введения в каналы или полые органы с диагностической или лечебной целью и изготовлен из поливинхлорида. Зонд (проводник) особенно надежен и гибок. Предлагаются различной длины, с рабочими кончиками разных размеров и конфигурации (прямые, J-образные) и с подвижным или фиксированным сердечником.

Область применения – хирургия, урология, гинекология, гастроэнтерология.

Предупреждение при использовании

Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции перед применением.

Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия.

Показания для применения

Инструменты бужирующие для проведения малоинвазивных вмешательств производства PBN MEDICALS Denmark A/S (Дания), Medical Device Technologies, Inc. (США) могут быть предназначены в лечебно-диагностических целях. Могут применяться только квалифицированным и обученным медицинским персоналом.

Упаковка

Инструменты бужирующие для проведения малоинвазивных вмешательств упакованы в первичную стерильную индивидуальную упаковку (бумага, полиэтилен), вторичную упаковку - картонную коробку.

Стерилизация



Стерилизация этиленоксидом.

Стерильность сохраняется, если упаковка не повреждена, не раскрыта, срок действия не истек.

Хранение

Хранить в темном, сухом, прохладном месте. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Срок годности:

5 лет.

Внимание: Для снижения уровня риска заражением СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.