


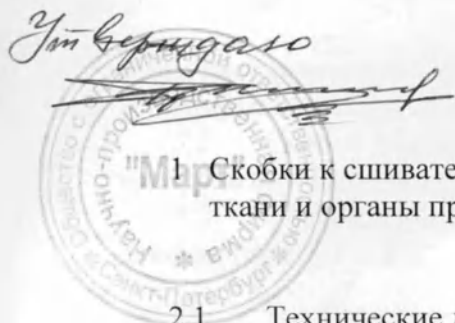

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Скобки к сшивателям медицинским, предназначены для наложения механического шва на ткани и органы при хирургических операциях, в условиях клиник.

2 Технические данные

2.1 Технические данные скобок приведены в таблице

Наименование параметров	Величина*
Диаметр проволоки d	_____
Ширина спинки скобки	_____
Высота скобки	_____
Материал скобок	_____

Примечание: в графы таблицы помеченные * вносятся данные поставляемой партии скобок

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки скобок входят:

3.1.1 При поставке скобок россыпью

1. Скобки — 1000 шт.

2. Упаковка (пробирка) - 1 шт.

3.1.2 при поставке скобок установленных в одноразовый магазин (стерильно)

1 Скобки _____ *

2 Магазин 1 шт.

3 Упаковка (пакет) 1 шт.

Примечание: в графу помеченную * вносится количество скобок установленное в конкретном магазине

4 Устройство и принцип работы

4.1 Скобки к сшивателям органов представляют собой специальный элемент П-образной формы, выполненный из проволоки различного диаметра, в котором соотношение размеров спинки и высоты ножек имеет определённую зависимость и соответствует конкретной модели сшивателя, для которого предназначены скобки.

4.2 Принцип работы скобки заключается в следующем: скобка устанавливается в рабочую часть сшивателя прокалывает ножками сжатый до определённого зазора орган и взаимодействуя с упорной частью сшивателя, загибаются в В – образную или О – образную форму, образуя шов.

4.3 Скобки поставляемые россыпью, перед использованием установите в соответствующий сшиватель так как рекомендовано в инструкции по эксплуатации сшивателя. Скобки требуют аккуратного, бережного обращения берите их только пинцетом. Для установки в сшиватель скобку необходимо взять пинцетом за ножку и спинкой вставить в соответствующий паз магазина или бранши сшивателя (рис. 1).



Рис. 1. Зарядка магазина скобками

4.4 При использовании скобок установленных в одноразовый магазин. Возьмите упаковку с магазином аккуратно вскройте её и установите магазин в соответствующий сшиватель.

5 Предстерилизационная очистка, стерилизация и дезинфекция

5.1 Скобки поставляемые россыпью подвергается предстерилизационной очистке. Для этого поместите скобки в ёмкость с дном из мелкой сетки (желательно не использовать марлю) и обмойте проточной водой в течение 0,5 мин. Замочите их в течение 15 мин в растворе нейтрального моющего средства типа «Биолот» при температуре 50—55°C, после чего промойте в этом же растворе в течение 0,5 мин. Сполосните скобки проточной водой в течение 3—4 мин, а

затем дистиллированной водой в течение 0,5—0,6 мин. Допускается проводить предстерилизационную очистку промыванием скобок в спирте медицинском 96%.

5.2 Скобки установленные в магазины стерилизуйте 6 %-ным раствором перекиси водорода при температуре 50°C в течение 3 ч.

5.3 Скобки поставляемые установленными в одноразовый магазин не требуют выполнения действии по п. 5.1 и 5.2.

6 Правила хранения и транспортирования

6.1 Скобки должны храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от 5° до 40°C, и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°C.

6.2 Транспортируют скобки всеми видами крытого транспорта в диапазоне температур от -60° до 50°C.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие скобок требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения – не менее 10 лет со дня изготовления.

7.3 Для скобок, установленных в одноразовые магазины, срок хранения не более 1 года с даты стерилизации.

8 Свидетельство о приемке

Скобки, _____
соответствуют техническим условиям ТУ 9432—003—58359770—2011 и признаны годными для эксплуатации.

Подпись лица ответственного за приемку _____

Дата изготовителя _____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____