

ИНСТРУКЦИЯ

по применению трубки гастростомической ТГ

1. **НАЗНАЧЕНИЕ.** Трубка гастростомическая предназначена для кормления больных через гастростому.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Трубка имеет два канала, раздувной баллон на дистальном конце и коннекторы на проксимальном. Основной канал служит для подачи питания, второй – для надува баллона. Баллон предназначен для фиксации трубки внутри организма, для закрепления ее с внешней стороны трубка снабжена фиксатором. Коннектор на основном канале имеет два входа для подсоединения шприцов разных типов, коннектор на втором канале имеет клапан для удержания жидкости в раздувном баллоне. Длина трубки 250...350 мм, наружный диаметр от 2,7 до 8,0 мм, объем баллона: 5 мл, 10 мл и 20 мл.

2. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

При отсутствии осложнений от установки первичной гастростомы противопоказаний к смене нет.

3. **ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.** Индивидуальная непереносимость материала в виде местной реакции.

4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:**

- Положить пациента на спину.
- Удалить имеющуюся гастростомическую трубку.
- Обработать место стомы.

Трубку устанавливают не ранее, чем через месяц после установки первичной гастростомы!

5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ.**

- Вставить трубку в желудок.
- С помощью шприца раздуть баллон водой.
- Закрепить трубку внешним фиксатором.
- С помощью шприца производить кормление.

Инструкцию составила



Е.Е. Жукова