

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ: ТРОСТИ И КОСТЫЛИ «VEGA» по ТУ 9396-005-63055870-2015

Варианты исполнения:

Трость одноопорная Vega, артикулы: V 101 – V 139
Трость трехопорная Vega, артикулы: V 140 – V 169
Трость четырехопорная Vega, артикулы: V 170 – V 189
Трость-сиденье Vega, артикулы V 190 – V 199
Костыли подмышечные Vega, S, артикулы: V 201 – V 209
Костыли подмышечные Vega, M, артикулы: V210-219
Костыли подмышечные Vega, L, артикулы: V220-229
Костыли с опорой под локоть Vega, артикулы: V 230 – V 279

Назначение

Костыли и трости предназначены для облегчения ходьбы людей с ограничениями жизнедеятельности внутри и вне помещений. Костыли и трости могут использоваться в лечебно-профилактических, реабилитационных центрах, а также в повседневной жизни.

Костыли и трости позволяют исключить травмы ладоней (потёртости), уменьшить нагрузку на плечевой пояс, снизить энергозатраты при ходьбе. Равномерно распределенная нагрузка позволяет пациенту двигаться более продолжительные периоды времени. Изменение высоты позволяет регулировать костыли и трости в соответствии с индивидуальными размерами пациента.

Краткое описание

Изделия могут иметь различную цветовую гамму и форму рукояток. Цвет и ручка в зависимости от артикула указаны на этикетке. Изделия изготавливаются из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, регулируются по высоте. Они снабжены сменными резиновыми нескользящими насадками. Рукоятки выполнены из прочного нескользящего износостойкого пластика. Изделия могут комплектоваться устройством противоскольжения.

Инструкции по монтажу и эксплуатации

1. Освободить изделие от упаковки
2. Установить необходимую высоту изделия. Установка высоты происходит путем нажатия и перемещения кнопки в необходимое по высоте (росту) отверстие.
3. В процессе эксплуатации либо после длительного хранения необходимо производить осмотр изделия на предмет наличия дефектов и надежного крепления всех элементов.
4. Для открытия устройства противоскольжения опустите затвор, расположенный в нижней части изделия, вниз и зафиксируйте его.

Техническое обслуживание

Уход

Изделие достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте изделие на предмет повреждений. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер, убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Ограничения и противопоказания

Не использовать устройство противоскольжения на каменных, твердых поверхностях и в помещениях.

Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на изделии максимально допустимую массу пользователя!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений.
- Регулярно проверяйте наконечник на наличие повреждений или износ.
- Механические изменения производить запрещено.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Характеристики		
		Высота, мм	Максимальная масса пользователя, кг	Масса изделия, кг
Трость одноопорная Vega	V101 – V139	76 – 98,5	120	0,4
Трость трехопорная Vega	V140 – V 169	74 – 96,5	120	0,4
Трость четырехопорная Vega	V170 – V 189	74 – 96,5	100	1,0
Трость-сиденье Vega	V190 – V 199	56 (размер сиденья 19x19 см)	100	0,9
Костыли подмышечные Vega, S	V201 – V 209	94 - 114	150	1,6
Костыли подмышечные Vega, M	V210 - V219	112 - 132	150	1,7
Костыли подмышечные Vega, L	V220 - V229	132 - 152	150	1,8
Костыли с опорой под локоть Vega	V230 – V 279	95 – 125 (длина верхней секции от 25 до 32,5 см, длина нижней секции от 70 до 92,5 см)	150	0,8

Шаг регулировки высоты – 25 мм.

Комплект поставки:

- трости или костыли с опорой под локоть – 1 шт. или костыли подмышечные 2 шт.;
- устройство против скольжения (в зависимости от артикула) – не более 3 шт.;
- резиновый наконечник – не более 8 шт.;
- инструкция по применению – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

Количество устройств против скольжения, резиновых наконечников указано на этикетке.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий должно производиться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 при условиях хранения 2, но при температурах от минус 40 до плюс 40 °С.

Изделия должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - **6 месяцев** со дня продажи первому потребителю; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения.

Гарантийный срок хранения - **24 месяца** с даты производства.

Условия утилизации: Утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Адрес и наименование производителя, принимающего претензии потребителей:

ООО «Экотен», Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.18, лит.А.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК производителя

Дата продажи _____

Печать организации, продавшей изделие

Макет этикетки

 идеи для движения Трость одноопорная Vega, артикул V _____ ТУ 9396-005-63055870-2015 Мах: _____ кг Цвет: _____ Ручка: _____ Количество УПС: _____ Кол-во наконечников: _____	Фирма-изготовитель: ООО «Экотен» Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, пр. Константиновский, д. 18, лит. А Телефон: (812) 325-09-04 www.ecoten.ru Дата изготовления: _____
--	--

Генеральный директор
ООО «Экотен»



А.Г. Осипов

Пронумеровано и скреплено печатью

3 листов

Генеральный директор ООО "Экотен"



Осипов А.Г.