

Иммобилизатор шейный «Стифнек» (Stifneck) Инструкция по использованию.




① Определение размера:


При спокойном положении головы (взгляд направлен прямо), измерьте расстояние от подбородка до плеча, как показано на рисунке.



② В соответствии с размером подберите иммобилизатор, как показано на рисунке:

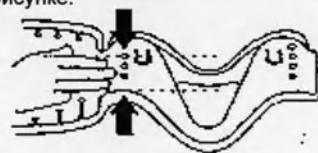

③ Отрегулируйте иммобилизатор по высоте, как показано на рисунке:

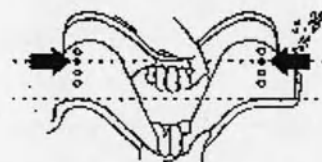

Предназначен для одноразового использования.



The product is in compliance with the essential requirements of Council Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive.


U.S. Patient Nos. 5,795,315; 5,622,529, Other U.S. And International Patents Apply.

© 2005 Laerdal Medical AS. All Rights Reserved.



Laerdal
helping save lives

- ④ Зафиксируйте упор подбородка, надавив на фиксаторы с двух сторон:

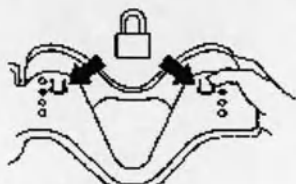

- ⑤ Наденьте иммобилизатор на пациента, при спокойном положении головы (взгляд направлен прямо), для этого сначала установите упор для подбородка, в случае если размер отличается от определенного, снимите, подрегулируйте и снова установите, как показано на рисунке:



Зафиксируйте заднюю часть иммобилизатора с помощью фиксатора на «липучке»



Для лежачих больных: осторожно просуньте заднюю часть иммобилизатора под шею пациента перед установкой упора для подбородка, как показано на рисунке:



Внимание:

Не регулируйте иммобилизатор на пациенте!

Иммобилизатор Стифнек предназначен только для использования квалифицированным персоналом! Не правильное использование изделия может привести к необратимым последствиям!

Не применяйте не подходящий по размеру иммобилизатор!