

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ЭкоПром»



А.Н. Авдеев
«08» ноября 2017г.

Инструкция по применению изделия:

«Отрезы марлевые нестерильные по ТУ 21.20.24-001- 13961882-2016»,
производства ООО «ЭкоПром», Россия

Версия 1.0	Первая версия инструкции по применению.
Версия 1.1	Версия документа от 08.11.2017г. в соответствии с запросом о предоставлении материалов и сведений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) №10-47489/17 от 02.10.2017г.

Назначение изделия: «Отрезы марлевые нестерильные по ТУ 21.20.24-001- 13961882-2016» предназначены для изготовления операционно-перевязочных средств, используемых для защиты операционных ран и раневых поверхностей от воздействия окружающей среды.

Описание изделия: Отрезы выпускается из отбеленной марли с поверхностной плотностью 36 ± 2 г/м² по ГОСТ 9412, или из медицинской марли хлопчатобумажной отбеленной по ТУ 9393-001-10715071-2014 с поверхностной плотностью 28 ± 5 г/м². Отрезы скomплектованы по одному. Изделия упакованы в пленочную оболочку (кроме поставляемых Министерству обороны), пленку полипропиленовую и пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, края которых сваривают термическим способом. Изготовленный из отрезков перевязочный материал подлежит стерилизации в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными органами здравоохранения. Метод стерилизации определяется медицинским учреждением.

Размеры:

- 1 Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36 ± 2 г/м²; размеры, см: 100 x 90, 200 x 90, 300 x 90, 500 x 90, 1000 x 90, 2000 x 90.
- 2 Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28 ± 5 г/м²; размеры, см: 100 x 90, 200 x 90, 300 x 90, 500 x 90, 1000 x 90, 2000 x 90.

Показания к применению: изготовление операционно-перевязочных средств (например, салфетка, тампон, шарик), защита от воздействия окружающей среды операционных ран, раневых поверхностей.

Противопоказания к применению: нет.

Применение изделия: Для изготовления салфетки:

- Раскроить отрез для салфетки размером: 20x25 см — для малой, 30x40 см — для средней, 60x40 см — для большой;
- Сложить отрез по длине с двух сторон к середине (на середине салфетки концы соприкасаются);
- Сложить по ширине сложенную по длине салфетку (на середине салфетки концы соприкасаются);
- Перегнуть салфетку на середине, на месте соприкосновения концов салфетки.

Для изготовления шарика:

- Раскроить отрез для шарика размером: 6х7 см — для малого, 11х12 см — для среднего, 17х 17 см — для большого;
- Сложить приготовленный кусок отреза по длине с двух сторон к середине;
- Сложить отрез пополам, обернуть вокруг указательного пальца (образуется кулек);
- Заправить в полученный треугольник свободные концы.

Для изготовления тампона:

- Раскроить отрез для приготовления перевязочного материала;
- Загнуть подрезанные края отреза внутрь на 5-6 см и в том же направлении дважды сложить пополам;
- Сложить пополам образовавшуюся полоску из отреза 60х10 см (нижняя половина салфетки должна быть длиннее верхней на 5-6 см);
- Сложить еще раз тампон пополам, свободный край нижнего слоя отреза заворачивают на тампон для захватывания его во время операции.

Меры предосторожности: Перед использованием необходимо снять с места наложения повязки кольца, браслеты, часы, ожерелья, цепочки.

Транспортирование и хранение: Транспортирование изделий производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Температура транспортировки изделий в соответствии с ГОСТ 15150 составляет от -50 °С до +50 °С. Отрезы марлевые нестерильные по ТУ 21.20.24-001- 13961882-2016 должны храниться в чистом, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°С до 35°С и влажности воздуха 50%-80% в соответствии с требованиями ГОСТ 15150. Не рекомендуется хранить бинты рядом с нагревательными приборами, в местах повышенной температуры и рядом с предметами, обладающими сильным запахом (бытовая химия).

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур. Запрещено оказание чрезмерного физического давления на изделие.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации в соответствии с УХЛ категории 4.2 по ГОСТ Р 15150 имеют следующий температурный диапазон: от 10 °С до 35 °С и влажностью воздуха 50%-80%. Изготовленный из отрезов перевязочный материал подлежит стерилизации в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными органами здравоохранения. Метод стерилизации выбирается медицинским учреждением.


Утилизация: По своему морфологическому составу, отрезки и упаковка не содержат материалов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, однако после использования, изготовленные из отрезков перевязочные средства относятся к медицинским отходам класса Б и подлежат требованиям утилизации согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (для отходов класса Б).

Гарантия изготовителя: Изготовитель ООО «ЭкоПром» (Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, д.116/95) гарантирует соответствие изделий заявленным свойствам в течение срока годности при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортирования.

Гарантийный срок хранения отрезков – 5 лет.

Директор
ООО «ЭКОПРОМ»

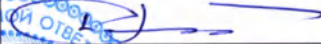

 Авдеев А.Н.

Прошито и пронумеровано четыре лист