

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа"

В.П. Чув
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического антисептического
гемостатического для зубных лунок
«АЛЬВАНЕС-ПАСТА»
ТУ 9391-048-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Альвеолярные компрессы после удаления зубов.

СВОЙСТВА

«Альванес»- кровоостанавливающее рассасывающееся средство для альвеол, которое обволакивает кровоточащую поверхность и благодаря набуханию при контакте с кровью, оказывает давление на поврежденные капилляры, что в совокупности с гемостатическим действием аминокaproновой кислоты быстро останавливает кровотечение.

В состав пасты «Альванес» входят:

- гидрохлорид лидокаина - местный анестетик;
- цетримид - сильный антисептик;
- гелеобразователь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не совместим с пенициллином.

Внимание! В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением материал обязательно выдержать при температуре (+18...+23)°C.

Скатать из пасты шарик и поместить в зубную лунку. Сверху наложить тампон из гидрофильной ваты и рекомендовать пациенту сильно накусить ее. Через 10 минут ватный тампон вынуть, а компресс по истечении 4-6 часов рассосется или станет студнеобразным, в зависимости от количества препарата и степени пропитанности кровью.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (банка)	- 20,0 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в герметично закрытой таре, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности - 2 года.